

ロブネル カテーテル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

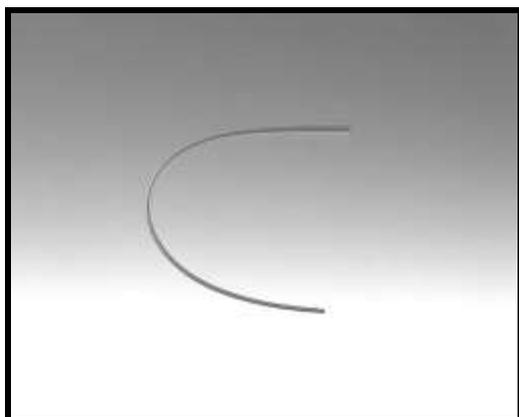

本品の先端は閉じた 2 孔式(先端閉)と、先端に円形型の孔を持つ 3 孔式(先端開)がある。本品は赤色である。

<原材料>

カテーテル: ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))

<種類>

仕様	カテーテル長さ(cm)
2孔(先端閉:側孔2個)	41
3孔(先端開:側孔2個)	

【使用目的又は効果】

本品は尿道経由で膀胱に挿入、留置し、導尿に用いるネラトンカテーテルである。

【使用方法等】

- 1.包装を開封したら、汚染に十分注意してカテーテルのシャフトに潤滑剤を塗布する。
- 2.尿道口よりカテーテルを挿入する。
- 3.必要に応じ、ファネル部にチューブ又は尿収集用バッグ等(別売)を接続する。
- 4.尿を排出させ、カテーテルを尿道から抜去する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 使用中に本品に使用されているポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがある。
- ※●本品はMR Safe であり、一般的なMR検査による影響はない。

2.不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

1)その他の不具合

破損/変形、挿入困難、カテーテルの移動、カテーテルの閉塞、接続外れ

2)重大な有害事象

尿の逆流、尿溢出、出血、敗血症、尿道及び膀胱の穿孔、腹膜炎

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205