

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器 吸引キット JMDNコード 13846000

デーリー サクション カテーテル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】

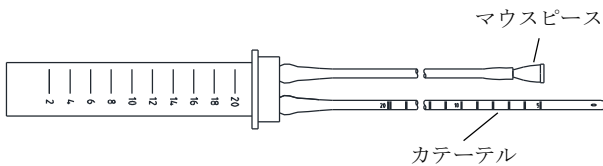

本品は、新生児の口腔内、気管、外耳等から羊水等を吸引除去するために使用するもので、カテーテル先を新生児の気道等へ挿入し、トラップ管を垂直に保持して吸引管端より口で吸引し、排液をトラップ管内に貯留するものである。

<原材料>

**アクリロニトリブタジエンスチレン共重合体、インキ、ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))

【使用目的又は効果】

本品は新生児の口腔内、鼻腔内、気管等にある羊水等を吸引するためのカテーテルである。

【使用方法等】

カテーテル先端を目的部位にあて、マウスピースより静かに吸引する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 使用中に本品に使用されているポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがある。

2.不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

1)その他の不具合

機器の破損/変形、挿入困難、閉塞、接続外れ

2)重大な有害事象

無気肺、低酸素症、気管支粘膜の損傷、出血

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

*カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205