

タッチトロール コネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】



吸引時

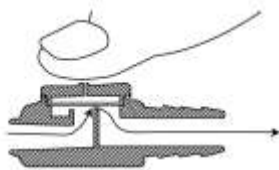

停止時

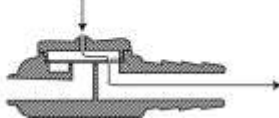

本品は吸引用カテーテル（例：サクシジョンカテーテル等）と接続し、喀痰等の気管内分泌物を吸引する際の吸引圧調節に用いるコネクタである。

【使用目的又は効果】

- 1.排液（気管分泌物）用
- 2.滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

- 1.延長チューブに本品を接続してから、吸引源の吸引圧を設定する。
- 2.TTCコネクタ型サクシジョンカテーテルを本品に接続してから、本品上部（青色）小孔を指で軽く塞いで、吸引が作動することを確認する。
- 3.カテーテル先端から通水し、吸引できることを確認する。
- 4.吸引休止時、本品底部（透明部分）に吸引物が貯留するので、性状が観察できる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 洗淨及び消毒のため、本品内部まで液体を吸引しないこと。[弁の機能に影響し、吸引不良が生じるおそれがあるため。]

2.不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

1)その他の不具合

機器の破損/変形、閉塞、接続外れ

2)重大な有害事象

無気肺、低酸素症等

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載（自己認証（当社データ）による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-917-205