

## プール サクション チューブ


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

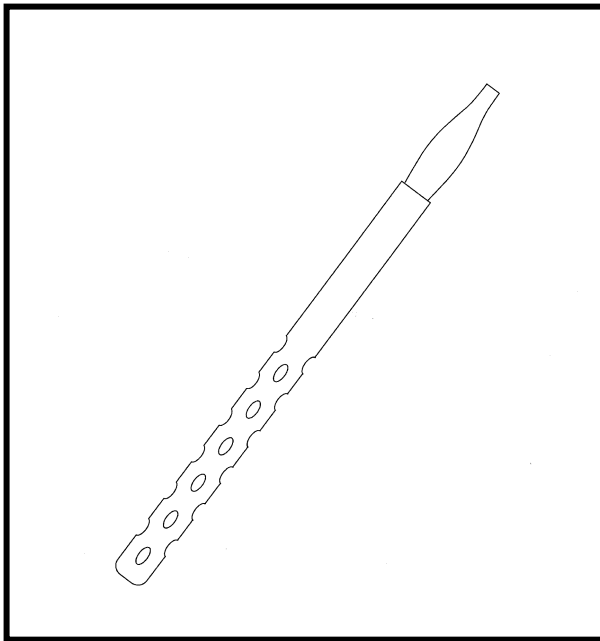

本品は二重管構造をしたサンプタイプの手術用吸引嘴管で、外管には24個の側孔が付いている。

<原材料>

チューブ:ポリ塩化ビニル  
(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))

#### 【使用目的又は効果】

身体の自然開口部、外科的切開口、又は創傷を介して、体液等の排出に用いる吸引嘴管。

#### 【使用方法等】

- 1.各種の器具類やチューブ類との径を合わせて、しっかり接続する。
- 2.吸引調節をサンプ孔(チップトロール)の開閉により行う。

#### 【使用上の注意】

##### 1.重要な基本的注意

- 接続部の漏れや外れに注意し、適宜増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと。[接続部は使用中に緩むことがあるため。]
- 使用中に本品に使用されているポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがある。

##### 2.不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置を行うこと。

##### 1)その他の不具合

機器の破損/変形、閉塞、接続外れ

##### 2)重大な有害事象

組織の損傷、感染等

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205