

ヤンカー サクション チューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

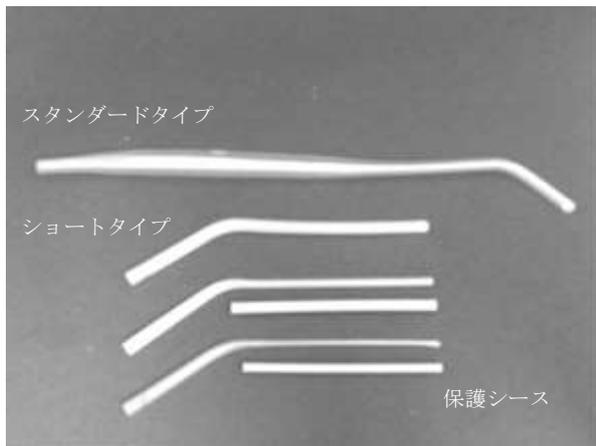

本品は、手術用の吸引嘴管で、スタンダードタイプ及びショートタイプがある。

同梱されている製品は、直接の包装に記載している。

<原材料>

チューブ:ポリ塩化ビニル

(可塑剤:フタル酸ジ2-エチルヘキシル)

【使用目的又は効果】

身体の自然開口部、外科的切開口、又は創傷を介して、液、組織片やフィブリン塊等の除去及び排気に用いる。

【使用方法等】

1. 吸引器や接続チューブの径を合わせて、しっかり接続する。
2. チューブ先端部を適用部位にあて、液等を先端開口又は側孔より吸引する。
3. チップコントロール付きのものは、チップコントロールの開閉により吸引調節を行う。
4. 保護シース付きのものは、保護シースを取り除いてから使用すること。〔保護シースが術野に落ち、遺残するおそれがあるため。〕

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 本品は可塑剤であるフタル酸ジ2-エチルヘキシルが溶出する可能性があるため、注意すること。

2.不具合・有害事象

本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

1)その他の不具合

機器の破損/変形、閉塞、接続外れ

2)重大な有害事象

組織の損傷、感染等

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター: 0120-917-205