

カンガルー PEG キット (誤接続防止アダプタ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>


1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

※【使用上の注意】

※1. 重要な基本的注意

- 本品はMR Safe であり、一般的なMR検査による影響はない。

【形状・構造及び原理等】

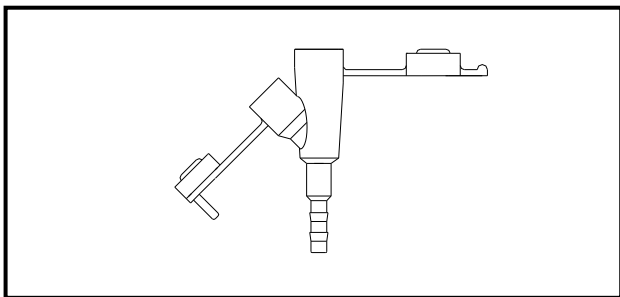

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205

【使用目的又は効果】

経皮的内視鏡下胃瘻造設及び腸瘻造設用。

本品は、経口栄養摂取が困難な患者に対して、経皮的に胃瘻を造設し経管栄養を行うためのチューブ他のキットである。また、カテーテル挿入時の汚染防止のため、カテーテルスリーブが付いている。なお、本品は滅菌済みであって、1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

なお、本品は留置されたカンガルー PEG キット(別売)のPEG チューブと接続して用いるアダプタである。

【使用方法等】

カンガルー PEG キットのPEGチューブに本品を接続して使用する。

〔注意〕誤接続防止アダプタのコネクタの嵌合部がPEGチューブに入りきるまで押し込むこと。〔接続部からの液漏れが発生する可能性があるため。〕

図1

