

デニスガイドワイヤ N

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

- 1.使用前にディスペンサ及びチューブ排液腔内に滅菌蒸留水又は生理食塩液を先端から流出するまで、注入すること。[水道水を使用した場合や注水が不完全な場合、ガイドワイヤの潤滑性が発揮できなくなり、挿入又は抜去が困難になるため。]
- 2.チューブ排液腔内には、10分に一度程度を目安に、滅菌蒸留水又は生理食塩液を追加注入すること。[生乾き状態で使用するとガイドワイヤの潤滑性が発揮できなくなり、挿入又は抜去が困難になるため。]

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止
- 3.ガイドワイヤにアルコール等の有機溶剤を接触させないこと。[有機溶剤に接触すると潤滑性が損なわれ、抵抗が高くなって挿入しづらくなるため。]
- 4.ガイドワイヤには滅菌蒸留水又は生理食塩液以外は使用しないこと。[ガイドワイヤの潤滑性が発揮できなくなり、挿入又は抜去が困難になるため。]

＜適用対象(患者)＞

- 1.本品は使用される素材(ウレタン樹脂)に対し、アレルギー体質又はかぶれやすい患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

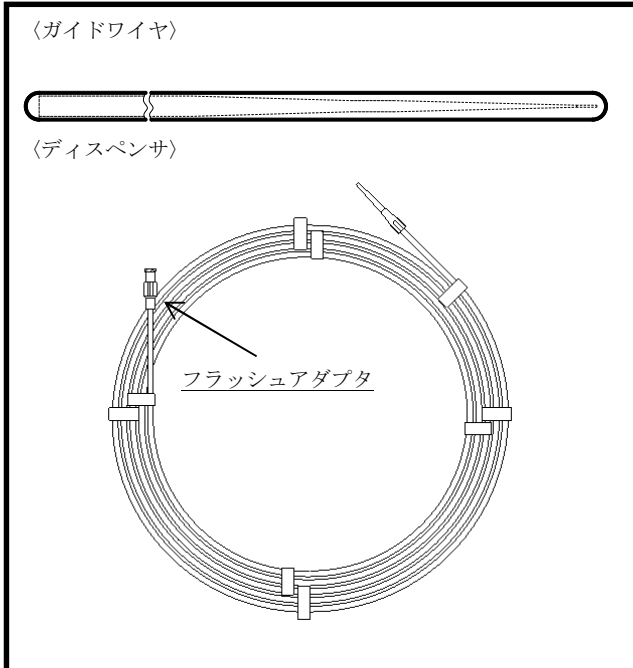

本品は、消化管等の管腔に留置するカテーテルやチューブ等の挿入補助として、位置調整及び移動の補助のために一時的に使用する(血管内に挿入して使用することは除く)ガイドワイヤであり含水すると親水性により潤滑性をもつ。

**なお、ガイドワイヤには挿入を容易にするための潤滑剤をコートしてある。同梱されている製品は、直接の包装に記載している。本品はスーパー デニス チューブ又はデニス チューブ(カーディナルヘルス株式会社/別売)と併用するものである。

(種類)

最大外径:mm (インチ)	長さ:cm
1.32(0.052)	350又は500

＜原材料＞

**ニッケル-チタン合金、ポリウレタン、メチルビニルエーテル無水マレイン酸共重合体、ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、消化管等の管腔に留置するカテーテルやチューブ等の挿入補助として、位置調整及び移動の補助のために一時的に使用する(血管内に挿入して使用することは除く)。

【使用方法等】

挿入方法

(1)ガイドワイヤのディスペンサ端のフラッシュアダプタにルアーシリンジを接続して、ディスペンサ内を滅菌蒸留水又は生理食塩液で十分満たす。

〔注意〕オリーブ油は使用しないこと。[ガイドワイヤの潤滑性が発揮しなくなるため。]

**〔2〕スーパー デニス チューブ又はデニス チューブの排液腔を滅菌蒸留水又は生理食塩液で満たし、ガイドワイヤをディスペンサから引き出して排液腔からチューブの先端まで挿入する。ガイドワイヤが滑って操作しづらいときは、滅菌蒸留水又は生理食塩液で十分湿らせた滅菌ガーゼ等でガイドワイヤをつかむと、操作し易くなる。

〔注意〕ガイドワイヤは破損防止のため、滅菌蒸留水又は生理食塩液を入れてからゆっくりとディスペンサから引き出すこと。[ディスペンサ内に滅菌蒸留水又は生理食塩液が十分満たされない場合には、潤滑性が十分発揮されず、ガイドワイヤの表面を被覆している樹脂が変形するおそれがあるため。]

〔注意〕ガイドワイヤの潤滑性を維持するために、ガイドワイヤ表面を常に濡れた状態にしておくこと。[ガーゼ等が乾いているとガイドワイヤの水分を吸い取ってしまい、潤滑性がなくなるおそれがある。]

〔注意〕ガイドワイヤ操作中に抵抗を感じたときは操作を中断し、滅菌蒸留水又は生理食塩液を追加注入し、潤滑性が回復したら、操作を再開すること。[抵抗を感じるのはガイドワイヤ表面が乾いて潤滑性が低下してきたと考えられるため。]

(3)スーパー デニス チューブ又はデニス チューブと共に挿入し、挿入ができたならガイドワイヤを引き抜く。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ガイドワイヤの挿入はエックス線透視下で行うこと。
- 本品挿入に際しては、気管への誤挿入に十分注意し、消化管に正しく挿入されていることを確認すること。
- ガイドワイヤの無理な挿入あるいは抜去により、消化管の出血、裂傷、穿孔等を生じる危険性があるので注意すること。[ガイドワイヤの離断又は破断のおそれがある。]
- 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。
- 本品を鉗子等で強くつかまないこと。

2.不具合・有害事象

本品の挿入操作中に、以下の不具合・有害事象がまれにあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

**その他の不具合

・ガイドワイヤの折れ、曲がり、損傷、破断、切断。

重大な有害事象

消化管穿孔、出血、アレルギー症状、ショック

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者:

*カーディオカルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205