

モノジェット 注射筒 60mL


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

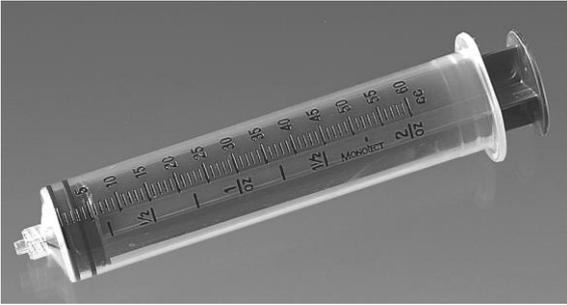

本品は、容量が 60mL で、先端の接続形状がルアーロックタイプである。

2. 原材料


外筒：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】


液体を注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。プラスチック製で、目盛付の容器及びプランジャから成る。注射針を用いて薬剤の投与又は採血に用いることが多い。

【使用方法等】


1. 開封方法：下図の A、B、C の 3 つの方法のうちのいずれかの方法を使用して開封する。
A：ふたを回転させる。
B：ヒートステークの上を直接親指で押す。
C：硬い表面でふたをたたく。

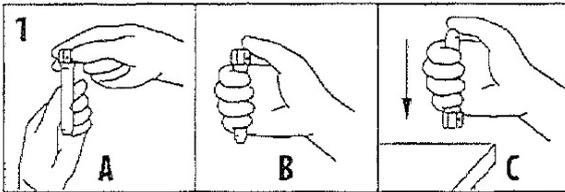

2. 注射針のケースをもち時計回りに回ししっかり注射筒に固定する。

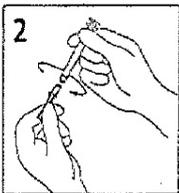

3. 滅菌野での使用。滅菌野で使用されるときは、ふたをはずして容器を傾け滅菌野に注射筒を落とす。

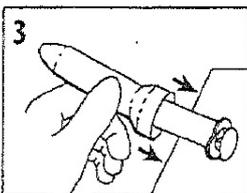

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
2. 有効期限
有効期間は自己認証(当社データ)による。
有効期間については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205