

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDNコード: 37434000
モノジェット サリバ エジェクター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

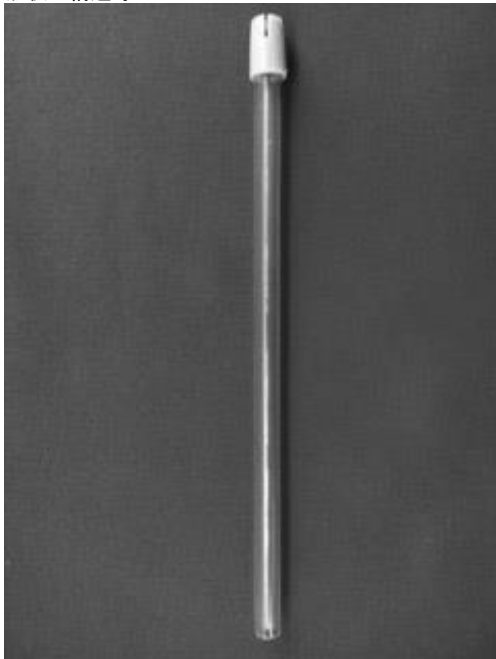

2. 原材料

チューブ：ポリ塩化ビニル

3. 仕様等

チューブとチップの接着部が8.8N(2[lbs.])の引張り強度に耐えること。

【使用目的又は効果】

非電動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

接続する器具類、チューブ類との径を合わせて、しっかり接続して吸引を行う。必要に応じて本品を適宜曲げて使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205