

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ JMDNコード: 16779000

## コネクティング チューブ・シュアグリップ タイプ (コネクティング チューブ・シュアグリップ)


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造等

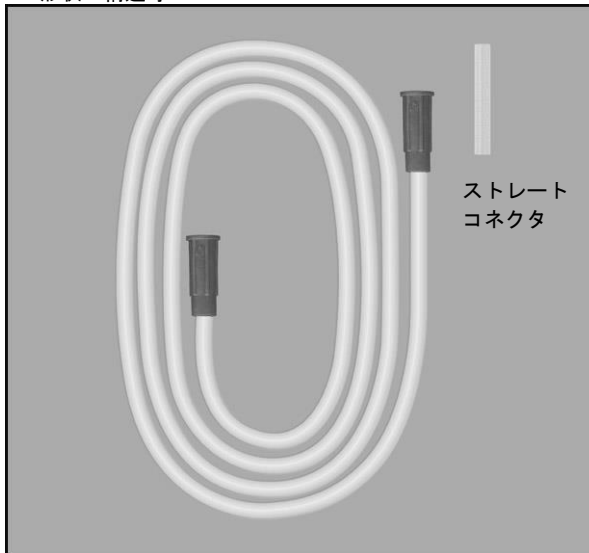

本品は接続用チューブで、内径が5mm、6mm及び7mmの3種類がある。又、チューブを延長させるため、ストレートコネクタが付いている。

#### 【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブ。

#### 【使用方法等】

1. 各種の器具類やチューブ類との径を合わせて、しっかり接続する。
2. シュアグリップタイプのチューブを追加接続する際は、付属品のストレートコネクタを利用する。

#### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - (1) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
  - (2) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
  - (3) 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間  
有効期間は自己認証(当社データ)による。  
有効期間については外装表示参照。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社  
カスタマーサポートセンター：0120-917-205