

医療用品(4) 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード: 34864000  
**テルファ サージカル パッド**

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造等  
コットン製パッドを非固着性の薄いフィルムで包んである。皮膚に貼り付けるための粘着剤はない。
2. 原材料  
プラスチックフィルム : ポリエステル  
不織布パッド : 綿布
3. 仕様等  
吸水性 : 自重の9倍以上のこと。

**【使用目的又は効果】**

身体の部位に用いる、プラスチック製の各種形状の絆創膏材である。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

**【使用方法等】**

1. 非固着性フィルム面を傷口の上に当てる。
2. 粘着包帯等で本品を傷口の上に固定する。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意
  - (1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
  - (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
  - (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法  
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
2. 有効期間  
有効期間は自己認証(当社データ)による。  
有効期間については外装表示参照。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*製造販売業者 : カーディナルヘルス株式会社  
カスタマーサポートセンター : 0120-917-205