

機械器具(48) 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 JMDNコード: 13929001
モノジェクト カテーテル チップ シリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

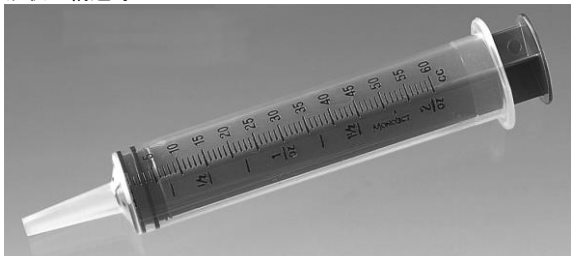

本品は、容量が60mLのカテーテルチップシリンジである。

2. 原材料

外筒：ポリプロピレン

3. 仕様等

デッドスペース：ISO7886-1に適合する。

【使用目的又は効果】

液体を注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。プラスチック製で、目盛付の容器及びプランジャから成る。


【使用方法等】

1. 開封方法：下図のA、B、Cの3つの方法のうちのいずれかの方法を使用して開封する。


A：ふたを回転させる。

B：ヒートステークの上を直接親指で押す。

C：硬い表面でふたをたたく。

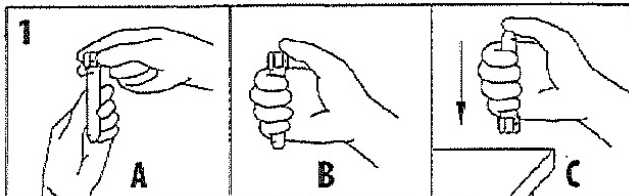

2. 滅菌野での使用。滅菌野で使用されるときは、ふたをはずし容器を傾け滅菌野に注射筒を落とす。

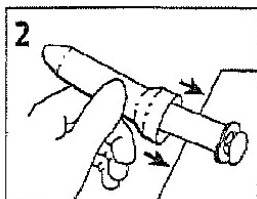

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

有効期間は自己認証(当社データ)による。

有効期間については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205