

カンガルー オブチュレーター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

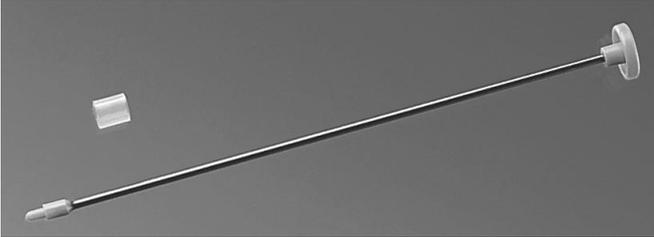

本品は留置された胃瘻チューブ(カンガルーPEGチューブ等(別売))の交換を行うため、チューブに挿入して使用するもので、5.3mm(16Fr)用及び6.7mm(20Fr)用がある。

2. 原材料

オブチュレーター：ステンレス鋼

3. 仕様等

先端部とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけたとき抜けない。
把持部(ノブ)とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけたとき抜けない。

【使用目的又は効果】

瘻孔に留置した器具を抜去又は挿入する際に、器具を保持するために補助的に使用する。

【使用方法等】

瘻孔チューブの内部管腔にオブチュレーターを入れて挿入および除去を行う。

1. オブチュレーターを挿入し体内保持具を細長くする(伸長する)。
2. 保持具の径を小さくし、瘻孔チューブを抜去・挿入する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205