

機械器具(21) 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 新生児心電図用電極 JMDNコード:17460000  
**ケンドール電極 キティーキャット**

**再使用禁止**

**【警告】**


1. 電気メス等を使用する外科手術での使用には注意すること [対極板に問題があると電極部で火傷を起こすことがあるため]。
2. 本品は単回使用製品である [洗浄又は滅菌を行っても再使用時の安全性を確保できない。又、本品を洗浄又は滅菌した場合は、患者に対して生物学的不適合(bio-incompatibility)、感染及び製品破損のリスクが生じる可能性があるため]。

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止。
- \*\*2. 本品は MR Unsafe であり、MR 検査は禁忌とする。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造等

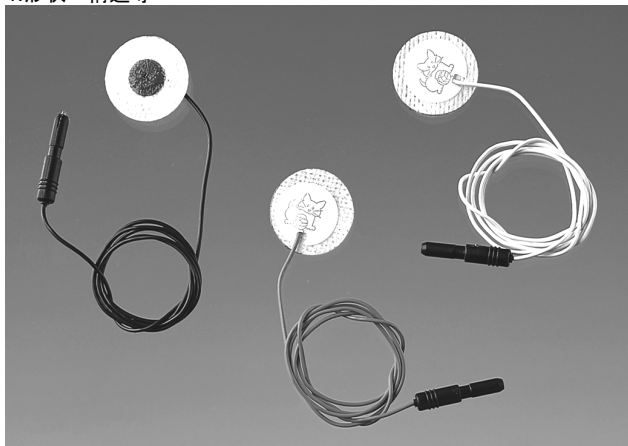

[未滅菌]

2. 仕様等

接触抵抗 $\leq 2000\Omega$  (AAMIによる)

\*\*3. 原材料

ビニール、ハイドロゲル、ポリエステル、銀、塩化銀、カーボン、  
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、ポリ塩化ビニル、  
ポリエチレン、シリコンコート

**【使用目的又は効果】**

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する新生児患者専用の導体である。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計(ECG)である。

**【使用方法等】**

1. 電極を準備する。
2. ライナーを電極から剥がす。
3. 電極全体を指でしっかりと押し、適用部位に貼り付ける。
4. 心機能モニタリングを行なう。
5. 取外す際は、リード線を引っ張らず、粘着シール部を体表面からはがす。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (2) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- (3) 開封後はしっかり袋を閉じて高温を避けて保管すること [開封後、長時間放置するとジェルが乾いたり、変色することがあるため。又、粘着面が乾き、ライナーから電極をはがしにくくなるため]。
- (4) 火傷部位への使用は避けること。
- (5) ECG モニタリングを用いる電気外科的処置を行う際には、病院が定める手順に従うこと [これを守らない場合、電極適用部位で高周波による火傷が発生するおそれがあるため]。

2. その他の注意

- (1) 長時間貼付すると、かぶれる可能性があるので注意すること。
- (2) 乳首、皮膚のひだ、骨の隆起した部分、切り傷、損傷部位、瘢痕、炎症のある部位には適用しないこと。

**\*\*相互作用**

**「併用禁忌 (併用しないこと)」**  
●磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社  
カスタマーサポートセンター：0120-917-205