

カンガルー コンテナー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本品は「カンガルー ポンプ セット」(医療機器認証番号: 225AABZX00108000)及び「カンガルー フィーディング コンテナー」(医療機器承認番号: 20300BZY01059000)(共に以下「ポンプセット」という)専用の経腸栄養注入用コンテナーである。専用のポンプセット以外は使用しないこと[スクリー部が接続できないため]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等



本品には、1,200mL用と600mL用がある(図は600mL用)。
同梱されている製品は、直接の包装に記載している。

【使用目的又は効果】

本品は、胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具である。

【使用方法等】

注意：本品はポンプセット専用の経腸栄養注入用コンテナーである。

1. 本品に専用のポンプセットを接続する。
2. ポンプセットのローラーランプを閉じる。
3. 本品に必要な量の栄養剤を充填する。
4. ポンプセットを「カンガルー フィーディング ポンプ 2100型」あるいは「カンガルー コントロール フィーディング ポンプ 624型」(共に別売)等に装着後、経腸栄養カテーテルに接続し、栄養投与を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 包装の開封後は、速やかに使用すること。
- (2) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師に相談すること。
- (3) 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205