

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 汎用吸引用カテーテル(吸引チューブ) JMDNコード: 34923102  
**ユニバーサル プール サクション チューブ**


**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造等

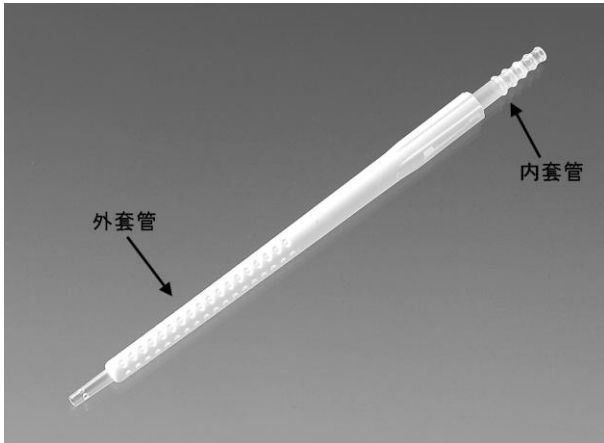

本品は多用途の吸引嘴管である。

2. 原材料

チューブ：ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

1. 外科吸引用。
2. 本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

**【使用方法等】**

1. 各種の器具類やチューブ類との径を合わせて、しっかり接続する。
2. 小さな術野の吸引を行う際は、外套管を外して細い内套管で吸引する。
3. 外套管を取り付けて使用するときには、手元で内套の位置を変えることができる。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、滅菌済み単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- (4) 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

有効期間は自己認証(当社データ)による。  
有効期間については外装表示参照。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*製造販売業者：

\*\*カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-917-205

\*外国製造業者名：Cardinal Health(カーディナルヘルス)

\*国名：アメリカ合衆国