

Monoject 注射筒


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性があるため。]

【形状・構造及び原理等】

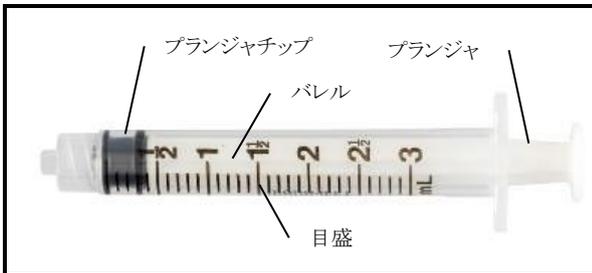

本品は、バレル、プランジャ、プランジャチップから構成される。
なお、公称容量は、3mLである。

<原材料>

バレル:ポリプロピレン
プランジャチップ:スチレンブタジエンゴム、又はイソpreneゴム

【使用目的又は効果】

目盛付のバレル及びプランジャから成り、注射針等を用いて生理食塩液や薬剤の投与や採血、液体又はガスを注射・注入又は引き抜くために使用する。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出し、プランジャを先端まで押し込み、外筒の空気を完全に追い出す。
2. 注射又は採血に使用する場合は、注射針等と確実に接続し、緩みがないことを確認してから使用する。
3. 薬液の注入などに使用する場合は、先端をカテーテル等に接続し、薬液を注入する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- プランジャチップを注射針等で傷をつけない様に注意すること。[破損が生じ、液漏れ、空気の混入につながる可能性があるため。]
- 薬液等を吸引する際は、バレルの印刷部の目盛を越えてプランジャを引かないこと。[プランジャがバレルから抜けて液漏れが生じる可能性があるため。]
- プランジャはまっすぐに引くこと。[斜めに引くと、プランジャチップとバレルの密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入又はプランジャチップが外れる可能性があるため。]

- 接液部を汚染させないこと。
- バレルの目盛印刷部分をこすらないこと。また、目盛印刷部分に医薬品などが付着しないように注意すること。[目盛が消える可能性があるため。]
- プランジャを繰り返し前後させる等の操作を行う際は、プランジャを汚染させないよう、十分注意して取り扱うこと。[バレル内が汚染する可能性があるため。]
- 造影等の高圧注入は行わないこと。[液漏れ又は破損する可能性があるため。]
- 医薬品の種類によっては、本品の外筒の内側に添付されているシリコン油が析出することがあるので注意すること。シリコン油が析出した場合は、適切な処置をとること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者:

※※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205

※外国製造業者名:Cardinal Health(カーディナルヘルス)

※国名:アメリカ合衆国