

## エスティーム ニトリルグローブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は未滅菌の非天然ゴム製手袋である。

分類は以下の通りである。

種類	2種(主にニトリルゴムから製造)
表面仕上げ	T(粗面)
パウダ	なし

##### 2. 原理

病原微生物の移動をゴム膜で阻止することで細菌感染を予防及び化学療法薬剤から保護する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。歯科用手袋を除く。

#### 【使用方法等】

1. 取出口 から手袋を1枚取り出す。
2. 手首部分にあたるカフ上端表面のみに触れ、着用する。
3. 2枚目の手袋を取り出し、2.にならない着用する。
4. 手袋を着用した手で前腕の皮膚に触れないように、折りたたまれたカフを開き手首まで着用する。
5. 片方の手袋を手首の高さでつまんで、前腕皮膚に触れずに取り外し、手袋を裏返しにする。
6. 手袋を着用している手で取り外した手袋を持ち、手袋を取り外した手の指を着用側の手袋と手首の間に差込み裏返ししながら取り外し、先に取り外した手袋に折り込む。
7. 取り外した手袋を廃棄する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 適切なサイズの手袋を選択すること。
- 同一の患者のみに使用すること。
- 穴、破損、損傷等異常が認められた場合は使用を中止し、新しいものに交換すること。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 化学療法薬剤の浸透に対する抵抗性試験結果を確認し、その範囲内で使用すること。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。
- 使用後廃棄する場合は、院内の手順に従い適切に対処すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- 涼しく乾燥した状態で保管すること。
- 直射日光、熱、石油製品は避けて保管すること。
- 10° C から 40° C の室温にて保管すること。

##### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装上に記載[自己認証(当社データ)による]。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売業者:カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205

外国製造業者:GX Corporation Sdn Bhd(Specialty Plant)

国名:マレーシア