

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット JMDNコード 70371000  
(輸液ポンプ用輸液セット(35833000)、輸液ポンプ用延長チューブ(12170052)、  
自然落下式針なし輸液セット(70370000)、輸液用延長チューブ(12170001))

## セイフアクセス 輸液セット (付属品:輸液キャップ)


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

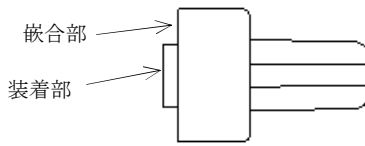

<原材料>ポリエチレン

#### 【使用目的又は効果】

患者又は受液者の輸液部位に、注射筒を使用しないで、多量の注射用医薬品を注入する目的で使用される輸液セットである。  
おす嵌合部等に嵌めて、おす嵌合部等が直接外部に触れることを防止する。

#### 【使用方法等】

- 1.包装から本品を取り出す。
- 2.本品の装着部をおす嵌合部に装着する。

#### 【使用上の注意】

##### 1.重要な基本的注意

- 本品の嵌合部に薬剤が触れないように注意すること[本品の嵌合部でセイフCカニューラの爪が折れたりする恐れがあるため。]
- 本品はMR Safe であり、一般的なMR検査による影響はない「自己認証による」。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205