

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 カテーテル用クランプ JMDコード 16449000

スライド クランプ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

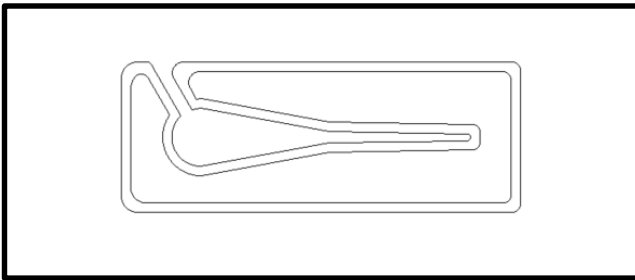

本品は、カテーテル※1の枝管部に取り付けられているクランプが破損あるいは紛失した際に交換用として取り付ける。または、新たにカテーテルの枝管部に取り付けて使用する樹脂製の器具で、カテーテルの流路を閉鎖する目的で使用するクランプである。

なお、本品は未滅菌品である。

※1【使用方法等】欄の、併用して／組み合わせて使用する医療機器を参照。

<原材料>

ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

本品はカテーテルの枝管を圧迫し、流路を閉鎖するために使用する。

血管内留置用カテーテルに付属していたクランプの交換品として、あるいは新たに追加することにより、その箇所においてカテーテルの枝管を圧迫して閉鎖するために用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品を血管内留置用カテーテルの枝管部に装着する。
- (2) 本品に枝管を挟んで薬液などの流路を遮断する。

併用して／組み合わせて使用する医療機器

- 1) SMAC プラス※2
(承認番号:21900BZX00953000)
- 2) CV カテーテル セルジンガー キット
(承認番号:20200BZZ00124000)
- 3) CV カテーテル キット
(承認番号:20200BZZ00123000)
- 4) PICC キット※2
(承認番号:21900BZX00862000)
- 5) PICC キット II※2
(承認番号:22700BZX00109000)

※2 耐圧タイプの高圧注入するルーメンは対象外

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- カテーテルの枝管以外の圧迫に使用しないこと。
- 本品の取り付け時に、枝管が破損していないことを確認すること。
- 本品を使用する時は、流路が確実に遮断されたことを確認すること。
- 使用中は本品の破損や緩み等がないことを、定期的に観察すること。
- 本品と有機溶剤との接触は避けること。本品が破損した場合は直ちに破棄し、新しい製品と交換すること。
- 本品は、高圧注入するルーメンの枝管には使用しないこと。
- 本品はMR Safe であり、一般的なMR検査による影響はない。「自己認証による」

2.不具合・有害事象

その他の不具合事象

本品の破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205