


使用説明書

スぺシメン コレクション コンテナ

注意

- 本品は滅菌済み再使用禁止製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 包装に使用期限を記載している。使用期限を過ぎたものは、使用しないこと。
- 接続箇所のコネクタをアルコール含有薬剤で消毒しないこと。[コネクタにひび割れ等が生じるおそれがあるため。]
- 吸引採取容器はポリスチレン製である。検体をアルコールで抽出するときは、ポリプロピレン製の容器を使用すること。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 吸引採取容器を遠心操作するときは、遠心加速度 1800G 以下とする事。
- 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。
- 使用中に本品に使用されているポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがある。

使用方法

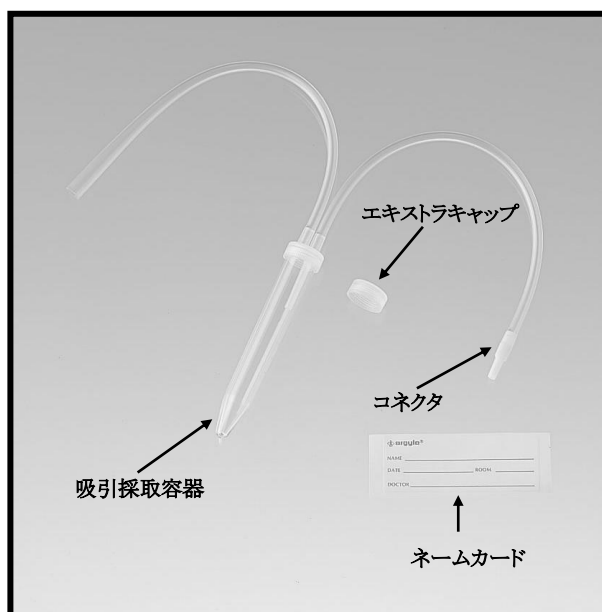

1. 吸引側チューブを気管支ファイバースコープの吸引口に接続する。なお、接続端はファイバースコープの種類によりオリンパス式又はマチダ式より選択する。
2. もう一方のチューブをポンプ（バキューム）側に接続する。
3. ポンプ（バキューム）が働くと気管内の分泌物が吸引採取容器に吸い込まれる。その際分泌物がポンプ（バキューム）側に吸い込まれないよう吸引採取容器を垂直に保つ。
4. 採取後、チューブ付きキャップをはずし、エキストラキャップで閉じる。
5. ネームカードに患者の名前を記入し、遠沈管に貼る。

販売元

カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-917-205