



MET光ガイドカテーテルシステム簡易マニュアル

詳細は取扱説明書をご参照ください

1. 電池のセット

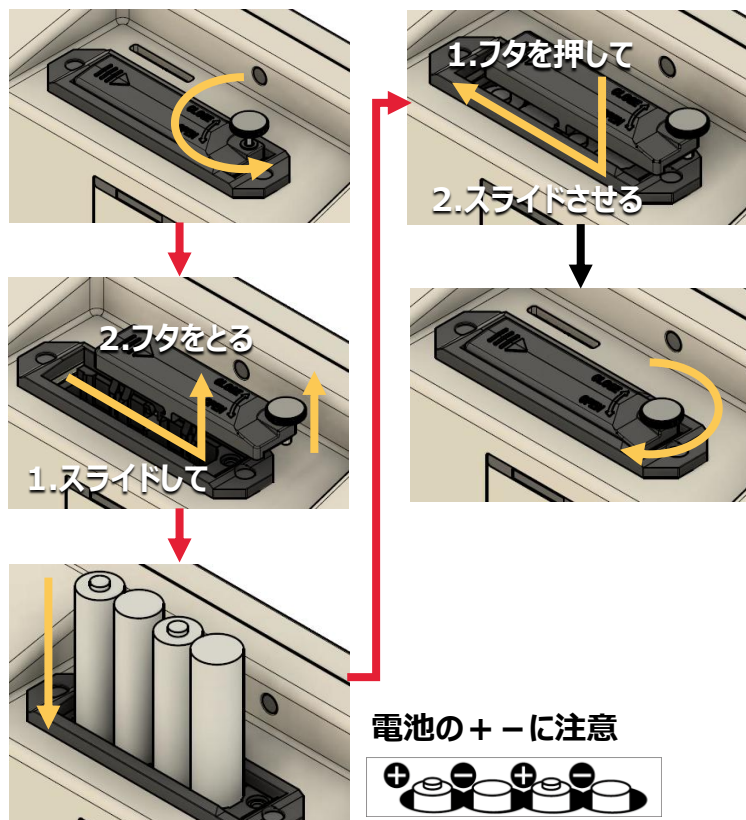

2. 光スタイレットの接続

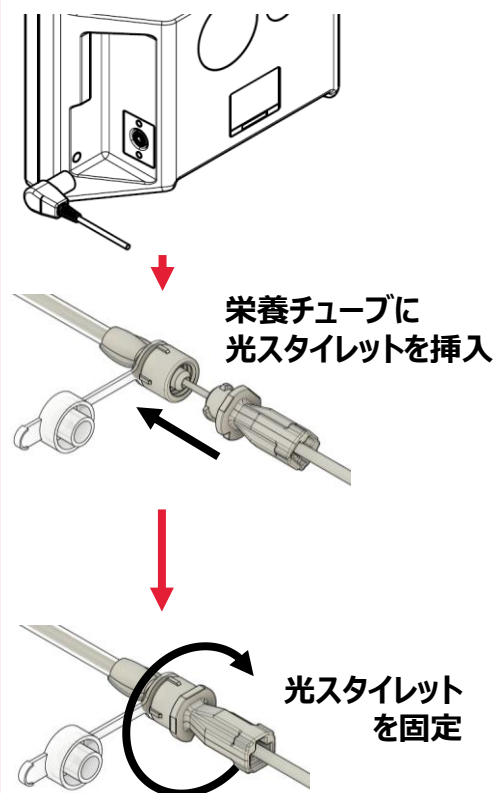

3. 点灯



電源ボタンを押す (ON)



点灯ボタンを押す (ON)



必要に応じ、撮影ボタン
を押し、静止画を生成

4. 消灯・抜去



点灯ボタンを押す (OFF)



電源ボタンを押す (OFF)



アルコールで清掃し、乾燥させ保管

画面表示のアイコン

アイコン	意味	対応
	光スタイレットが未接続	光スタイレットを本体に接続する
	外乱光が強いため、点灯できない	太陽光が入りにくい場所に移動するか、遮光カーテンを引く
	電池残量が無い	電源をOFFにし、新しい電池に交換する
	SDカードが未挿入	SDカードを本体に挿入する
	SDカードの残量が無い	SDカードからデータをPCに移し、容量を確保する
	SDカードが書き込み禁止になっている	SDカードを取り出し、ロックを解除する



点灯・録画表示
時刻は録画時間




点灯中の重要なエラーメッセージ


画面表示

意味

対応

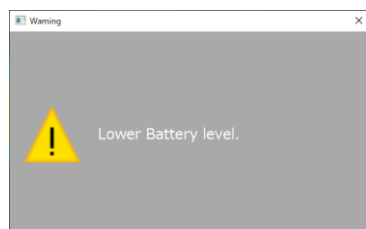

Lower Battery level
電池残量が無い

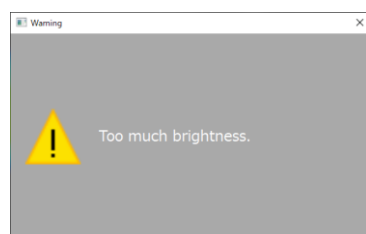

Too much brightness
外乱光が強い

- ❑ 直ちに測定を中止し、電池を交換してください。
- ❑ このエラーメッセージが表示された場合、最後の30秒間の録画がSDカードに書き込まれていない可能性があります。
- ❑ 電池を交換後、再度確認を行ってください。
- ❑ 点灯中に太陽光が強く、点灯・撮影・録画ができない状態です。
- ❑ 太陽光が入りにくい場所に移動するか、遮光カーテンを引いてください。
- ❑ このエラーメッセージが表示された場合、前後の30秒間の録画がSDカードに書き込まれていない可能性があります。再度確認を行ってください。

その他のエラーメッセージの詳細と対応は取扱説明書をご確認ください。

製品規格
 一般的名称：経腸栄養チューブ挿入追跡装置
 販売名：MET 光ガイドカテーテルシステム
 医療機器承認番号：30500BZX00063000
 クラス分類：Ⅱ 管理医療機器
 製造販売元：日本アッシュ株式会社
 製造元：株式会社スタンレー宮城製作所
 販売元：カーディナルヘルス株式会社



製品情報サイトは
こちら

お問い合わせ先
 カーディナルヘルス株式会社
 Tel：0120-917-205