



# Kangaroo™ 胃壁固定具 S <手技手順>

## 1 準備

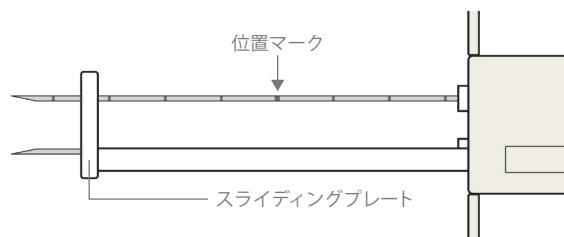


① スライディングプレートを針先端から1個目と2個目の位置マークの間にセットします(針先端から1~2cmの間)。

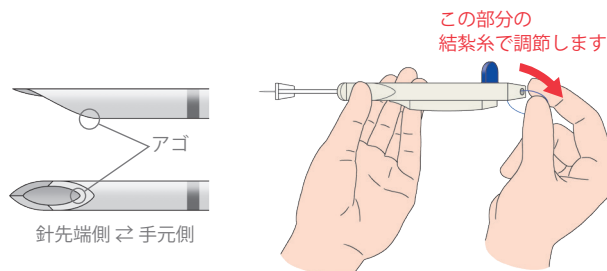

② 結紮糸導入針の先端から出ている結紮糸を結紮糸導入針の針先端部分(アゴ部分)に合わせます。


## 2 穿刺

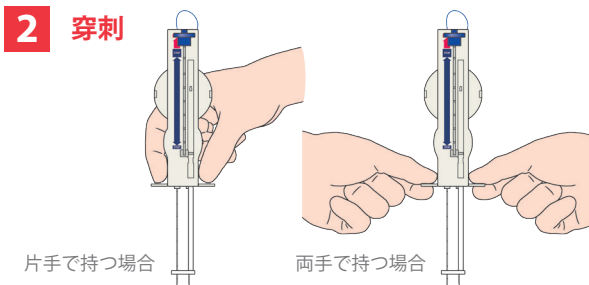

本体を上図のように持ち、あらかじめマーキングされた部位に、両方の導入針を垂直に穿刺します。


## 3 レバー操作

① レバーを下げるとループが出て糸が入る

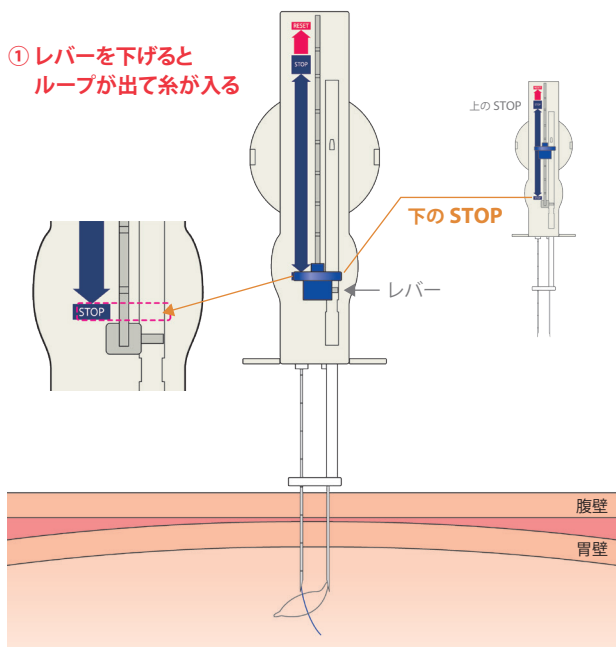


レバーを下下のSTOP(図のSTOP)の位置まで下げると、結紮糸導入針の直下にループが開き、結紮糸がループに入ります。

② レバーを上げるとループが閉じる

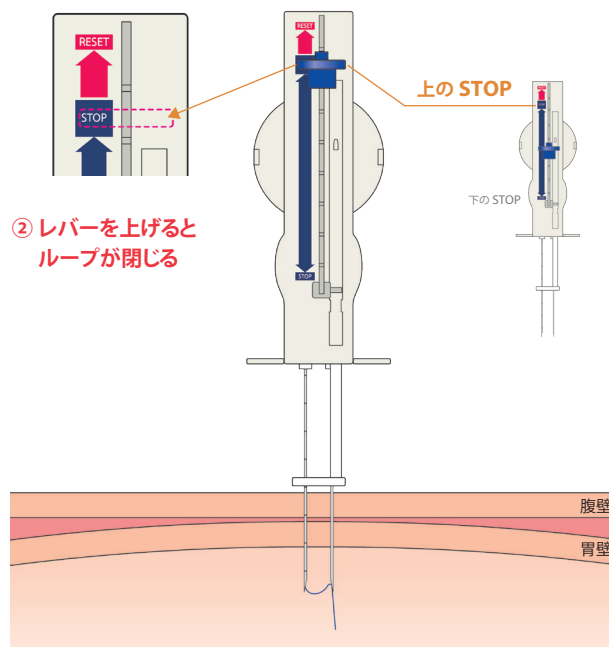

結紮糸が確実にループに入ったことを内視鏡で確認した後、レバーを上上のSTOP(図のSTOP)の位置まで戻していくと、ループが閉じ、結紮糸はループで把持された状態になります。

ここでレバーを固定

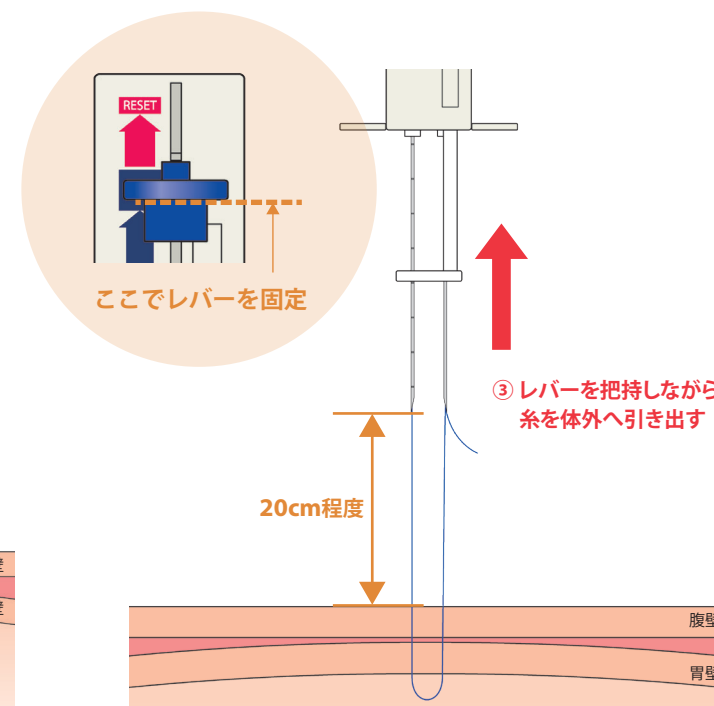

③ レバーを把持しながら糸を体外へ引き出す


上のSTOPの位置でレバーを把持し、ループが結紮糸を確実に把持していることを確認しながら、胃壁導入針を静かに体外へ抜き、結紮糸を体外へ誘導します。

## 3 レバー操作での注意点


糸を体外へ引き出す際は、  
必ず、レバーを手で固定して行ってください!

レバーの固定をせずに糸を体外へ引き出してしまると糸がループから外れてしまいます。

レバーを過度に上げると、糸やループが切れてしまいます。

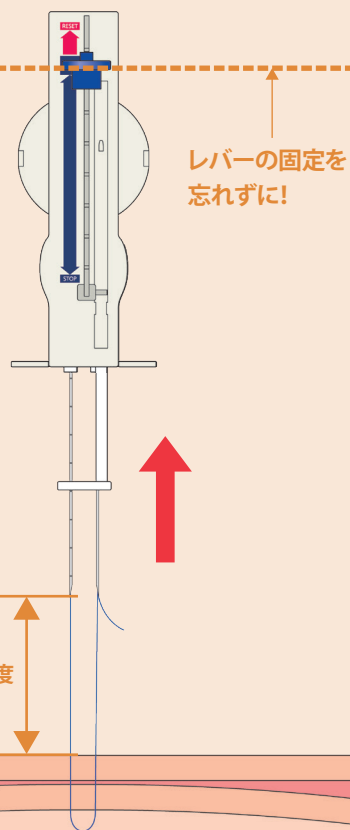


## 4 糸をカットし、結ぶ

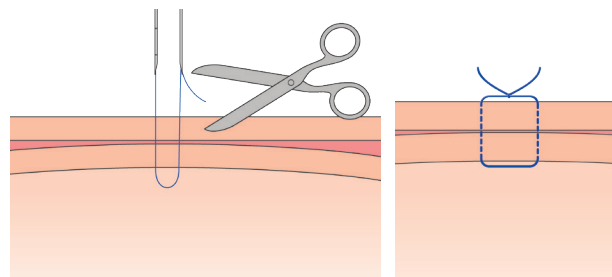


2本の結紮糸を同時にカットし、体外に出ている結紮糸を結紮します。

## 6 2回目以降の穿孔

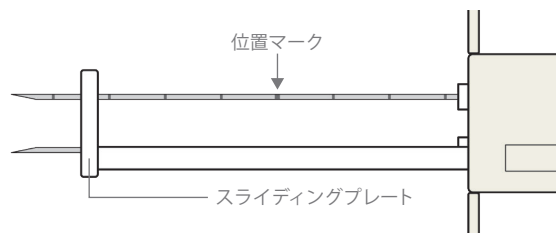


① 準備の操作と同様に、スライディングプレートを針先端から1個目と2個目の位置マークの間にセットします(針先端から1~2cmの間)。

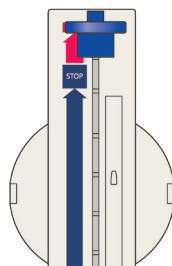


③ レバーをRESET位置に戻してから穿孔を開始します。

## 5 ループから糸を外す

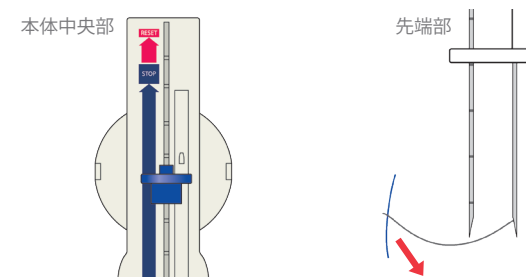

レバーを本体中央部まで下げ、ループを完全に開いた状態にし、ループから結紮糸を外します。

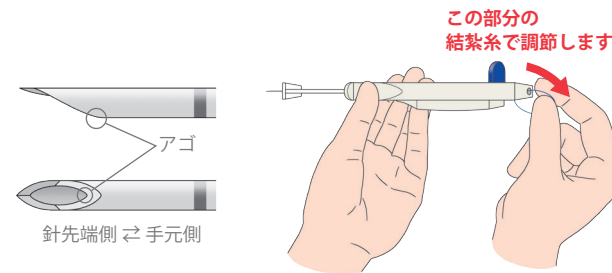

② 準備の操作と同様に、結紮系導入針の先端から出ている結紮糸を結紮系導入針の針先端部分(アゴ部分)に合わせます。

一般的名称 : スーチャーアンカ  
販売名 : 胃壁固定具 S  
医療機器認証番号 : 226AABZX00027000  
クラス分類 : II 管理医療機器

お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel : 0120-917-205