



ALWAYS BY YOUR SIDE

Kangaroo™ カンガルー Connect™ ポンプ

CardinalHealth™  
Kangaroo 

# 病院でも在宅でもずっと側で 栄養投与をサポートします



## Accuracy

### より正確な投与

重症患者や小児にも安心して使えるよう投与精度を向上させました。

Pump	Connect ポンプ	Joey ポンプ	e ポンプ
精度	±5%	±7%	±10%

## Compact

### 本体重量わずか0.3kgの最軽量

カンガルーシリーズの中でも最も小さく軽い、薄型化を実現したコンパクトサイズです。

Pump	Connect ポンプ	Joey ポンプ	e ポンプ
重さ	0.33kg	0.77kg	1.1kg
サイズ	高さ 9.9cm 幅 15.4cm 奥行 4cm	高さ 10.4cm 幅 13cm 奥行 9.1cm	高さ 16cm 幅 16cm 奥行 11cm

## Battery

### 安心の24時間バッテリー駆動

24時間バッテリー駆動が可能のため、移動時も外出時も安心してご使用いただけます。また、車載充電器(別売り)を使用にて車での充電も可能なため、移動や非常時にご使用いただけます。



Pump	Connect ポンプ	Joey ポンプ	e ポンプ
時間	24時間	18時間	15時間
電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	ニッケル水素電池


## Display

### カラー表示で抜群の操作性

日本語対応の見やすく大型なディスプレイとわかりやすいカラー表示で操作がよりしやすくなりました。




● 青色：設定画面

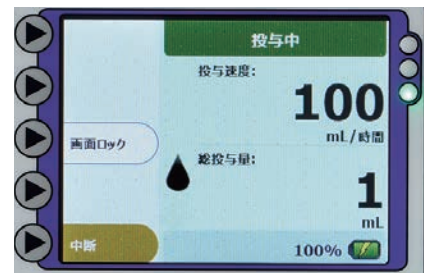

● 緑色：投与画面



● 黄色：アラーム画面(注意)

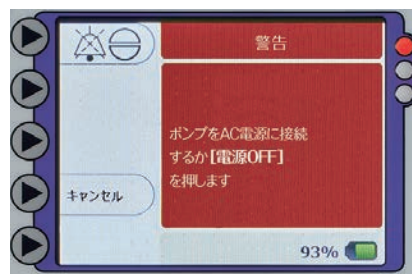

● 赤色：アラーム画面(警告)



LED照明

## Easy

### 取り扱いが簡単なカセット式

カセット式投与セットで、簡単にはめることが可能です。アニメーションで装着方法をガイドしますので安心です。



カセット



装着方法画面

### 簡単なお手入れ

ポンプ本体はIP26※に設定しています。流水でのお手入れが可能です(水に浸すことは出来ません)。



#### <お手入れ方法>

洗浄液で湿らせた柔らかいワイプでポンプをきれいに拭き、見える汚れをすべて取り除きます。手の届きにくい隙間の汚物はブラシを使用して取り除きます。

※ 水の有害な侵入に対する保護の程度による分類 IEC 規格 60529: IP26: あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)



## カンガルー Connect™ ポンプ

カタログ番号	製品名	包装
384400	カンガルー Connect ポンプ	1
384491	電源コード	1
384492	ポールクランプ	1
770037M	バックパック M ブラック	1
384494	車載充電器	1

## カンガルー Connect™ ポンプセット

カタログ番号	製品名	包装
77500FD-JP	500mL フィードセット	30セット/箱
77100FD-JP	1,000mL フィードセット	30セット/箱
77000FD-JP	RTHアダプタセット	30セット/箱



77500FD-JP



77100FD-JP



77000FD-JP

## 仕様

ポンプメカニズム	ローラーゼン動式
投与速度設定範囲	1 ~ 600mL/時 (1mL きざみで設定可能)
投与予定量設定範囲	1 ~ 3,000mL (1mL きざみで設定可能)
ポラス投与量	1 ~ 3,000mL (1mL きざみで設定可能)
ポラス回数	1 ~ 99回
ポラス間隔	1 ~ 24時間 (1時間 きざみで設定可)
精度	±5%または0.5mL/時 (いずれか大きい方) ※ 開始時の栄養剤の水面がポンプ上端より25.4cm±0.76cm高い位置 ※ 室温22℃±2℃実行
閉塞圧	最大閉塞圧: 20psi (138kPa)
寸法	15.4 (幅) × 4 (奥行) × 9.9 (高さ) (cm)
重量	0.33kg (ポールクランプ付属時 0.635kg)
材質	ソフトタッチコーティング: ラテックスフリー熱可塑性ウレタン ポンプ筐体: 難燃性ポリエステル/ポリカーボネート混合
電源	ACアダプタを使用
バッテリー	リチウムイオン電池 作動時間: 約24時間 (流量125mL/時、新品、節電モード使用時) 充電時間: 7時間
アラーム	【アラーム】 ・システムエラー ・バッグが空です ・バッグ側チューブ閉塞 ・患者側チューブ閉塞 ・カセット未装置 ・カセットエラー ・ローターエラー ・バッテリー切れ 【通知】 ・投与完了 ・投与未完了 ・バッテリー量低下 ・中断状態エラー
ブザー音量	優先度が高いアラームの音量 ・1m離れたところで61dBA以上 優先度が標準のアラームの音量 ・1m離れたところで60dBA以上
使用温度	5~40℃ 相対湿度15~93% (ただし、結露しない事)
電撃に対する保護の形式	クラスII、内部電源機器
電撃に対する保護の程度による分類	BF形装着部
水の有害な浸入に対する保護の程度による分類	ポンプ: 防噴流 (IP26) IEC 60529に準拠 AC電源アダプター: 水の浸入に対する保護なし (IPX0) 車載充電器: 防滴 (IP22) IEC 60529準拠

## 製品規格

一般的名称 : 経腸栄養用輸液ポンプ  
 販売名 : カンガルー Connect ポンプ  
 医療機器承認番号 : 30200BZX00245000  
 クラス分類 : III 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器



お問い合わせ先  
 カーディナルヘルス株式会社  
 Tel: 0120-917-205  
[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)