



高リスク医薬品の 漏れや飛散を軽減

Safe Access™ クローズド C

輸液管理システム

セイフティロック機能付コネクタ

高リスク医薬品用の輸液セットでの 使用に特化したカニューーラです。

プライミングキャップ

セイフAプラグ™にエアフィルタ付きのキャップが付いたプライミング用アダプタです。キャップ部分のフィルタは疎水性フィルタになっており、先端が薬液で満たされるまでエアのみ通過します。薬液充填後は、プライミングが自動的にストップする仕組みになっています。



内部陰圧構造


セイフCカニューーラからプライミングキャップを外す際には、カニューーラ内部が陰圧になる仕組みになっています。この仕組みにより、カニューーラ先端部のごく微量の薬液をカニューーラ内部に引き込み、薬液の漏れや飛散を軽減します。



特殊ルアーロック機構

メスルアーは一度接続すると外れにくい機構を持ち、接続部の外れのリスクを低減します。抗がん剤などの高リスク医薬品使用時に大きな安心感が得られます。

使用方法

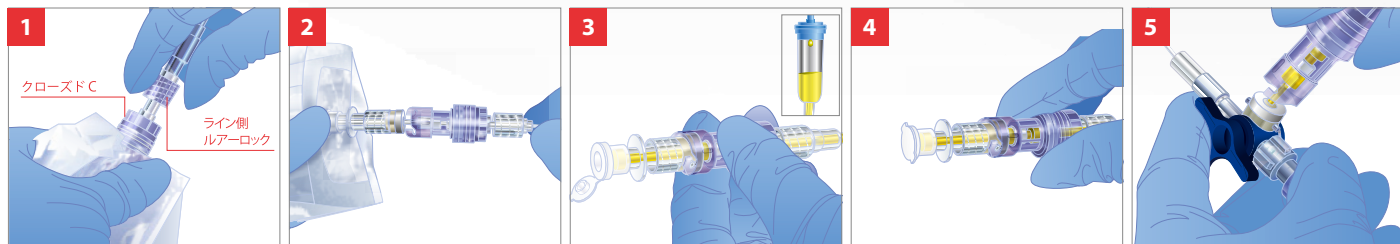

1 クローズドCをライン先端に装着します。この時点ではキャップのふたはOPENのままです。

2 プライミングキャップとクローズドCを接続します。

3 一般的なライン同様、ローラックランプを開放し、プライミングを行いません。キャップ先端まで薬液で満たれると、自動的にプライミングは終了します。

4 プライミング後は、ローラックランプを閉じ、直ぐにキャップのふたを閉じます。

5 プライミングキャップは薬液投与までは外さず、投与時に初めて外します。(本体接続後、プライミングキャップは廃棄します。)

品名	カタログ番号	形状	プライミングボリューム (mL)	包装単位
クローズドC	1880-FCC		本体0.10 プライミングキャップ0.15 合計0.25	20個/1箱

包装: 1個毎滅菌済 再使用禁止

製品規格

一般的名称: 輸液用アクセサリセット
販売名: クローズドC
医療機器届出番号: 09B1X00004000143
クラス分類: I
一般医療機器製造販売元: フォルテグロウメディカル株式会社

カーディナルヘルス株式会社

お問い合わせ
0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

