


Kangaroo™ カンガルー™ バンパー G-チューブ



ガイドワイヤと伸展ロックで安心な胃瘻交換

抜去手技


使用手順

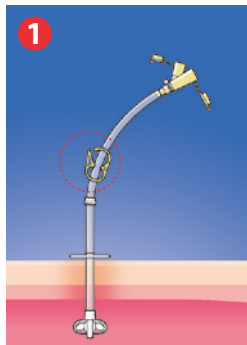

1 チューブの切断箇所を確認し、切断します。

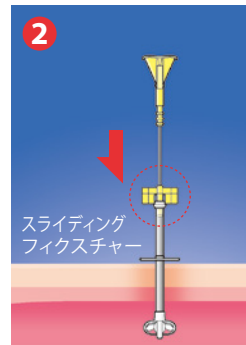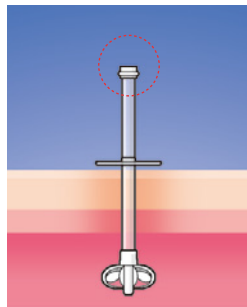



2 チューブ内腔に抜去用エクステンダーをゆっくり挿入し、写真の位置までリングをスライディングフィクスチャーに嵌め込みます。
(注意) リングにスライディングフィクスチャーを一度嵌めると取り外しが困難です。

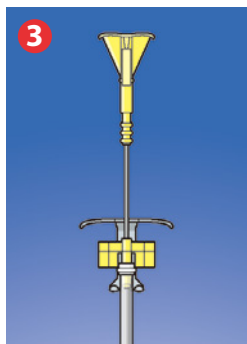

3 グリップスターを取り付けます。



4 エクステンダーのリング (3番目) をグリップスターのフックに固定し、バンパーを伸展させます。バンパー伸展後、ガイドワイヤを通し、チューブを引き抜きます。

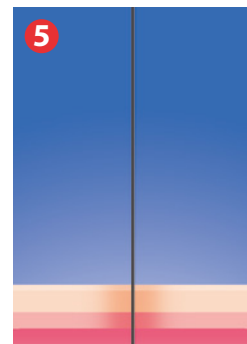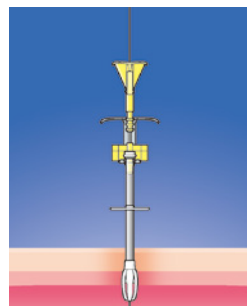


5 チューブを引き抜き、ガイドワイヤを残します。

抜去時に必要なもの



キット内に別包装にて同梱されています。
単品での取扱いもごさいます。
カタログ番号：RPL20P2
※抜去専用となります。
※エクステンダーとグリップスターは、挿入用と抜去用で異なります。

抜去時

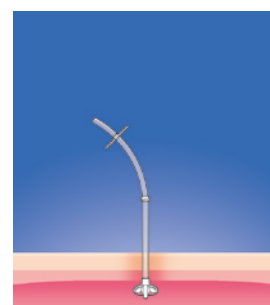

Kangaroo™ カンガルー™ バンパー G-チューブ

ガイドワイヤと伸展ロックで安心な胃瘻交換

挿入手技



使用手順



1 チューブにグリップスターとエクステンダーをセットします。
キットにはセットされた状態が入っています。




2 エクステンダーのリング(先端側から3番目)をグリップスターのフックに固定し、バンパーを伸展させます。バンパー伸展後、ガイドワイヤに通しチューブを挿入します。

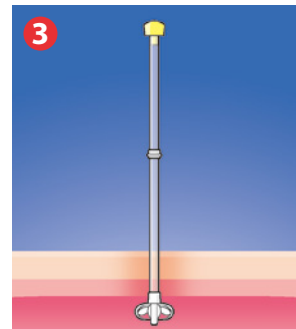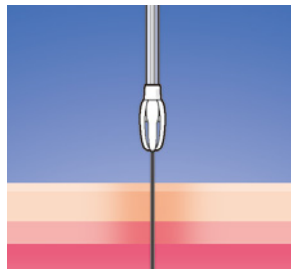


3 グリップスターを外してバンパーの伸展を解除します。エクステンダー、ガイドワイヤの順に抜きます。



4 チューブを黄色の固定具から10mm以内で切断してください。

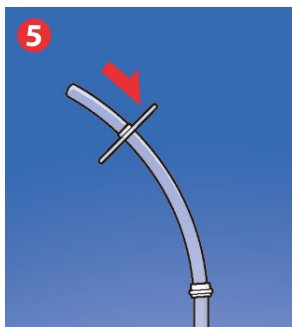

5 ペアンで、体外固定具を押し広げながら、適切な位置に調整します。

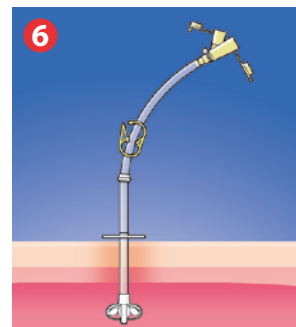


6 クランプと誤接続防止アダプタをセットし、挿入終了です。

挿入時の構成品



キットにはセットされた状態が入っています。

挿入時

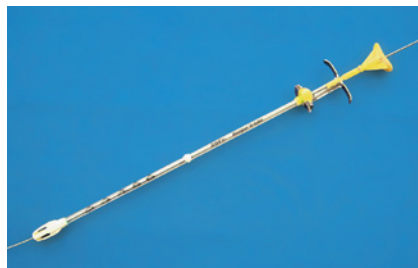

ご使用の際には添付文書をよくお読みください。

販売名：カンガルー バンパー G-チューブ
医療機器承認番号：21800BZZ10067000

© 2023 Cardinal Health. All Rights Reserved.
Cardinal Healthロゴマーク、"Essential to care、KANGAROO及びカンガルーはCardinal Healthの商標です。


Cardinal Health
Essential to care™

cardinalhealth.com

お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120-917-205

mt-ef-bgsj
2305.pdf.es