

Safe Access™ セーフ バイアクセス™

針刺し切創の 予防に一役



操作時のアクシデントを未然に防ぐ、 プラスチック製カニューーラ



ボトル



バイアル



アンプル



1孔式吸引口

アンプルなどからの微量薬剤も吸引しやすい1孔式の吸引口。
側孔の位置は▲マークの180度反対側ですのでマークを目印に吸引できます。



コアリング発生の低減

セイフ バイアクセスは、金属針使用時に問題となるコアリングの発生を低減します。

穿刺によって削りとられたゴム片がルート内に入りこむことがないので、ミキシング等にも安心してご利用いただけます。

試験方法

輸液ボトルのゴム栓に、当社18G金属針、セイフ バイアクセスをそれぞれ10回穿刺し、最後にマイクロスコープで写真を撮影し、ゴム栓の状態を記録(できる限り同じ場所に10回穿刺する)。

※当社実験による



セイフ バイアクセス
10回穿刺時輸液ボトル
ゴム部表面写真



18G金属針
10回穿刺時輸液ボトル
ゴム部表面写真

カタログ番号	形状	プライミングボリューム	包装単位
1880-BIN (1孔式)		0.07mL	1200個

包装：1本毎滅菌済 プリスターパック入 材質：ポリプロピレン 再使用禁止

製品規格

一般的名称 : 静脈ライン用コネクタ
販売名 : セイフ バイアクセス
医療機器届出番号 : 22B1X00007NS015A
クラス分類 : I 一般医療機器



cardinalhealth.jp

製品情報・
FAQサイトは
こちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
TEL 0120-917-205