



# 使用方法

## Instruction For Use


### Argyle™ Fukuroi カテーテル フィクスチャ

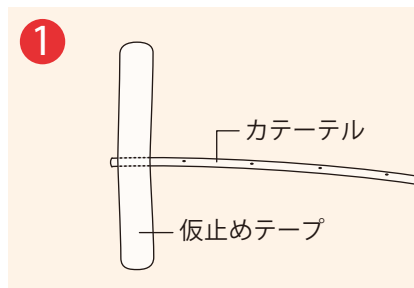


付属の仮止めテープでカテーテルを固定する。

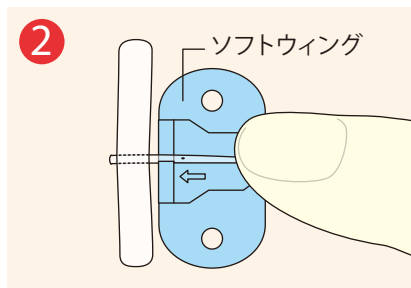


ソフトウイングの矢印を刺入部側に向け、カテーテルを溝にはめ込む。

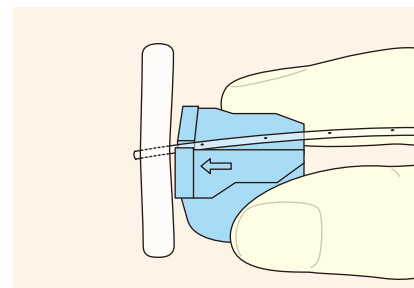


はめ込みにくい場合は、ソフトウイングの両翼を指で曲げ、溝を広げてからカテーテルをはめ込む。

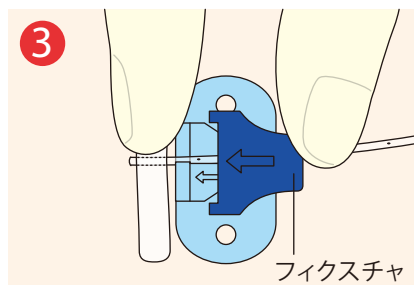


フィクスチャをソフトウイングの上に被せる。

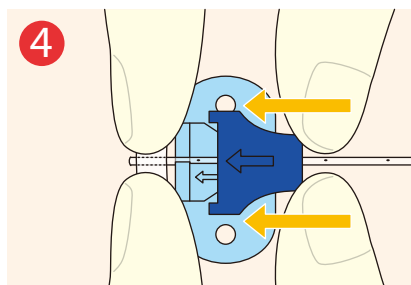


指でフィクスチャをスライドさせ、ソフトウイングに装着する。

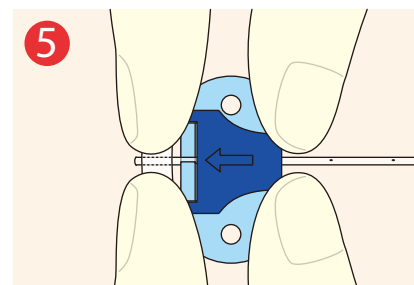

確実に押し込まれたことを確認する。

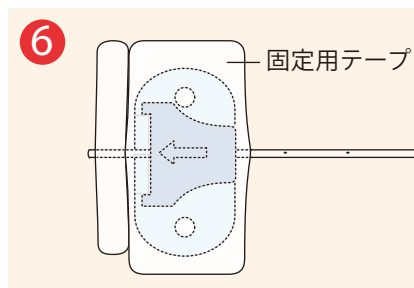

本体の上から付属の固定用テープで固定し、仮止めテープを剥がす。

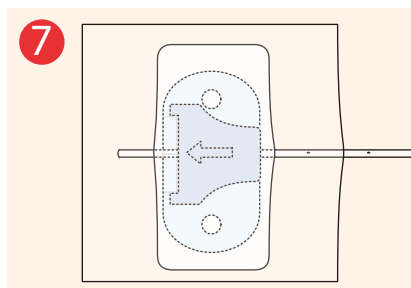


装着後は、院内のプロトコールに従い、透明ドレッシング材等を使用してカテーテルの皮膚刺入部を中心にフィクスチャも含めて保護する。


# 確認ポイント

## Point


1. 青いフィクスチャをスライドする時は、両手の親指で押し込むと、嵌めこみやすくなります。

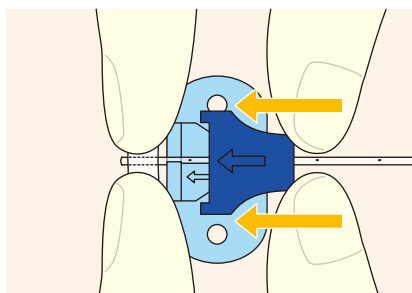

2. フィクスチャをスライドして固定する際、図のような状態で嵌合していない事をご確認ください。

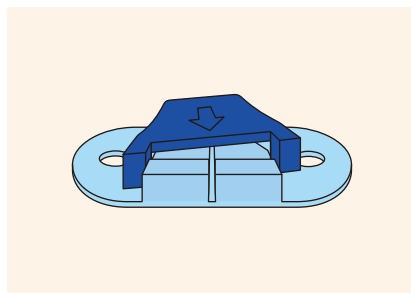

3. テープ交換の際は、フィクスチャ全体を人差し指で押さえ、そこを支点として周囲からテープを剥がすと、カテーテルがずれることなくきれいに剥がせます。

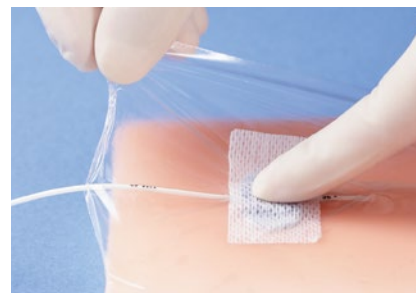

4. カテーテル フィクスチャは、カーディナルヘルス株式会社「Argyle™ Fukuroi PICC キット」専用固定具です。PICC キット以外のカテーテルに使用しないでください。

5. ソフトウィングの二つの穴を使用して、皮膚と縫合固定する必要はありません。

6. ソフトウィングは、カテーテルサイズによってカラーコードされています。使用するカテーテルに適合した固定具をご使用ください。固定用テープは各サイズ共通です。



7. 固定具キットは、固定具「ソフトウィング+フィクスチャ」と固定用テープの開封口は異なります。上下別々の開封口より取り出して下さい。



固定用テープ

ソフトウィング+フィクスチャ

ご使用の際には添付文書をよくお読みください。

一般的名称 : カテーテル等保持用ホルダ  
販売名 : カテーテル フィクスチャ  
医療機器届出番号 : 22B1X00007NS020A  
クラス分類 : I 一般医療機器

  
**CardinalHealth™**



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel : 0120-917-205  
[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)