



# 安全な気管吸引の ベストパートナーを目指して

閉鎖式吸引カテーテル

**Argyle™ Fukuroi**

トラックセーフ クローズド サクション

# トラックセーフ クローズド サクション 72時間タイプ

## ダブルスイーベルコネクタ

自由に回転することで、人工呼吸回路及び気管チューブのねじれを最小限にします。

## コントロールバルブ

偶発的な吸引を防止します。非吸引時は、バルブを180度回転させることでロックでき、ロック状態が視覚的にも分かりやすいデザインです。グリップしやすいよう、コンパクトで丸みを帯びた形状です。

※72時間タイプはグリーン

## 洗浄用ポート

一方弁がついており、ポートを開けた時に生じるエア漏れを防止します。

## カラーコード

## スリーブ

分泌物の確認がしやすく、カテーテルの感触が伝わりやすいため操作性が向上します。

## キャップ


コントロールバルブに接続されているので、紛失する心配がありません。

## 特長

シンプルな操作でカテーテル洗浄が可能です

## フラップバルブ 72時間タイプのみ

回路を閉鎖し陰圧をかけることで、より安全で効果的な洗浄操作が行えます。

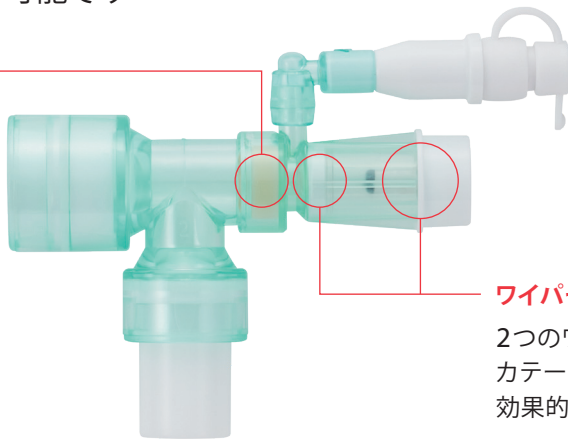

## ワイパーシール 72時間タイプのみ

2つのワイパーシールでカテーテル周囲に付着した分泌物を効果的に除去します。

## コントロールバルブ



オープン状態

ロック状態

## カテーテル



適度なコシで、よりよい操作性と気管粘膜損傷などのリスク軽減を実現します。カテーテルの先端位置を確認しやすいよう深度目盛りを1cm毎につけているため、挿入深度を正確に計測できます。

## 小児用カテーテル



目盛りが1cm毎に、且つ、カラーマークが表示されているため挿入深度を正確に計測できます。

## Point

- ① 洗浄時のカテーテル先端位置が見やすいように、最先端に黒色のマーキングをしています。
- ② 視認性向上のため、『引戻し位置確認マーク』をカテーテル全周に付与しています。



引戻し位置確認マーク

# トラックセーフ クローズド サクション 24時間タイプ

## ダブルスイーベルコネクタ

自由に回転することで、人工呼吸回路及び気管チューブのねじれを最小限にします。

## コントロールバルブ

偶発的な吸引を防止します。非吸引時は、バルブを180度回転させることでロックでき、ロック状態が視覚的にも分かりやすいデザインです。グリップしやすいよう、コンパクトで丸みを帯びた形状です。

※24時間タイプはホワイト

## 洗浄用ポート

一方弁がついており、ポートを開けた時に生じるエア漏れを防止します。

## カラーコード

## スリーブ

分泌物の確認がしやすく、カテーテルの感触が伝わりやすいため操作性が向上します。

## キャップ

コントロールバルブに接続されているので、紛失する心配がありません。

## 共通アクセサリー

### ● ハンドカバー (2双)

滅菌されたハンドカバーで本体取付時、交換時の清潔操作が可能です。また手袋の代わりに使用でき不要なコストを削減します。



### ● ディスコネクトウェッジ

接続部の取り外し時に、呼吸回路を支え、ディスコネクトウェッジを使用することで本体と気管チューブ/気管切開チューブとの取り外しを容易に行えます。




### ● カテーテルマウント

必要に応じて呼吸器回路とカテーテル本体との間に接続し取り回しを容易にします。



### ● 曜日ラベル

交換する曜日の目安となるラベルです。ラベル内のFrサイズの色は、カテーテルのカラーコードと同一のため、患者毎の適応サイズ間違いをなくします。

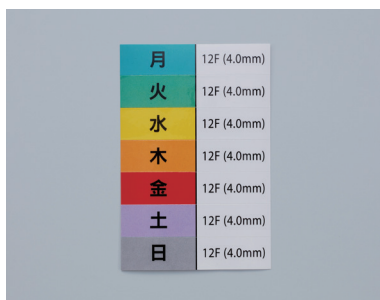

画像は12Fr(カラーコード：白)

## トラックセーフ クローズド サクション 72時間タイプ



カタログ番号	カテーテル外径 (mm)	カテーテル長さ (cm)	仕様	カラーコード	対象	包装単位		
CS72-10EN	3.3 (10Fr)	51	気管挿管用	黒	成人	10本/箱		
CS72-12EN	4.0 (12Fr)	51		白				
CS72-14EN	4.7 (14Fr)	51		緑				
CS72-16EN	5.3 (16Fr)	51		橙				
CS72-10TR	3.3 (10Fr)	28.5	気管切開用	黒				
CS72-12TR	4.0 (12Fr)	28.5		白				
CS72-14TR	4.7 (14Fr)	28.5		緑				
CS72-16TR	5.3 (16Fr)	28.5		橙				

セット内容：カテーテル、カテーテルマウント、ディスコネクトウェッジ、曜日ラベル、ハンドカバー  
包装：1本毎滅菌済み

## トラックセーフ クローズド サクション 24時間タイプ



カタログ番号	カテーテル外径 (mm)	カテーテル長さ (cm)	仕様	カラーコード	対象	包装単位	
CS24-08EN	2.7 (8Fr)	37.5	気管挿管用	薄青	小児	10本/箱	
CS24-10EN	3.3 (10Fr)	54		黒	成人		
CS24-12EN	4.0 (12Fr)	54		白			
CS24-14EN	4.7 (14Fr)	54		緑			
CS24-16EN	5.3 (16Fr)	54	気管切開用	橙			
CS24-10TR	3.3 (10Fr)	30.5		黒			
CS24-12TR	4.0 (12Fr)	30.5		白			
CS24-14TR	4.7 (14Fr)	30.5		緑			
CS24-16TR	5.3 (16Fr)	30.5		橙			

セット内容：カテーテル、カテーテルマウント、ディスコネクトウェッジ、曜日ラベル、ハンドカバー  
包装：1本毎滅菌済み

## 洗浄用水



カタログ番号	容量	内容物	包装単位
CS-SAL	15mL	0.9%NaCl	40本/箱

### 製品規格

一般的名称：気管支吸引用カテーテル  
 販売名：トラックセーフ クローズド サクション  
 医療機器認証番号：304AABZX00023000  
 クラス分類：II 管理医療機器  
 製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社



製品情報  
FAQサイトはこちら



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel : 0120-917-205  
[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)