



ガイドワイヤと伸展ロックで安心な胃瘻交換

カテーテル抜去デバイスの使い方


使用手順

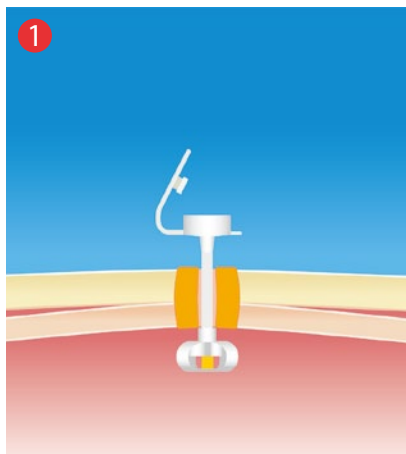

1 カンガルーボタンIIのキャップを外します。

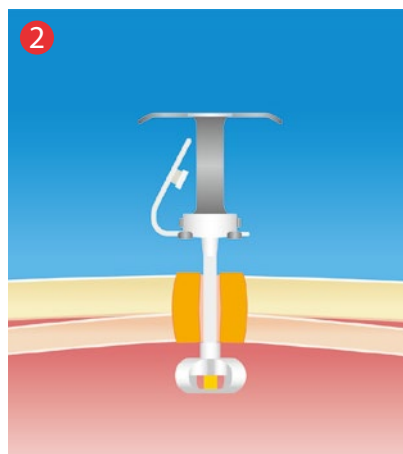

2 グリップスターをカンガルーボタンIIの体外固定具に装着します。

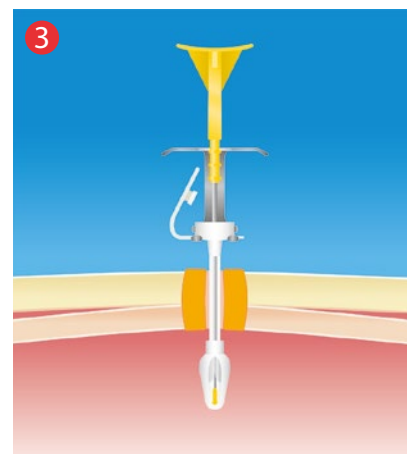

3 エクステンダーをカンガルーボタンIIの内腔にゆっくり挿入し、バンパーの中心にはまったことを確認します。エクステンダーのリング(3番目)をグリップスターのフックに固定し、バンパーを伸展させます。

ご準備頂くもの



使用例




注意

- エクステンダーがバンパーの先端の穴にはまったことが確認できない場合は、内視鏡的回収を選択すること。
- 勢い良くエクステンダーを挿入すると胃後壁を損傷するおそれがあるため注意すること。


ガイドワイヤと伸展ロックで安心な胃瘻交換

カンガルーボタン™ II の交換方法


使用手順 (抜去)

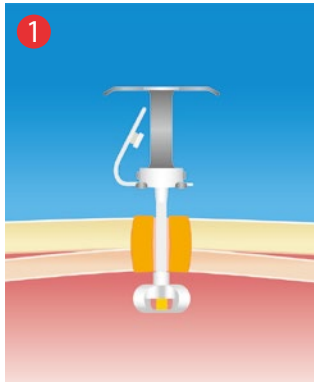


1 グリップスターを取り付けます。

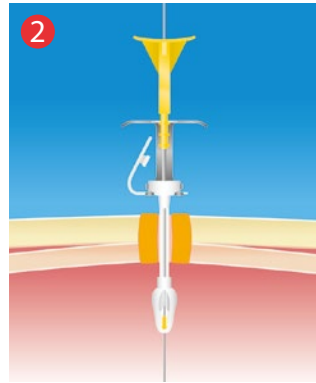

2 バンパー伸展後、ガイドワイヤを通します。

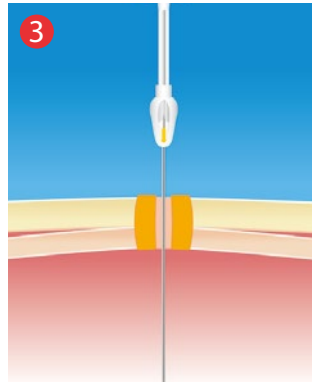


3 カンガルーボタンIIを引き抜きます。

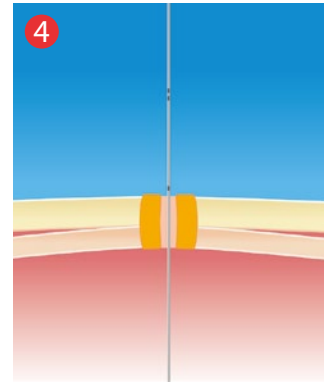


4 ガイドワイヤを残します。


使用手順 (挿入)

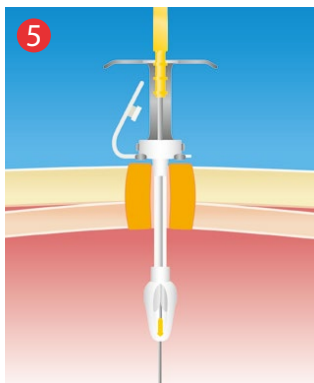


5 ガイドワイヤに伸展したカンガルーボタンIIを挿入します。

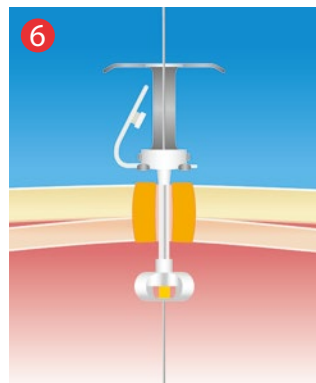

6 バンパーの伸展を解除し、エクステンダーを抜きます。

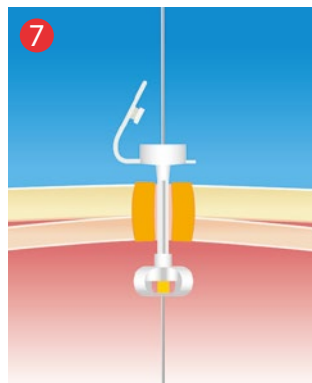

7 グリップスターを取ります。

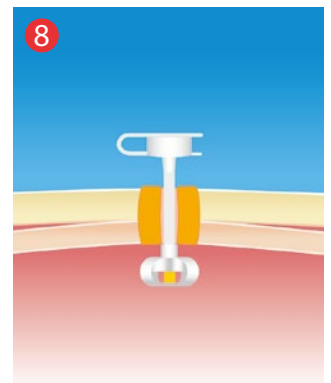

8 ガイドワイヤを抜いて交換終了です。

※ 本手技は胃瘻交換の安全性を高めるものであり、カテーテルが胃内に正しく留置されることを保証するものではありません。
※ ご使用にあたっては添付文書を必ずお読みください。

販売名：カンガルーボタン II
医療機器承認番号：21600BZZ00252000



製品情報
FAQサイトはこちら