

# Simple & Speedy

Kangaroo™ 胃壁固定具 S




胃壁固定の1サイクルがスムーズなレバーの上げ下げのみで操作可能です。




結紮糸があらかじめセットされており、糸の挿入をせずに胃壁固定が複数回連続して行えます。


# シンプルかつスピーディーな手技の胃壁固定具

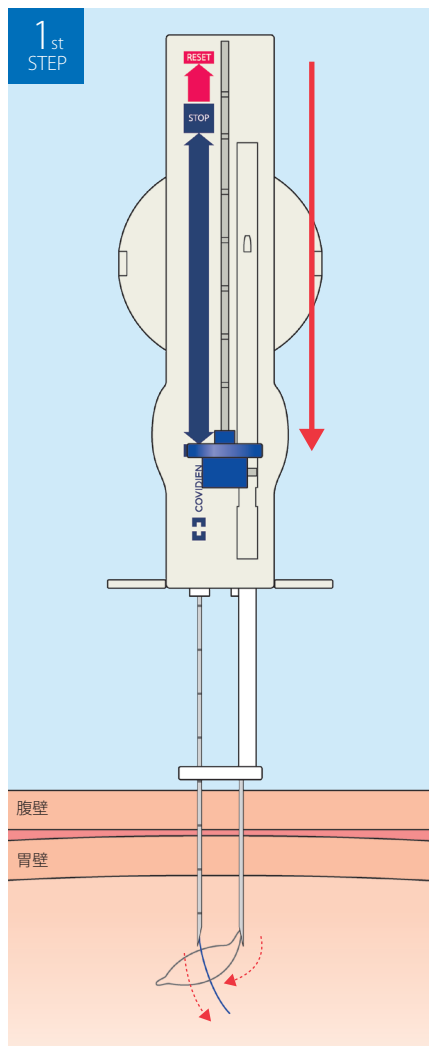

マーキングした部位に、針を垂直に穿刺し、**レバーを下げる**と、ループが形成され、結紮糸がループを通ります。

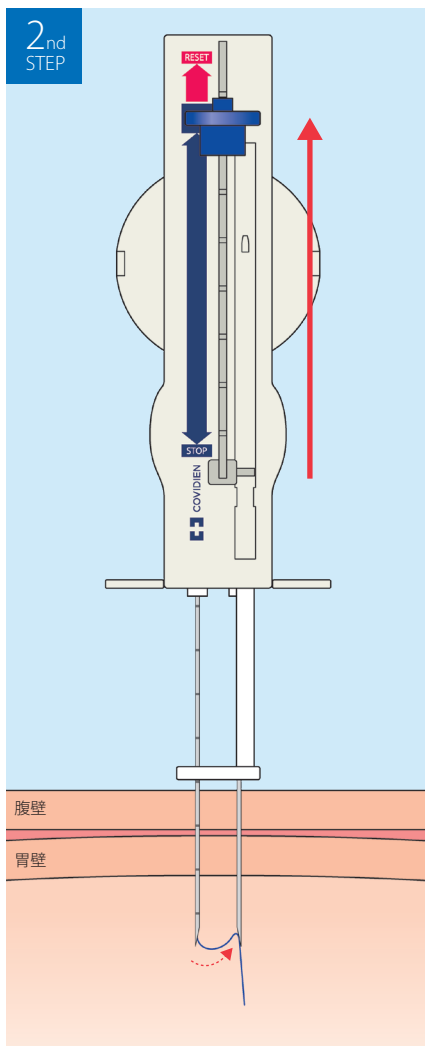

**レバーを上へ戻す**と、穿刺針先端が結紮糸を把持した状態になります。

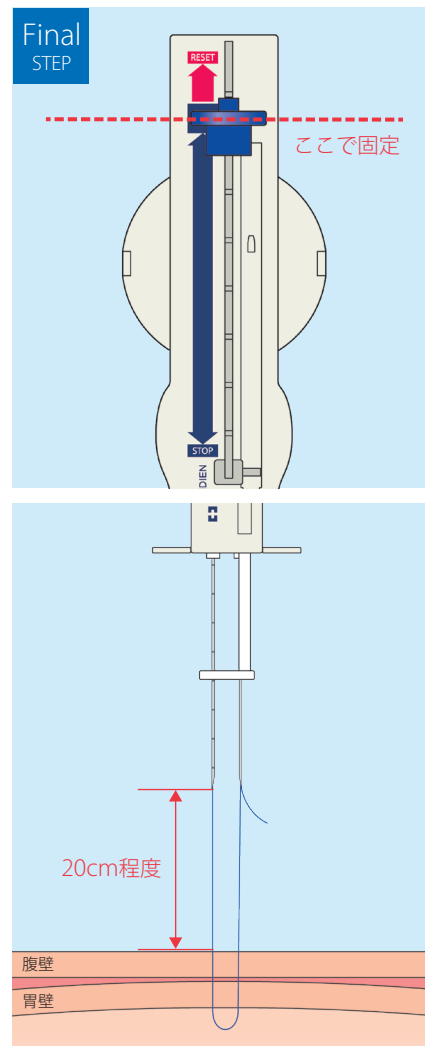

**レバーを把持**したまま、静かに針を体外へ抜去し、結紮糸をカットします。**レバーをリセット**の位置まで戻し、結紮糸をフリーにします。

カタログ番号	導入針外径		結紮糸 (2-0号)
	外径 (mm)	長さ (mm)	長さ (cm)
3760S	0.9 (20G)	80	250

包装：1個毎滅菌済  
包装単位：1個/箱 再使用禁止

## 【製品規格】

一般的名称：スーチャーアンカ  
販売名：胃壁固定具 S  
医療機器認証番号：226AABZX00027000  
クラス分類：II 管理医療機器  
製造販売元：株式会社タスク



製品情報  
FAQサイトはこちら



[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)

お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel：0120-917-205