




Multi Channel™ Drainage Set

SOFT SILICONE / POLYURETHANE DRAINAGE CATHETER


優れた柔軟性と広い内腔を確保し、高い排液効率と安全な操作性を追求した「チャンネルプラス™」構造のドレナージカテーテル

チャンネルプラス™ 構造


独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造を採用し、当社従来品に比べ、目詰まりしにくく優れた排液性を確保します。

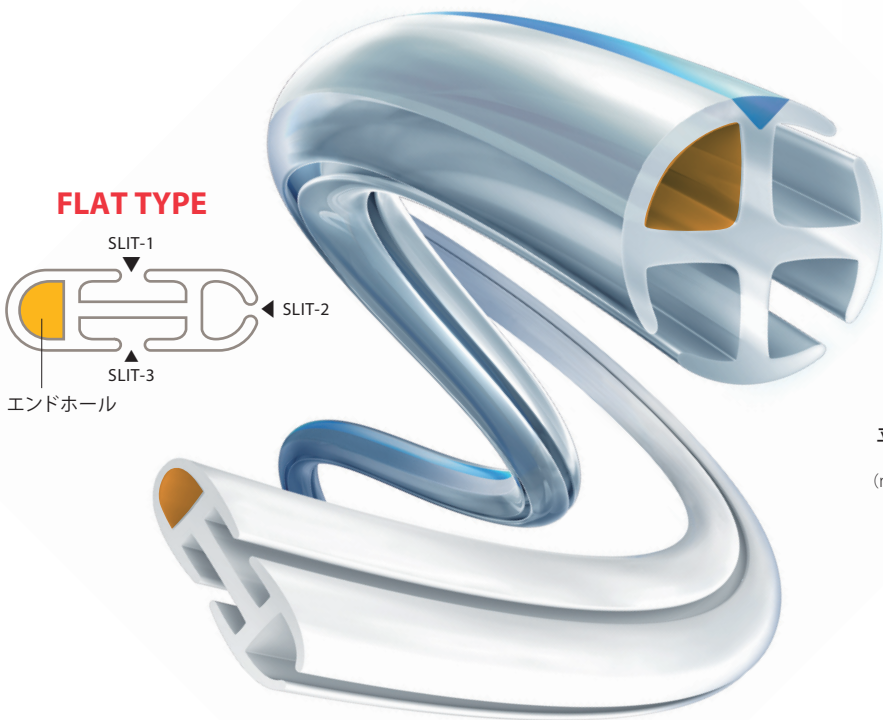


ROUND TYPE

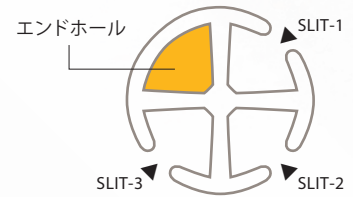

FLAT TYPE

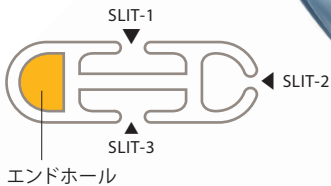


平均値の流量

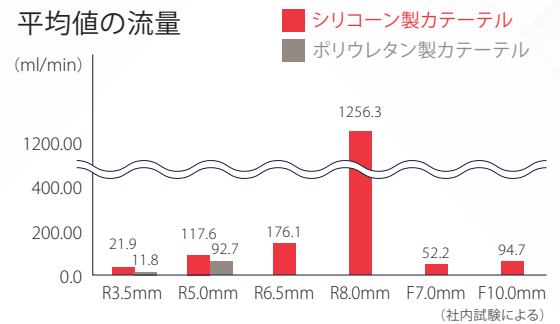


広範囲からのドレナージ

スリットとエンドホールの組み合わせにより、手元側と先端側に同時に陰圧がかかり広範囲からのドレナージが可能です。

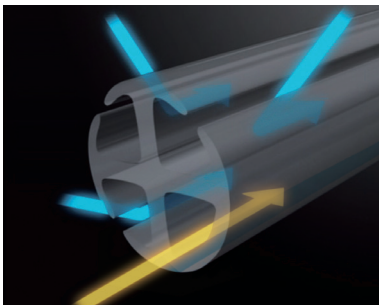

ガイドワイヤを用いたドレイン交換

エンドホールルーメンにガイドワイヤを挿入しルートを確認する事で、ドレインの交換が容易に行えます。

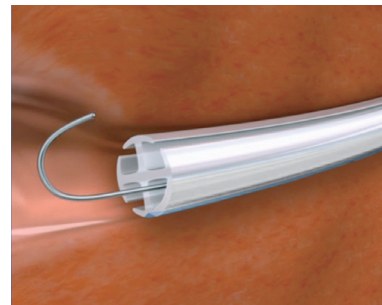

組織の引き込みのリスクを軽減

スリット溝で吸引圧を分散し、組織のへばりつきや損傷のリスクを低減します。また、スムーズな抜去で患者の抜去痛を低減します。

カテーテル材質が選択可能

留置部位に応じてシリコン、ポリウレタンからカテーテルの素材が選択可能です。

SAFETY LOCK CONNECTION SYSTEM

カテーテルとポンプの接続部には、安全かつシンプルな接続システムを採用
従来品対比、接続強度を向上しています。

セイフティーロック 接続システム

ポンプとコネクタ間はロックリングシステムで確実に固定し、外れ難さと外し易さを両立しました。
カテーテルとコネクタ間はシンプルな操作で固定力を向上しています。




SAFETY LOCK

セイフティーロック接続強度


A Catheter + Connector

■ シリコン製カテーテル ■ ポリウレタン製カテーテル

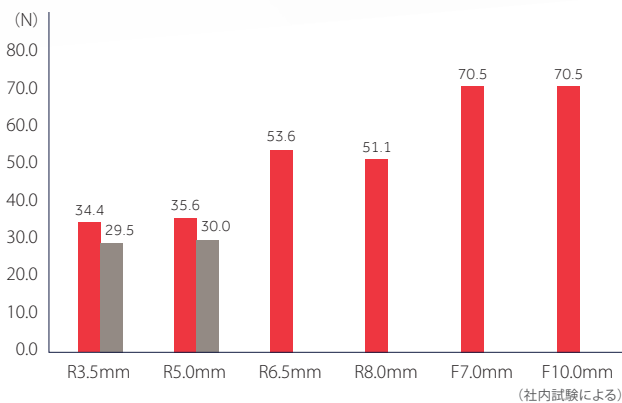

B Connector + Pump

■ シリコン製カテーテル ■ ポリウレタン製カテーテル

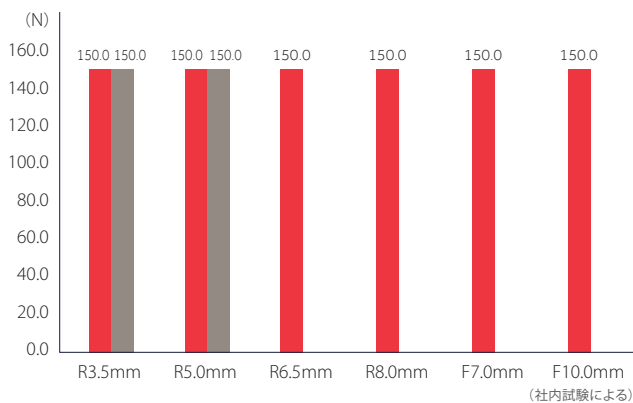

製品規格
 一般的名称 : 創部用吸引留置カテーテル
 販売名 : マルチチャネル ドレナージ カテーテルS
 医療機器認証番号 : 227AABZX00089000
 クラス分類 : II 管理医療機器
 製造販売元 : フォルテグロウメディカル株式会社
 販売元 : カーディナルヘルス株式会社

一般的名称 : カテーテルコネクタ
 販売名 : マルチチャネル用コネクタ
 医療機器届出番号 : 09B1X00004000149
 クラス分類 : I 一般医療機器
 製造販売元 : フォルテグロウメディカル株式会社
 販売元 : カーディナルヘルス株式会社

一般的名称 : 吸引チューブ
 販売名 : マルチチャネル用コネクティングチューブ
 医療機器届出番号 : 09B1X00004000148
 クラス分類 : I 一般医療機器
 製造販売元 : フォルテグロウメディカル株式会社
 販売元 : カーディナルヘルス株式会社

一般的名称 : 吸引チューブ
 販売名 : マルチチャネル用コネクタリング
 医療機器届出番号 : 09B1X00004000150
 クラス分類 : I 一般医療機器
 製造販売元 : フォルテグロウメディカル株式会社
 販売元 : カーディナルヘルス株式会社


一般的名称 : カテーテルコネクタ
 販売名 : マルチチャネル用チュービングコネクタ
 医療機器届出番号 : 09B1X00004000153
 クラス分類 : I 一般医療機器
 製造販売元 : フォルテグロウメディカル株式会社
 販売元 : カーディナルヘルス株式会社

SAFETY OPERATION & MANAGEMENT

安全な操作性と管理性を兼ね備えた付属品を構成しています。

デプスマーク

吸引開始位置の目安となるスリット開始位置、体表部目安（ドレーン交換時カット目安）にそれぞれ目印があります。

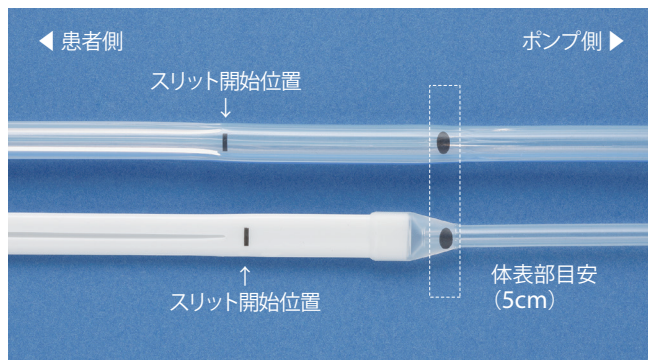

ベンダブルニードル


自由に角度調節でき、どんな部位でも留置しやすくなっています。※穿刺針タイプ、鈍針タイプがあります。



ニードルキャプチャ™


針先が体表に出た後、カバーする事で安全且つ容易にドレナージカテーテルを引き抜く事ができます。また、一度ロックすると外れないので、安全に廃棄する事が可能です。

※ 穿刺針有タイプに付属しています。

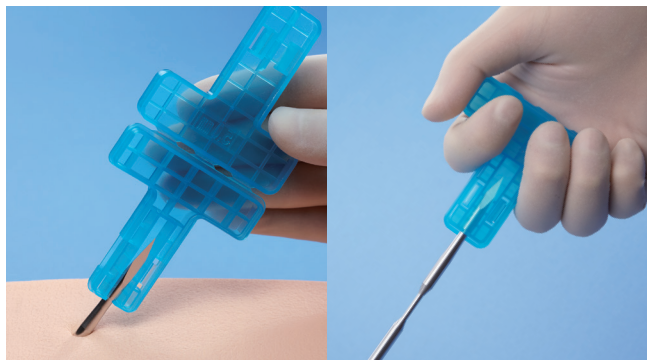


専用固定具

肌に固定するベーステープと、カテーテルを固定するテープが一体となった構造で、高い固定性を維持し、カテーテル抜去のリスクを低減し、ドレナージ管理の標準化をサポートします。

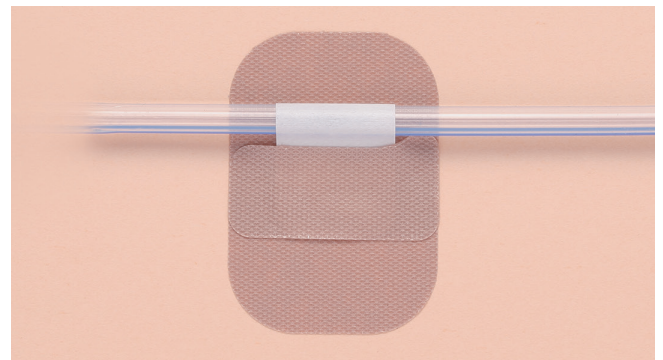

鈍針

周囲の血管を傷つけずに穿刺する事が可能です。また医療従事者の針刺し事故予防に貢献します。

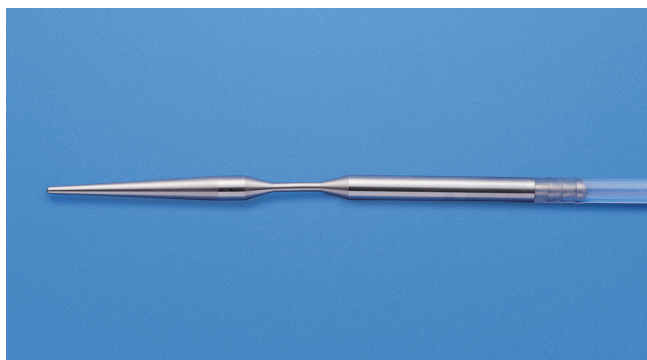


MANY VARIATIONS VARIOUS COMBINATIONS

ポンプ容量、吸引圧の違う9種類のサイズラインナップ。
最適な組み合わせで、症例に併せた安定した持続吸引が可能です。

Flap Pump及びBulb Pumpにはカテーテル2本を接続できるダブルポートタイプ、
1本留置専用シングルポートタイプをそれぞれ準備しております。

Flap Pump

両手で圧縮してロックし、フラップ操作で吸引を開始します。金属バネを使用しています。MRI等では使用しないでください。

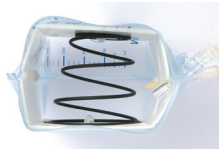

Bulb Pump

片手で簡単に貯留物の廃棄、圧縮操作が行えるシンプルで操作性の良いポンプです。金属を使用していないため、緊急時のMRIにも対応可能です。

Soft Bag

バルブをワンプッシュし吸引を開始します。フラップ型、バルブ型と比較してより低圧での持続吸引が可能です。



Precision

ポンプ接着式の
延長チューブ (50cm) が付いているため、
病棟での取り回しが容易になります。

送止弁により
貯留物の逆流を防ぎます。

2 ボトル方式で
吸引状態を持続しながら
正確な貯留物の計測を
行うことが可能です。
透明ボトルのため
排液の性状が
確認しやすくなっています。

貯留物が少量の場合でも、
排液ボトルを立てたまま
計量することが可能です。

ロックリングにより、
連結チューブと吸引ボトルを
確実につなぐことが可能です。
また、ロックリング付コネクタを外して
付属のキャップを閉めた状態で
自然排液することも可能です。

本製品には
天然ゴムを
使用していないため、
ラテックスアレルギーの
患者様にも
ご使用いただけます。

吸引ボトル

CardinalHealth

マルチチャネル
ドレナージ ポンプ

ARGYLE™ Fukuroi

本製品はカーディナルヘルスの
マルチチャネルドレナージカテーテルSとの
専用品であり他社品とは
組合せ使用できません。


Precision Pump Slant
370mL

カテーテル側に付属のマルチチャネル用コネクタと
ロックリングで接続できる専用設計です。
Yアダプタになっているため、
ドレナージカテーテルを1本もしくは2本接続出来ます。

本製品はカーディナルヘルスの
マルチチャネル ドレナージ カテーテルSとの
専用品であり他社品とは組合せ使用できません。

製品規格	: 排液バック
一般的名称	: マルチチャネル ドレナージ ポンプ
販売名	: マルチチャネル ドレナージ ポンプ
医療機器届出番号	: 09B1X00004000147
クラス分類	: I 一般医療機器
製造販売元	: フォルテグロウメディカル株式会社
販売元	: カーディナルヘルス株式会社

Pump Variation

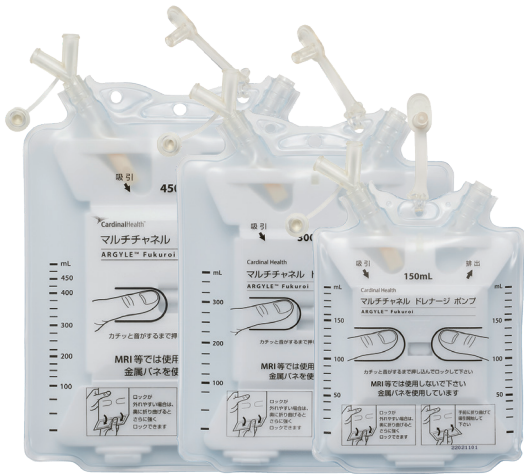

Flap Pump
450mL

Flap Pump
300mL

Flap Pump
150mL



Bulb Pump
400mL


Bulb Pump
200mL

Bulb Pump
125mL



Soft Bag
700mL

吸引圧と集液量

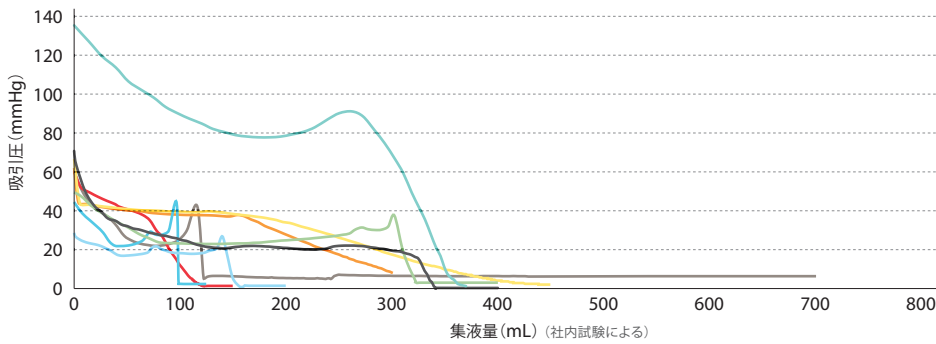

- バルブ型 125mL
- バルブ型 200mL
- バルブ型 400mL (5220-400) 卵型
- バルブ型 400mL (5220-400SS) 俵型
- フラップ型 150mL
- フラップ型 300mL
- フラップ型 450mL
- ソフトバッグ 700mL
- プレジジョン 370mL

逆流防止弁 (ラテックスフリー)

貯留物の逆流を防ぎ、逆行性感染のリスクを低減します。



Flap Pump



Bulb Pump / Soft Bag



Precision Pump Slant

専用ポシェット

携帯用に便利なポシェットをポンプに同梱しています。



マルチチャネル™ ドレナージ カテーテルS

カタログ番号	外径 (mm)	全長 (mm)	穿刺針外径 (mm)	タイプ	形状図	コネクタカラー
5221-35S	3.5	1200	3.5 (穿刺針)	ラウンド型		ピンク
5221-50S	5.0		5.0 (穿刺針)			ブルー
5221-65S	6.5		6.5 (穿刺針)			クリア
5221-80S	8.0	800	穿刺針 無し			グリーン
5221-07SF	7.0 (長径)	1200	5.0 (穿刺針)	フラット型		ブルー
5221-10SF	10.0 (長径)					
5221-35SNL	3.5	1200	穿刺針 無し	ラウンド型		ピンク
5221-50SNL	5.0					ブルー
5221-65SNL	6.5			クリア		
5221-07SFNL	7.0 (長径)			フラット型		ブルー
5221-10SFNL	10.0 (長径)					
5221-35SB	3.5	1200	3.5 (鈍針)	ラウンド型		ピンク
5221-50SB	5.0		5.0 (鈍針)			ブルー
5221-65SB	6.5		6.5 (鈍針)			クリア
5221-07SFB	7.0 (長径)		フラット型	5.0 (鈍針)		ブルー
5221-10SFB	10.0 (長径)					
5221-35P*	3.5	1200	3.5 (穿刺針)	ラウンド型		ピンク
5221-50P*	5.0		5.0 (穿刺針)			ブルー
5221-35PNL*	3.5		穿刺針 無し			ピンク
5221-50PNL*	5.0		ブルー			
5221-35PB*	3.5		3.5 (鈍針)			ピンク
5221-50PB*	5.0		5.0 (鈍針)			ブルー

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本/箱 ※ポリウレタン製カテーテル

再使用禁止

マルチチャネル™ ドレナージ ポンプ

カタログ番号	容量 (mL)	最高陰圧 (kPa)	吸引ポート	タイプ/形状
5220-125	125	8.9	ダブル	バルブ型
5220-200	200	11.2		
5220-400	400	20.0		
5220-400SS	400	19.0	シングル×2	
5220-125S	125	8.9	シングル	
5220-200S	200	11.2		
5220-150	150	8.0	ダブル	フラップ型
5220-300	300	8.2		
5220-450	450	8.8		
5220-150S	150	8.0	シングル	
5220-300S	300	8.2		
5220-450S	450	8.8		
5220-370SL	370	33.0	ダブル	プレジジョン型
5220-700	700	20.0	ダブル	ソフトバッグ型
5220-700R	700	20.0	—	ソフトバッグ型 (交換用)

包装：1個毎滅菌済 包装単位：10個/箱

再使用禁止

マルチチャネル用コネクティングチューブ

カタログ番号	サイズ	長さ (cm)	形状	コネクタカラー
5230-35	3.5mm用	12		ピンク
5230-50	5.0mm用			ブルー
5230-65	6.5mm用			クリア
5230-80	8.0mm用	50		グリーン
5230-35M	3.5mm用			ピンク
5230-50M	5.0mm用			ブルー
5230-65M	6.5mm用			クリア
5230-80M	8.0mm用			グリーン
5230-65MY	6.5mm用			クリア
5230-80MY	8.0mm用	100		グリーン
5230-35L	3.5mm用			ピンク
5230-50L	5.0mm用			ブルー
5230-65L	6.5mm用			クリア
5230-80L	8.0mm用			グリーン
5230-65LY	6.5mm用			クリア
5230-80LY	8.0mm用	グリーン		

包装：1本毎滅菌済 包装単位：20本/箱

再使用禁止

マルチチャネル用コネクタ ロング

カタログ番号	サイズ	長さ (cm)	ポート	形状	コネクタカラー
5240-35M	3.5mm用	50	—		ピンク
5240-50M	5.0mm用				ブルー
5240-65M	6.5mm用				クリア
5240-80M	8.0mm用				グリーン
5240-35L	3.5mm用	100	—		ピンク
5240-50L	5.0mm用				ブルー
5240-65L	6.5mm用				クリア
5240-80L	8.0mm用				グリーン
5240-50I	3.5mm用	50	シングル		クリア
5240-50Y	5.0mm用		ダブル		
5240-100I	6.5mm用	100	シングル		クリア
5240-100Y	8.0mm用		ダブル		

包装：1本毎滅菌済 包装単位：20個/箱

再使用禁止

マルチチャネル用コネクタ

カタログ番号	サイズ	形状	コネクタカラー
5240-35	3.5mm用		ピンク
5240-50	5.0mm用		ブルー
5240-65	6.5mm用		クリア
5240-80	8.0mm用		グリーン

包装：1本毎滅菌済 包装単位：20個/箱

再使用禁止

マルチチャネル用チュービングコネクタ

カタログ番号	サイズ	形状	コネクタカラー
5240-65Y	6.5mm用		クリア
5240-80Y	8.0mm用		グリーン

包装：1本毎滅菌済 包装単位：20個/箱

再使用禁止



お問い合わせ先
 カーディナルヘルス株式会社
 Tel: 0120-917-205
cardinalhealth.jp