



より衛生的なコネクタ管理を実現

EnClean® ブラシ



In partnership with



EnClean® は LumaClean の登録商標です。

ISO80369-3コネクタ 専用ブラシ



ハンドル

持ちやすいデザイン

患者名

裏側に記載可能

丈夫なブラシ

洗浄しやすいようISO80369-3
にフィットする設計

ストラップ

ベッドサイドやポールに
掛けることが可能


プラグ

洗浄中にコネクタ開口部をカバー

通気性キャップ

使用後に乾燥しやすいデザイン


使用方法

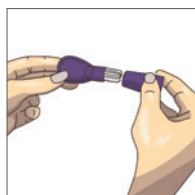


ブラシのキャップ
を外します。



きれいな水にブラ
シをつけます。

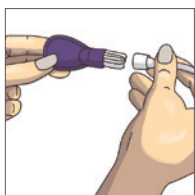

コネクタに
差し込みます。

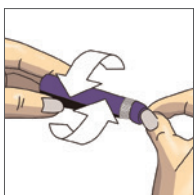

ブラシをまわして
洗浄します。



きれいな水でブラ
シをすすぎます。コ
ネクタがきれいにな
るまで繰り返して
ください。



コネクタの洗浄が
終わったら、きれ
いな水でブラシを
洗浄します。



キャップをつけて、
立てて保管します。

※上記の方法でご使用頂いた場合の推奨交換日数は30日です。

カタログ番号	製品名	包装単位
ENC2	EnClean ブラシ	10 中箱/箱 (10 本/中箱、100 本/箱)



お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205