

T.E.D.™ サージカル ストッキング

皮膚トラブルを予防するために、
正しく着用しましょう



弾性ストッキングの中に手のひらを入れ、かかとの部分に手のひらを合わせます。かかと部分は縫い目が違うので色が少し違います。



かかとの部分を軽く握ります。



かかを握ったまま、裏返しをします。



写真のようにかかとを下に維持します。



持ち方を変えて、つま先からかかと部分まで着用します。



かかとまで弾性ストッキングを着用したら、裏返した部分をつかみ、足の上に引き上げます。



上に引き上げる前にかかとうが合っているか確認をします。



足の周りを円を描くようにしてゆっくり着用します。



上端部は足を曲げても膝にかからない程度のところで合わせ、しわをつくらぬように着用して完成です。



着用の注意点

皮膚が赤くなったりかゆみの原因になります。



弾性ストッキングは引っ張り上げないように着用しましょう。



引っ張り上げると膝のあたりまでかぶってしまいます。
引っ張り上げず、かかとは合わせましょう。



上端部を折り返して着用しないようにしましょう。
かかとも合わせましょう。



上端部を丸めて着用しないようにしましょう。
かかとも合わせましょう。



しわができたなら、なでてなじませましょう。



足の状態を観察するための穴から指が出ないように着用しましょう。

次の症状がある場合の使用には、十分注意しましょう。

- ・閉塞性動脈硬化症の方
- ・足に炎症(感染など)がある方
- ・深部静脈血栓症の急性期の方
- ・湿疹や傷がある方
- ・糖尿病の方
- ・下肢に麻痺がある方
- ・うっ血性心不全の方

ご使用の際は必ず添付文書をお読みください。

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



cardinalhealth.jp

販売名：T.E.D. サージカル ストッキング
医療機器届出番号：22B1X00007KD001A

