

Argyle™ Fukuroi スーパー デニス™ チューブ 潤滑コーティング付

スムーズな挿入性と
優れた操作性を実現


スムーズな挿入性と優れた操作性を実現

腸管との摩擦抵抗を軽減するチューブの親水性潤滑コーティングと耐キンク性に優れたNi-Ti製ガイドワイヤによりスムーズな挿入性と優れた操作性を実現します。

Tube

チューブの親水性潤滑コーティング

チューブの先端から100cmまでの表面に親水性潤滑コーティングを施しました。水に濡らすだけで潤滑性を発現し、チューブ表面と腸管との摩擦抵抗を減少させ、手元操作の力が先端まで伝わりやすく挿入性が向上します。

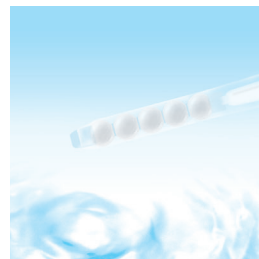

先端のフレキシブルな誘導子

チューブの先端から終端にかけて徐々に硬くなるグラデーション性能により柔軟性を発揮し、腸管への追従性に優れたスムーズな挿入性を実現します。



やさしいポリウレタン素材

しなやかでコシのあるポリウレタン素材は、留置中適度に柔軟になり、患者さんの苦痛を軽減します。

高い排液効果

引っ張り強度の強いポリウレタン素材及び長い経験に基づいた合理的な設計により、チューブ排液腔の内径を最大化、優れた排液効果を発揮します。

2種類の硬さ

硬さの異なる2種類のチューブから選択することが可能です。

レギュラータイプ (柔軟性)：より柔軟で患者さんにやさしいチューブ

ハードタイプ (腰の強さ)：腰が強く、先端に力がスムーズに伝わりやすいチューブ

Guidewire

Ni-Ti (ニッケル-チタン) 製のガイドワイヤ

コア素材に耐キック性に優れたNi-Tiを採用。
滑りも良くガイドワイヤによるトラブルを軽減し、挿入時のストレスを軽減します。

Ni-Ti (ニッケル-チタン) 製

耐キック性に優れた素材で、ガイドワイヤの曲がりによるトラブルを軽減し、高い挿入性を実現します。

スーパーフレキシブルチップ


先端部がとても柔軟に設計されているため、ガイドワイヤによる腸管穿孔のリスクを軽減することが可能です。

親水性潤滑コーティング

水に濡れると潤滑性を発現し、チューブ内・腸管内での挿入抵抗を抑え、操作性を向上します。

350cm・500cmから選択可能


経鼻内視鏡下での操作に適した500cmも用意しました。

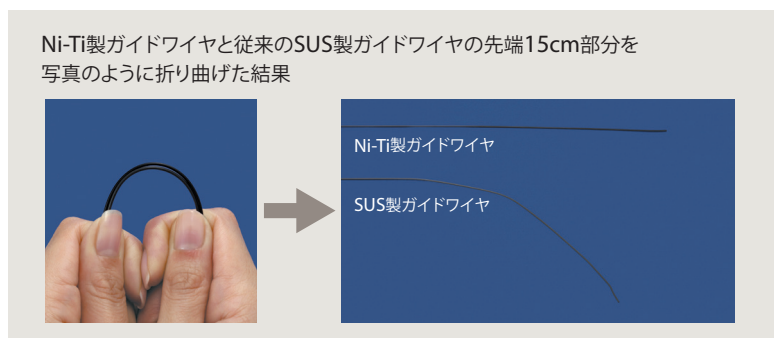

Easy to Use

付属品との組合せで用途に応じた操作が容易に行えます

三方活栓を使用した場合

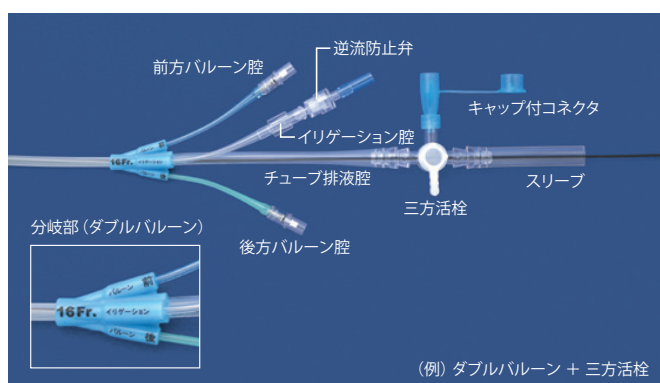

ガイドワイヤを固定するには三方活栓のOFFレバーを左か右に捻ります。チューブ排液腔からの逆流を防止するには短い透明のスリーブ鉗子をクランプします。

逆流防止弁付きイリゲーション腔 → 消化液の漏れによる汚染を防止


大型三方活栓 (付属品)

- 注入、排液、中断等の操作が簡単
- 挿入時のガイドワイヤの固定にも利用可能
- 側注ポートはコネクタの着脱によりルアーチップ、カテーテルチップのどちらにも接続可能

フラッシュ用アダプタ (付属品)

- サイドポートからの注水が可能
- チューブ排液腔からの逆流を防止

フラッシュ用アダプタを使用した場合

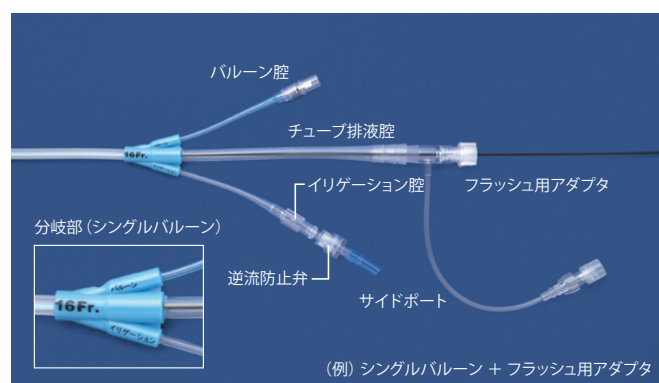

フラッシュ用アダプタのキャップを締め込むと、チューブ排液腔からの逆流を防止することが可能です (ガイドワイヤは完全には固定できません)。

Argyle™ Fukuroi スーパー デニス™ チューブ 潤滑コーティング付

キット内容

- ① 留置チューブ (チューブ)
- ② ガイドワイヤ
- ③ 延長チューブ (スリーブ)
- ④ 三方活栓
- ⑤ アダプタ
- ⑥ フラッシュ用アダプタ



レギュラータイプ

カタログ番号	チューブ		先端部	親水性ガイドワイヤ		バルーン数	付属品
	外径 (mm)	長さ (cm)		最大外径 (mm / インチ)	長さ (cm)		
3587-14	4.7 (14Fr.)	265	開口	1.32 / 0.052	350	シングル	フラッシュ用アダプタ キャップ付コネクタ 三方活栓 接続チューブ (スリーブ)
3587-16S	5.3 (16Fr.)						
3587-18S	6.0 (18Fr.)						
3587-16L	5.3 (16Fr.)						
3587-18L	6.0 (18Fr.)				500	ダブル	
3587-16SW	5.3 (16Fr.)						
3587-18SW	6.0 (18Fr.)						
3587-16LW	5.3 (16Fr.)						

包装：1セット毎滅菌済 ビールパック入り 包装単位：1セット/箱

再使用禁止

ハードタイプ

カタログ番号	チューブ		先端部	親水性ガイドワイヤ		バルーン数	付属品
	外径 (mm)	長さ (cm)		最大外径 (mm / インチ)	長さ (cm)		
3587-14H	4.7 (14Fr.)	265	開口	1.32 / 0.052	350	シングル	フラッシュ用アダプタ キャップ付コネクタ 三方活栓 接続チューブ (スリーブ)
3587-16SH	5.3 (16Fr.)						
3587-18SH	6.0 (18Fr.)						
3587-16LH	5.3 (16Fr.)						
3587-18LH	6.0 (18Fr.)				500	ダブル	
3587-16SWH	5.3 (16Fr.)						
3587-18SWH	6.0 (18Fr.)						
3587-16LWH	5.3 (16Fr.)						

包装：1セット毎滅菌済 ビールパック入り 包装単位：1セット/箱

再使用禁止

デニスガイドワイヤ N

カタログ番号	最大外径 (mm / インチ)	長さ (cm)
3587-5235	1.32mm / 0.052	350
3587-5250		500

包装：1本毎滅菌済 ビールパック入り 包装単位：1本/箱 再使用禁止

製品規格

一般的名称：腸管減圧用チューブ
販売名：スーパー デニス チューブ
医療機器認証番号：219ADBZX00081000
クラス分類：II 管理医療機器

一般的名称：非血管用ガイドワイヤ
販売名：デニスガイドワイヤ N
医療機器認証番号：220AABZX00159000
クラス分類：II 管理医療機器



cardinalhealth.jp

製品情報・
FAQサイトは
こちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
TEL 0120-917-205