

カンガルー Connect™ ポンプ


クイックガイド



ご使用方法を動画で確認したい場合は、
こちらのサイトからご覧ください。



ポンプの概要

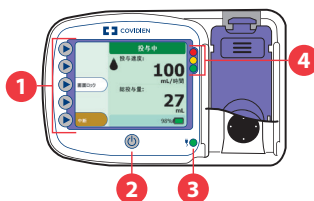

1. ソフトキー

画面に表示されるオプションに対応するキーを押して、オプションを選択します。

2. 電源ボタン

1回押すと電源が入ります。長押しすると電源がオフになります。




3. 電源

ポンプをAC電源に接続しているとき、電源ランプが緑色に点灯します。

4. ポンプの状態

- = 警告アラーム
- = 通知または注意アラーム
- = スタンバイまたは投与中

投与セットの装着

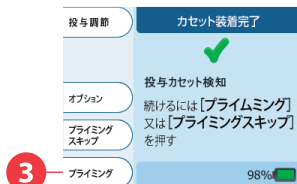
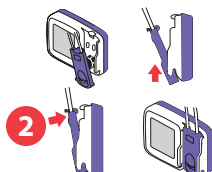
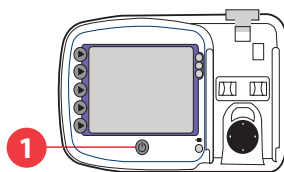


1. 電源ボタンを押します。

2. 投与セットをポンプ装着部の下側から入れ、カチッと音がするよう上部にはめ込みます。

3. カセット装着完了画面で投与セットが正しく装着されたことを確認し、**プライミング**ボタンを押します。

ポンプのプライミング

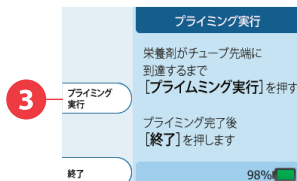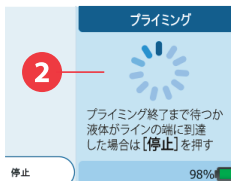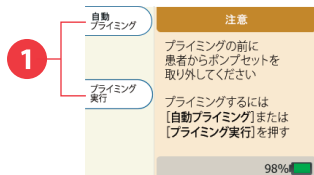

1. プライミングボタンを押すと上記の画面が表示されます。画面上の注意を確認後に**自動プライミング**が**プライミング実行**を選択します。


2. **自動プライミング**を選択した場合は、プライミングが完了するまでお待ちください。

3. **プライミング実行**を選択した場合は、栄養剤がチューブの先端まで満たされるまでボタンを押し続けてください。

投与速度設定




1. プライミングが完了したら、**投与調節**→**投与速度**を押して投与速度を入力します。
2. (+)または(-)ボタンを押して、投与速度を設定します。完了したら**OK**ボタンを押します。**投与調節**画面にて**終了**ボタンを押します。
3. 画面に**投与準備完了**と表示されます。**開始**ボタンを押して投与を開始します。

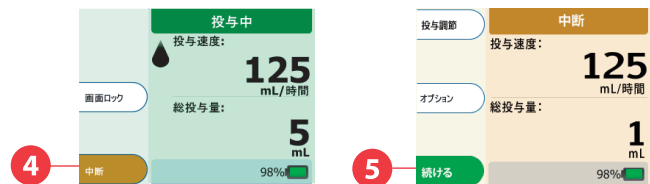

4. 投与中に投与を中止したり、投与速度を変更したい場合は**中断**ボタンを押します。
5. 投与を続ける場合には**続ける**ボタンを押します。


投与バッグ／栄養コンテナとポンプの位置

1. 図のように、投与する栄養剤の水面がポンプ上端の10インチ(25.4cm)上にくるように、投与バッグまたは栄養コンテナを吊ります。

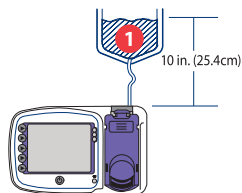


ポンプの電源オフ

1. ポンプを使用が終了し電源をオフにする場合には、電源ボタンを3秒間押します。

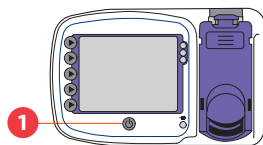

ポールクランプチューブのサポートガイド

- 患者につなぐチューブをチューブガイドに押し込み、ポンプの上に輪を作ります。図のように、緩やかな曲線を描くよう輪の長さを十分に確保してください。

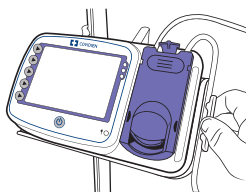

カーディナルヘルス株式会社

お問い合わせ
0120-917-205