


# Easier to use

**Kangaroo™**

**GB胃瘻バルーンカテーテル**

**胃瘻バルーンカテーテル I (GB胃瘻バルーンチューブ I)**

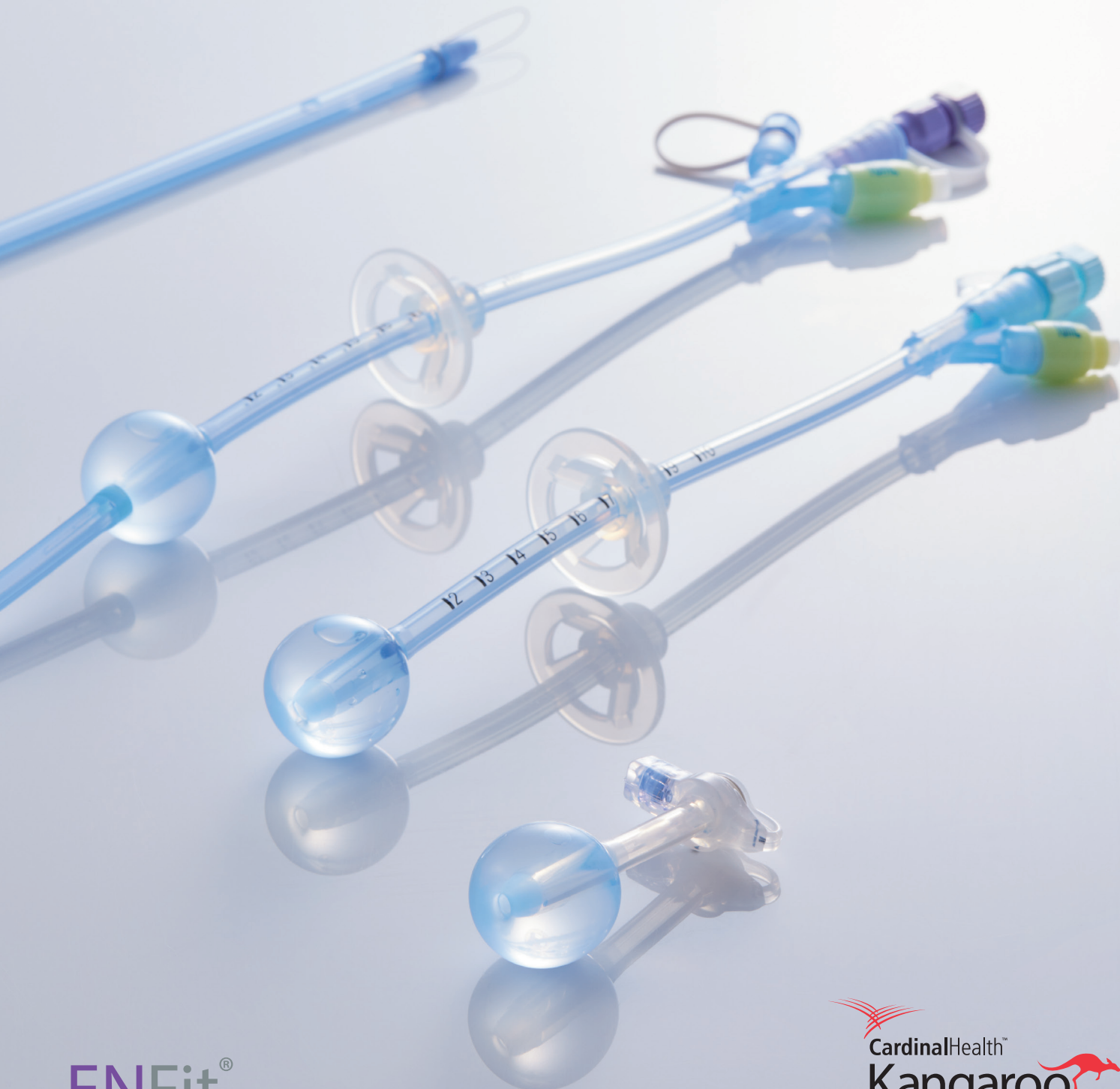

**ENFit®**

CardinalHealth™  
**Kangaroo** 


# バルーンの水抜けが少ない ガスバリア性 シリコーンバルーンを 採用




GBバルーンは、特殊加工のガスバリア性ガードによって、バルーン内圧を安定させることで水抜けを最小限に抑えるシリコーンバルーンです。  
胃内へバルーン挿入後、チューブ先端に装備されたリング形状のバルーンが胃壁を守り、損傷を軽減します。

## 30日間、バルーン水の入れ替えが不要です


GB胃瘻バルーンは、原則として留置期間中(最大30日)は膨張状態が維持されます。

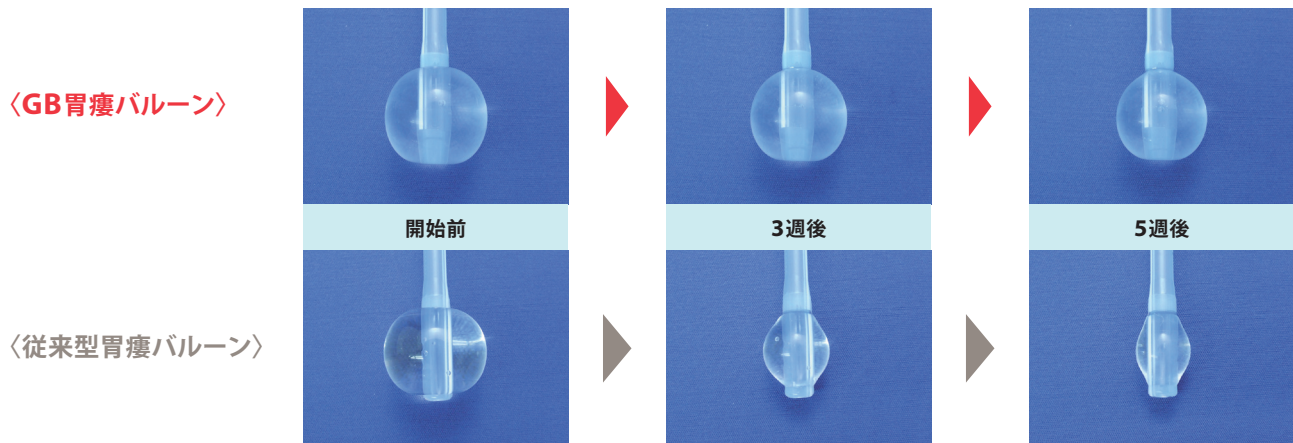


## 患者に「やさしい」先端形状

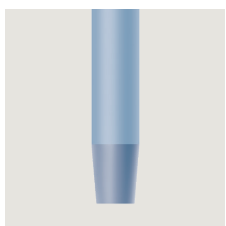

挿入時の抵抗を軽減した、テーパ形状のやさしい先端部。

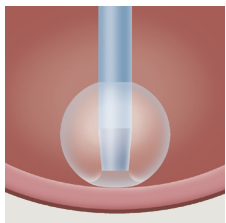


バルーンがリング形状に膨らみ、シャフトによる胃壁の損傷が軽減します。

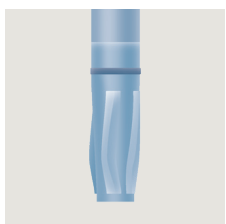

バルーン収縮時、タテヒダが生じるため、抜去時の抵抗が少なくなり、苦痛を軽減します。

## バルーン水の推移

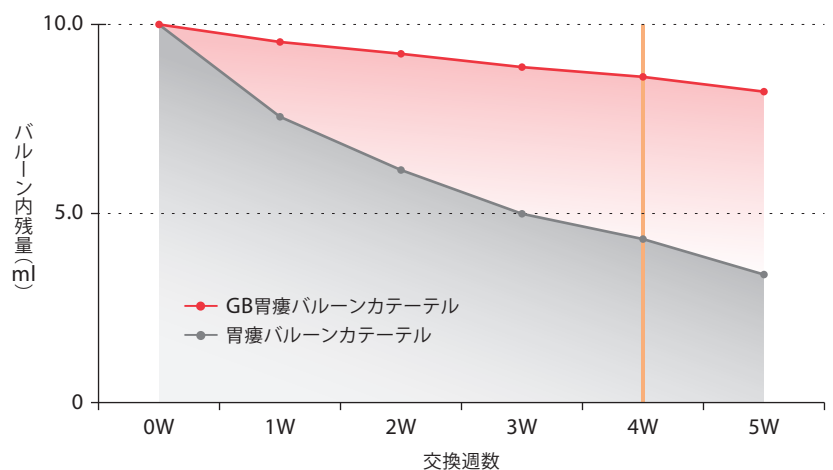


※富士システムズ株式会社 社内試験データ  
※蒸留水10mLを注入後交換までバルーン水を管理しなかった

# BALLOON BUTTON SMALL TYPE

## バルーンボタン スモールタイプ

- 90mmタイプのフィーディング・減圧チューブを使用することで、粘性の高い栄養剤にも対応可能です。
- 交換時はスタイレットで瘻孔確保が容易です。
- 本体先端部はテーパ形状となり、挿入時の抵抗を軽減します。
- バルーンがリンゴ形状に膨らみ、シャフトによる胃壁の損傷を軽減します。
- バルーン収縮時、縦にひだが生じるため、抜去時の抵抗を軽減します。
- 逆流防止弁付注入口、ウイング部などをコンパクトにすることで、小児の身体的負担の軽減に効果を発揮します。

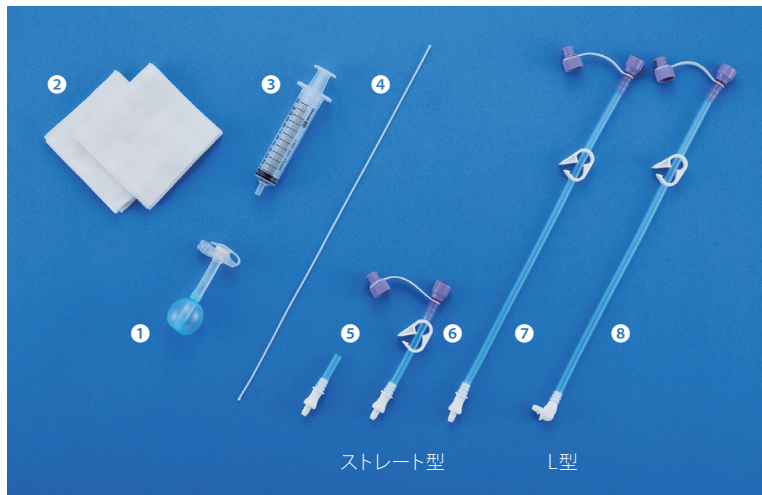

### キット内容

- 1 ボタン 1本
- 2 ガーゼ 5枚
- 3 シリンジ 1本
- 4 スタイレット 1本
- 5 アダプタ(逆止弁開口用) 1本
- 6 フィーディング・減圧チューブ ストレート型 1本(全長90mm)
- 7 フィーディング・減圧チューブ ストレート型 1本(全長280mm)
- 8 フィーディング・減圧チューブ L型 1本(全長280mm)

ストレート型

L型

## ACCESSORIES

### アクセサリ

#### フィーディング・減圧チューブ

バルーンボタン スモールタイプ専用のフィーディング・減圧チューブです。ストレート型とL型の2種類があります。

#### 内視鏡アダプタ／エア注入用ポンプ

内視鏡アダプタ(チューブ用)を接続し、エア注入用ポンプを接続することにより、内視鏡の挿入とエア注入が同時に行えます。



フィーディング・減圧チューブ

エア注入用ポンプ


内視鏡アダプタ

# BALLOON TUBE

## バルーンチューブ

- 瘻孔部に直接触しない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすいです。これにより、バンパー埋没症候群や幽門部狭窄の軽減が期待できます。
- 胃瘻バルーンカテーテル I は、ISO-80369-3コネクタに接続可能な大口径コネクタを装備しています。胃瘻用内視鏡の挿入も可能です。(適応サイズ20-24Fr)。


### GB胃瘻バルーンカテーテル バルーンチューブ

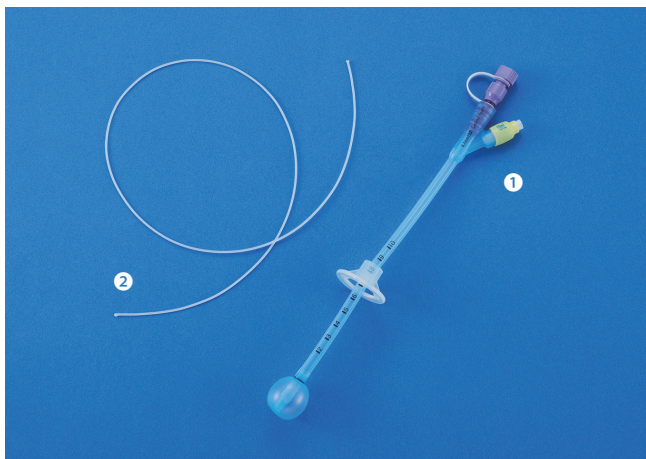

キット内容

- ① チューブ 1本
- ② スタイレット 1本

### 胃瘻バルーンカテーテル I (GB胃瘻バルーンチューブ I) バルーンチューブ

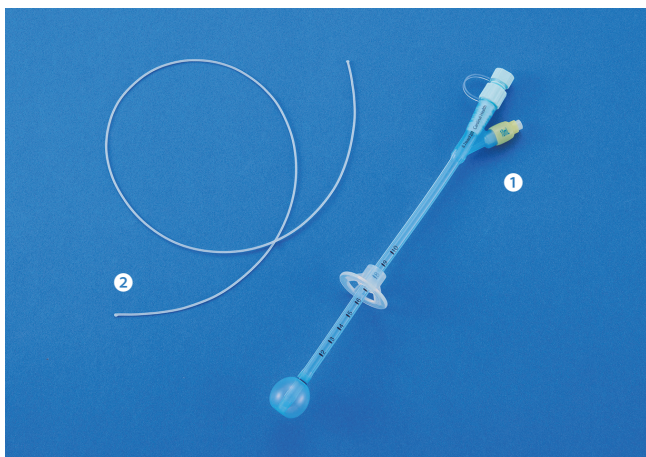

キット内容

- ① チューブ 1本
- ② スタイレット 1本





胃瘻バルーンカテーテル I (GB胃瘻バルーンチューブ I)  
大口径で毎日のお手入れを容易にします。

# JEJUNAL TUBE

## ジェジュナルチューブ

- 胃に溜まるガスを減圧ルーメンで吸引し、圧力を低減させます。  
また胃内減圧ルーメンに減圧用延長チューブを接続することで、減圧時の取り扱いが良くなります。
- 内径の大きいシリコンチューブを採用し、栄養剤が詰まりにくい設計です。
- テーパー形状の先端部が挿入時の抵抗を軽減し、  
X線造影性のある先端部によりX線透視下で目的部位への留置が可能です。  
また、親水性ガイドワイヤにより、チューブの挿入を容易にします。  
付属のガイドワイヤ用T型コネクタにより挿入中のガイドワイヤの固定も可能です。

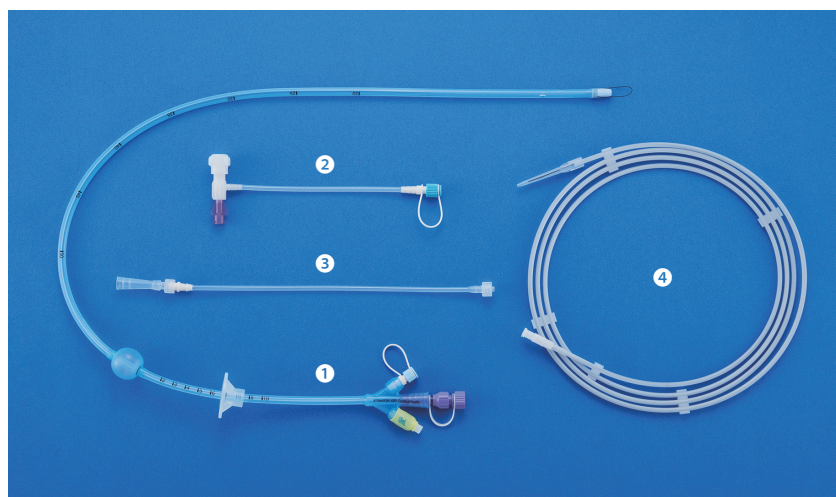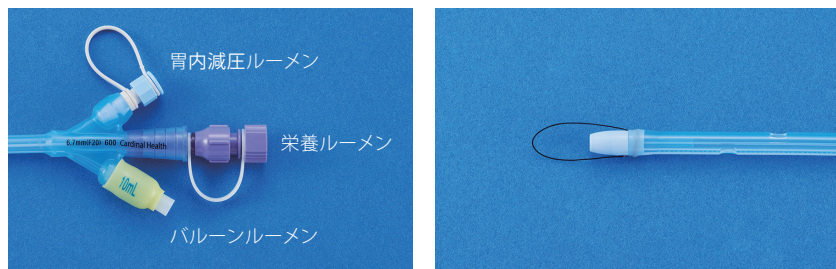

### キット内容

- ① ジェジュナルチューブ 1本
- ② ガイドワイヤ用 T型コネクタ 1本
- ③ 減圧用延長チューブ 1本
- ④ 親水性ガイドワイヤ 1本  
(全長2,400mm / 外径0.045inch)



GB胃瘻バルーンカテーテル  
バルーンボタン スモールタイプ

カタログ番号	外径 (mm)	シャフト長 (mm)	バルーン容量 (mL)		
37GBS12103	4.0 (12Fr)	10	3		
37GBS12153		15			
37GBS12203		20			
37GBS12253		25			
37GBS12303		30			
37GBS14103	4.7 (14Fr)	10	4		
37GBS14153		15			
37GBS14203		20			
37GBS14253		25			
37GBS14303		30			
37GBS14353		35			
37GBS14403		40			
37GBS14453		45			
37GBS16103		5.3 (16Fr)		10	5
37GBS16153				15	
37GBS16203	20				
37GBS16253	25				
37GBS16303	30				
37GBS16353	35				
37GBS16403	40				
37GBS16453	45				
37GBS20203	6.7 (20Fr)		20	10	
37GBS20253			25		
37GBS20303		30			
37GBS20353		35			
37GBS20403		40			
37GBS20453	45				
37GBS24203	8.0 (24Fr)	20	10		
37GBS24253		25			
37GBS24303		30			
37GBS24353		35			
37GBS24403		40			
37GBS24453	45				

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

一般的名称：短期的使用胃瘻栄養用チューブ  
販売名：GB胃瘻バルーンカテーテル  
医療機器認証番号：220ADBZX00115000  
特定保険医療材料名：胃瘻カテII、胃瘻カテIII(ジェジュナルチューブ)  
クラス分類：II 管理医療機器  
製造販売元：富士システムズ株式会社

一般的名称：短期的使用胃瘻栄養用チューブ  
販売名：胃瘻バルーンカテーテルI  
医療機器承認番号：30100BZX00256000  
特定保険医療材料名：胃瘻カテII  
クラス分類：II 管理医療機器  
製造販売元：富士システムズ株式会社

Cardinal Healthは、Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) の会員です。  
GEDSAは、患者の安全性を高めることを目的とした医療機器用チューブコネクタの国際規格の導入を支援するために設立されました。  
ENFit™はGEDSAの商標です。

©2024 Cardinal Health. All Rights Reserved.  
CARDINAL HEALTH、Cardinal Healthロゴ、KANGAROOはCardinal Healthの商標又は登録商標です。  
GBマークは富士システムズ株式会社の登録商標です。

GB胃瘻バルーンカテーテル  
バルーンチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	有効長 (mm)	バルーン容量 (mL)
37GBT123	4.0 (12Fr)	195	3
37GBT143	4.7 (14Fr)		4
37GBT163	5.3 (16Fr)		5
37GBT183	6.0 (18Fr)		10
37GBT203	6.7 (20Fr)		
37GBT223	7.3 (22Fr)		
37GBT243	8.0 (24Fr)		

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

胃瘻バルーンカテーテルI (GB胃瘻バルーンチューブI)  
バルーンチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	有効長 (mm)	バルーン容量 (mL)
37GBT121	4.0 (12Fr)	195	3
37GBT141	4.7 (14Fr)		4
37GBT161	5.3 (16Fr)		5
37GBT181	6.0 (18Fr)		10
37GBT201	6.7 (20Fr)		
37GBT221	7.3 (22Fr)		
37GBT241	8.0 (24Fr)		

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

GB胃瘻バルーンカテーテル  
ジェジュナルチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	先端 把持糸 タイプ	バルーン容量 (mL)	腸内チューブ全長 (mm)
37GJT203	6.7 (20Fr)	把持糸 タイプ	10	600

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

GB胃瘻バルーンカテーテル  
フィーディング・減圧チューブ

カタログ番号	接続タイプ	全長 (mm)
37GBS09S3	ストレート型	90
37GBS28S3		280
37GBS28L3	L字型	280
37GBS60L3		600

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 再使用禁止

内視鏡アダプタ/エア注入用ポンプ

カタログ番号	品名
37BP	エア注入用ポンプ
37BTA1	内視鏡アダプタ 胃瘻バルーンカテーテルI専用

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel：0120-917-205

cardinalhealth.jp

ct-ef-gpeg  
2403.2000.es