


# 低圧持続吸引の可能な 二重管タイプの胃管カテーテル


Salem Sump™ セイラム サンプ™ チューブ

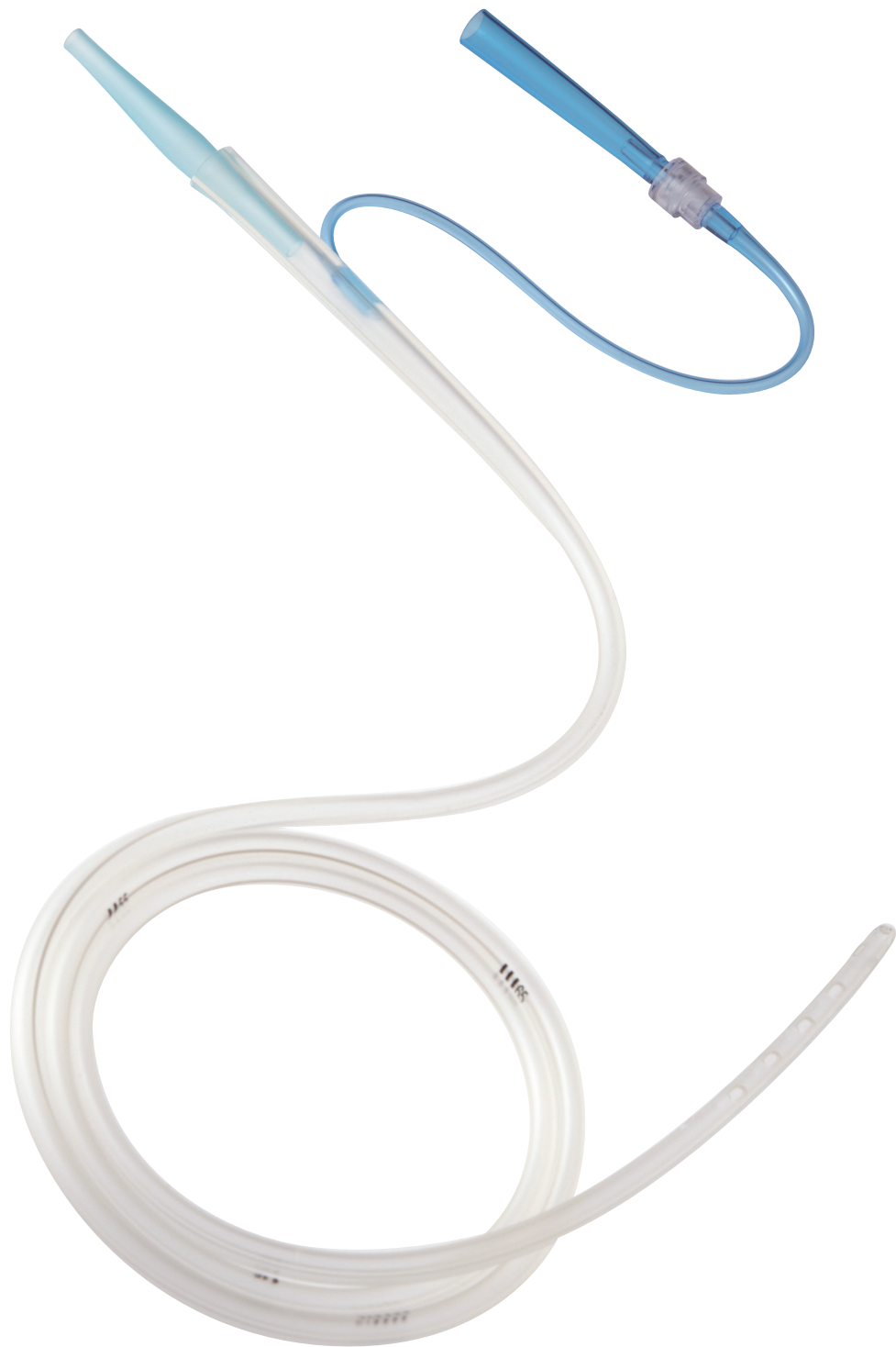


## セイラム サンプ™ チューブ（逆流防止弁付）の特長

- 組織の吸着を防ぎ、スムーズな吸引が行えます（サンプ効果）。
- X線により正確なチューブ位置の確認ができるセンチネルライン™とセンチネルアイ™を設けています。
- デプスマークが付いていますので、挿入深度の確認が容易にできます。
- エアルーメン（ピッグテール）は、灌注用としても使用できます。
- ピッグテールは、吸引中断時にキャップとして使用でき、チューブ内を衛生的に保ちます。
- 逆流防止弁により胃内容物の逆流を防止することで、逆流によって汚染されることを軽減します。


### 正常に機能している時の状況

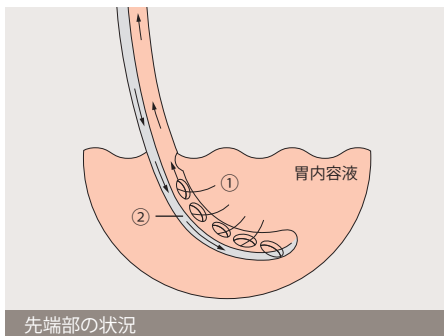

- 先端部の状況
- ① 胃内容液は、排液腔に引き込まれます。
  - ② 側孔にかかった吸引圧は、エアルーメンを通して流入する空気によって適切な圧に維持されます。

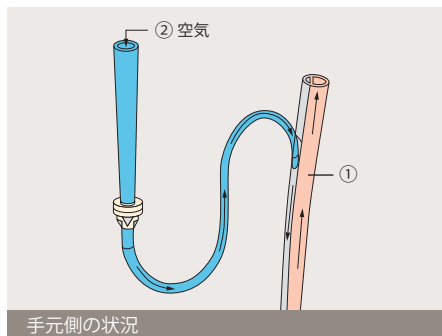

- 手元側の状況
- ① 胃内容液は、排液腔から排液されます。
  - ② 空気が一方弁を通してエアルーメンに流入します。

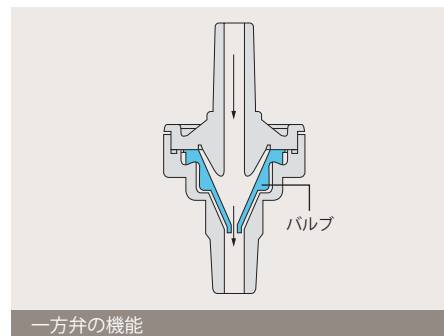

- 一方弁の機能
1. 逆流防止弁に内圧がかかる程、弁は強く閉じます。
  2. 胃内容液の逆流を防止します。

### セイラム サンプ チューブ（逆流防止弁付）

カタログ番号	チューブ	長さ (cm)
	外径 (mm)	
3201-10	3.3 (10Fr)	88
3201-12	4.0 (12Fr)	
3201-14	4.7 (14Fr)	
3201-16	5.3 (16Fr)	
3201-18	6.0 (18Fr)	
3201-8-S	2.7 (8Fr)	88
3201-10-S	3.3 (10Fr)	
3201-12-S	4.0 (12Fr)	
3201-14-S	4.7 (14Fr)	
3201-16-S	5.3 (16Fr)	
3201-18-S	6.0 (18Fr)	120
3201-10	3.3 (10Fr)	
3201-12	4.0 (12Fr)	
3201-14	4.7 (14Fr)	
3201-16	5.3 (16Fr)	
3201-18	6.0 (18Fr)	

S…ソフトタイプ 包装：1本毎滅菌済 包装単位：50本/箱 ピールバック入り 再使用禁止  
材質：ポリ塩化ビニル

#### 製品規格

一般的名称：短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル  
販売名：セイラム サンプ チューブ  
医療機器認証番号：225AABZX00046000  
クラス分類：II 管理医療機器



cardinalhealth.jp



製品情報サイトは  
こちら

お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
TEL 0120-917-205