

2024年11月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PICC キット（セルジンガータイプ、標準タイプ）」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : PICC キット

改訂内容 :

改訂前	改訂後
<p>【使用方法等】</p> <p>(11) カテーテルをガイドワイヤに沿わせて、血管内へ挿入する。 〈注意〉体内にカテーテルを挿入する前にガイドワイヤの端をカテーテルのアダプタより引き出し、保持しておくこと。</p>	<p>【使用方法等】</p> <p>(11) カテーテルをガイドワイヤに沿わせて、血管内へ挿入する。 〈注意〉体内にカテーテルを挿入する前にガイドワイヤの端をカテーテルのアダプタより引き出し、保持しておくこと。 〈注意〉カテーテル挿入時、抵抗を感じた場合は生理食塩液等でガイドワイヤを濡らすこと。</p>

改訂理由 : ガイドワイヤ表面の湿潤を維持する注意文書を追加したため。

販売名 : PICC キット

製品名 : PICC キット（セルジンガータイプ、標準タイプ）

医療機器承認番号 : 21900BZX00862000

クラス分類 : IV 高度管理医療機器

一般的名称 : 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDN コード : 36257100



変更後の電子化された添付文書を開覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

