

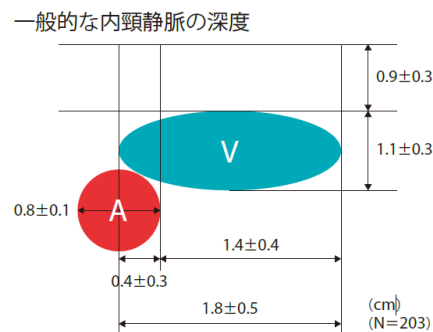


# SMAC Plus MicroNeedle Type 20/22G Short Cannula + 金属穿刺針

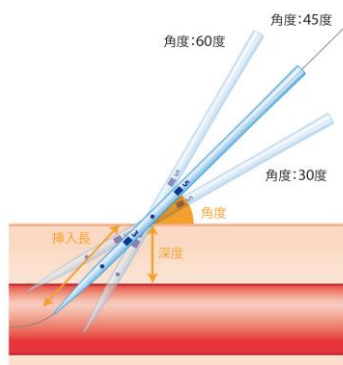

安全な中心静脈穿刺をサポートする新たなキットを準備しました

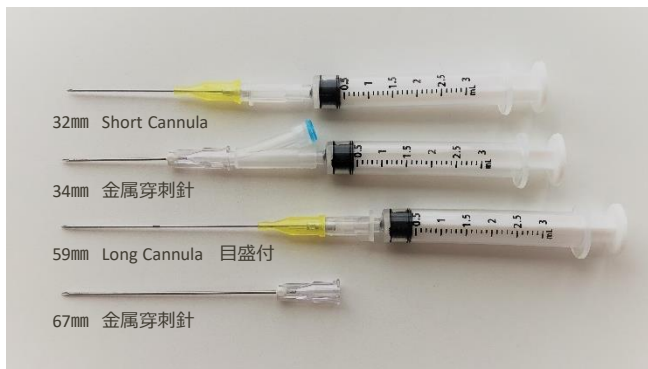

1) 徳嶺 謙芳, 新田 憲市, 照屋 孝二, ほか.  
超音波ガイド下内頸静脈穿刺 — 琉球大学附属病院 203 症例での検討 —  
日臨麻会誌 2008;28:439-46.


## 穿刺深度を限定できる穿刺針・ダイレータ

32mm Short Cannulaを同梱し、Yサイト付3ccシリンジに予め34mm金属穿刺針をセットすることで、最も実施頻度が高い内頸静脈穿刺時の過挿入に伴う合併症リスク低減を物理的にサポートします。

同様、59mm Long Cannulaも3cm部分に目盛を追加、潤滑コートダイレータにも深度目盛をつけ、挿入に伴う機械的合併症減少に貢献します。

## 選択しやすい位置にセット


複数の診療科におよび多くの先生方が使用し、なおかつ経験の浅い先生方も使用するため、誰でも短針を1st Choiceできるように配置を工夫しております。

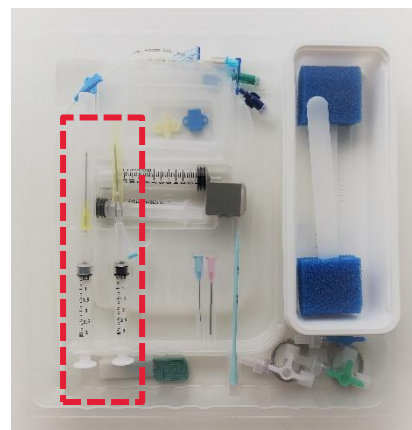

短針を選択しやすい配置

## 全身を覆うドレープ<sup>®</sup> 120cm×120cm 2セット

120cm×120cmの穴開きドレープ/穴無しドレープを同梱しているため、全身を覆うことが可能です。キット内に同梱することで、確実な中心静脈カテーテル留置時の感染対策をサポートします。

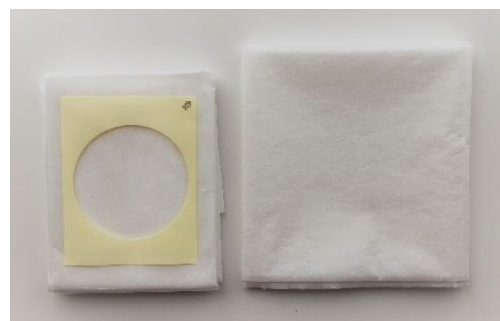

一般的名称： 中心静脈用カテーテル  
JMDNコード： 10729100  
販売名： SMAC プラス  
医療機器承認番号： 21900BZX00953000  
特定保険医療材料名： 中心静脈用カテーテル 標準型 シングルルーメン  
中心静脈用カテーテル 標準型 マルチルーメン  
クラス分類： IV 高度管理医療機器

# SMAC Plus MicroNeedle Type


## Full kit ラインナップ

### シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル			プラスチックカニューラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ		
	外径(mm)	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	カニューラ長(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状
191608ZFX	1.5(16G)	20	20	1.0(20G)	32 59	0.93(20G)	34 67	0.64/(0.025)	59	J
191608GFX				0.8(22G) 1.0(20G)		0.75(22G)		0.44/(0.018)		


包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタンx線不透過ライン入り 再使用禁止

### ダブルルーメン

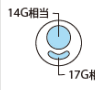カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ		
	外径(mm)	断面図	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	カニューラ長(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状
191208WZFX	2.5mm(12G)		20	20	1.0(20G)	32 59	0.93(20G)	34 67	0.64/(0.025)	59	J
191223WZFX			60	55						99	
191208WGFX			20	20	0.8(22G)	0.75(22G)	0.44/(0.018)	60	アングル		
191223WGFX			60	55	1.0(20G)			100			

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタンx線不透過ライン入り 再使用禁止

### トリプルルーメン


カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ		
	外径(mm)	断面図	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	カニューラ長(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状
191208TZFX	2.5mm(12G)		20	20	1.0(20G)	32 59	0.93(20G)	34 67	0.64/(0.025)	59	J
191223TZFX			60	55						99	
191208TGFX			20	20	0.8(22G)	0.75(22G)	0.44/(0.018)	60	アングル		
191223TGFX			60	55	1.0(20G)			100			

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタンx線不透過ライン入り 再使用禁止

### キット内容

(トリプルルーメン191208TZFX)

- 1カテーテル本体 (スタイルット付)
- 2ガイドワイヤ J型 0.64mm(0.025inch)×59cm
- 3プラスチックカニューラ針 1.0mm(20G)×32mm 内径0.7mm
- 4プラスチックカニューラ針 1.0mm(20G)×59mm 内径0.7mm
- 5金属穿刺針 Yサイト付0.93mm(20G)×34mm
- 6金属穿刺針 0.93mm(20G)×67mm
- 7ダイレータ
- 8注射針1.24mm(18G)
- 9注射針0.63mm(23G)
- 10スカルペル
- 11固定具
- 12三方活栓
- 13スポンジステック(2本)
- 14トレイ
- 15カップ
- 16注射筒(12cc)
- 17注射筒(6cc)
- 18針置き
- 19持針器
- 20針付き縫合糸 (曲針)
- 21穴開きドレープ
- 22穴無しドレープ
- 23ドレッシング
- 24ガーゼ(8枚)

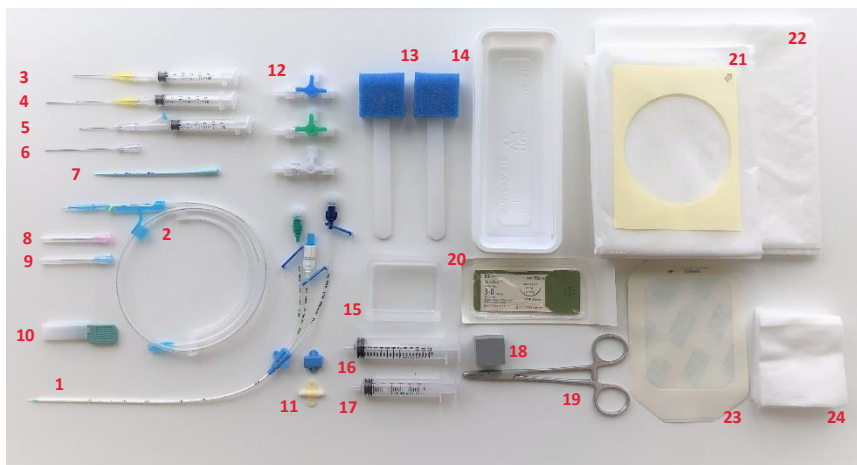

お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel: 0120-917-205  
Cardinalhealth.com