



クリーニング方法のご案内

カンガルー Connect ポンプ 超音波センサー

カンガルー Connect ポンプは、上流と下流の2つの超音波センサーでフローを判定しております。

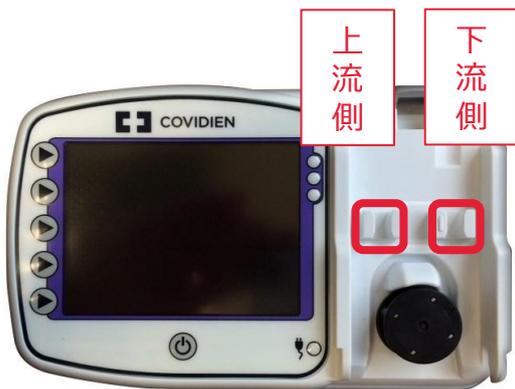


※超音波センサーイメージ図

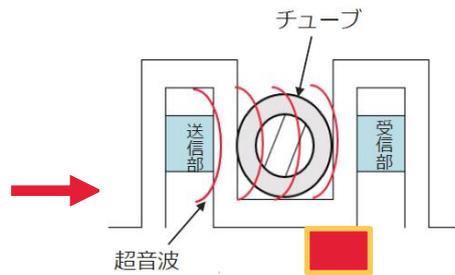

アラーム判定

- ・バッグ側チューブ閉塞
- ・患者側チューブ閉塞
- ・バッグ空

カセット取り付け、超音波センサー部分

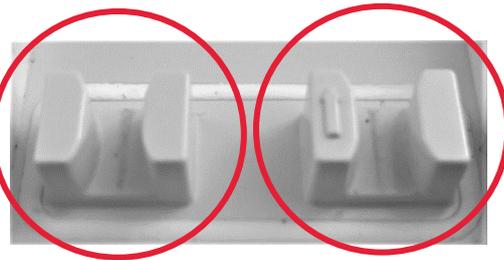

超音波センサー付近に汚れ、ホコリ、水滴が付着していると正常動作、ポンプテストに影響があります。閉塞エラーやE70エラーが発生する可能性があります。



綿棒などで汚れ、ゴミ、水滴を念入りに取り除いてください。

赤線内は凹みは汚れが溜まりやすいので注意。

ご使用方法を動画で確認したい場合は
こちらのサイトからご覧ください。

https://pages.cardinalhealth-info.jp/Kangaroo-Connect-Pump_Instructional-Video.html



詳細な操作方法については取扱説明書をご参照ください。

お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120.917.205
cardinalhealth.jp