




CardinalHealth™

Kangaroo™

カンガルー OMNI™ ポンプ

クイック リファレンス ガイド

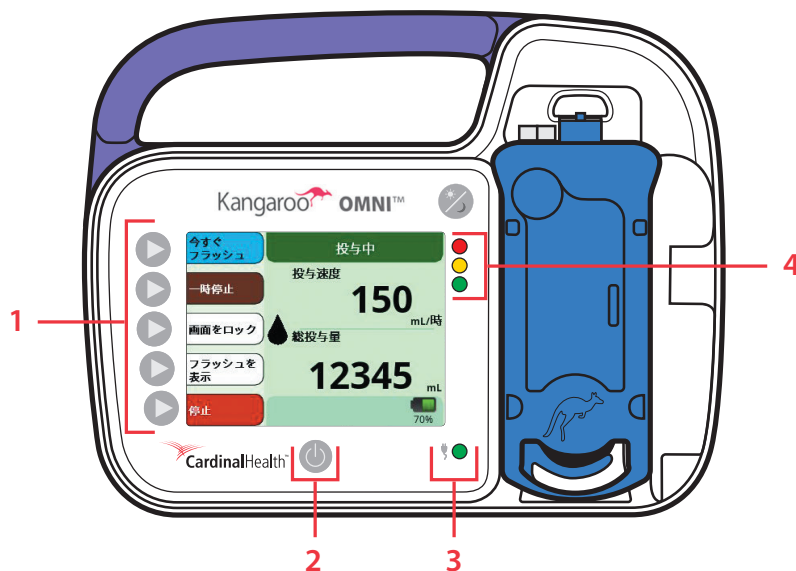

1. ボタン選択

ボタンを押して、画面に表示されるオプションを選択します。

2. 電源ボタン

1回押すと電源が入ります。
長押しで電源オフになります。


3. 電源インジケーター

ポンプが AC 電源に接続されている場合、
緑色に点灯します。


4. ステータスインジケーター

- = 警告アラーム
- = 通知または注意アラーム
- = スタンバイまたは投与中


使用前の準備

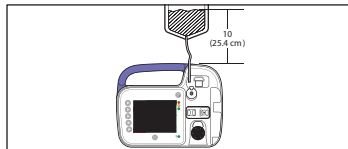


1. 栄養剤の液面が本装置の上部から25.4cmの位置になるように(図示)、栄養剤バッグまたはコネクタを吊るします。

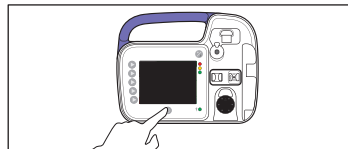

2. 電源ボタンを押します。

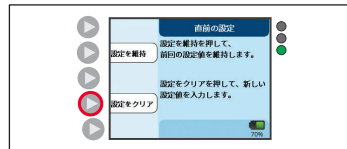


3. [設定をクリア] もしくは[設定を維持]を選択します。[設定を維持]は前回の設定値を維持します。

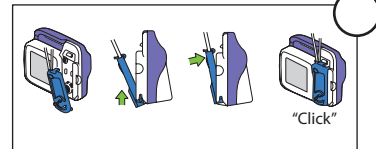


4. 画面に表示されるイラストの指示に従って、ポンプにカセットを装着します。


プライミング

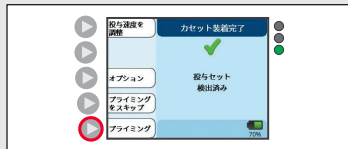


1. [プライミング]を選択します。

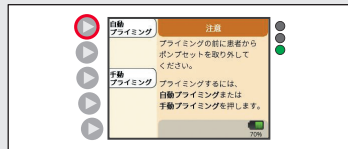

2. [自動プライミング]を選択します。

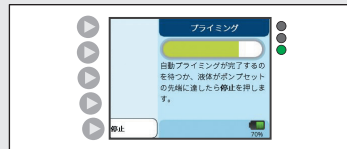


3. 自動プライミングを選択した場合：プライミングの完了を待ちます。

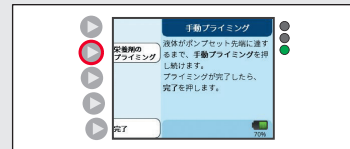


4. [手動プライミング]を選択した場合：液体がチューブ先端に達するまで、[栄養剤のプライミング]を押し続けます。

新たな投与の開始

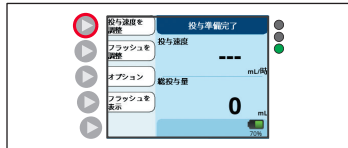

[設定をクリア]を選択した場合：
1. [投与速度を調整]を選択します。

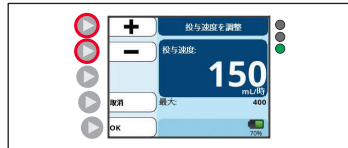

2. ボタンを押して投与速度を入力し、OKを選択します。




3. 投与を開始する準備ができれば[開始]を選択します。

投与の一時停止




1. 投与を一時停止するには[一時停止]を選択します。

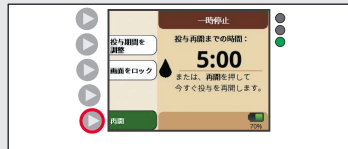

2. 投与を再開するには、[再開]を選択します。

電源をオフにする

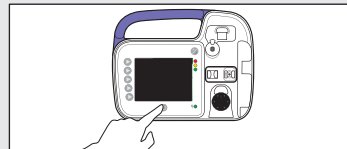

1. 電源ボタンを3秒間長押しします。



Manufactured for:
Cardinal Health 200, LLC
3651 Birchwood Drive Waukegan, IL 60085 USA
2024-04 - cardinalhealth.com
HP112060

ICRP Cardinal Health Ireland Manufacturing Limited
Tullamore Business & Technology Park Tullamore, County Offaly, R35 H903 Ireland
UKRP: Cardinal Health UK 432 Limited Princes Exchange, Princes Square Leeds, West Yorkshire, LS1 4HY United Kingdom

©2024 Cardinal Health 無断転載禁止
CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthのロゴ、KANGAROOのロゴおよびKANGAROO OMNIはCardinal Healthの商標であり、米国および/またはその他の国で登録されている場合があります。特許: cardinalhealth.com/patents

販売名: カンガルー OMNI ポンプ
医療機器承認番号: 30500BZX00190000

お問い合わせ先: カーディナルヘルス株式会社
Tel: 0120-917-205

mt-en-komc
2409.1000.Marc

詳細な操作方法については取扱説明書をご参照ください。