

SCD700 シリーズ 日常点検記録表

清掃・点検者

責任者

設置場所： _____ SERIAL： _____

点検項目	点検内容		月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
清掃	必要に応じて接続チューブも実施 (スプレーや霧吹きなどを噴霧せず、柔らかい布、キムワイブやキムタオル等に適度に染み込ませて拭いて下さい。)							
外装	機器本体、ディスプレイ、電源コード、接続チューブに傷、損傷が無いことを確認							
動作	バッテリー稼働での電源 ON/OFF 確認							
	電源コードをコンセントに繋ぎ AC 電源インジケータ点灯確認							
	接続チューブとスリーブを繋ぎ電源ボタンを押し電源が入り、自己診断動作からスリーブへ適切に空気が送気されていることを確認 (※1)							
	異臭や異音が無いことを確認							
	バー ジョン	02.01.00 迄 03.01.00 (患者検知機能 OFF)	上記動作継続後アラームが発生しないことを確認 (※2)					
03.01.00 (患者検知機能 ON)		人体に装着しない場合、非検知アラームが発生することを確認 (※3)						

- バッテリーの交換推奨年数は約3年です。
- この点検は接続チューブとレッグスリーブが必要です。
- ※1 COVIDIEN のロゴ表示後自己診断動作に移行
- ※2 観察時間は電源 ON 後の血液再充満検知稼働が動作するまでの最大 10 分
- ※3 E12 が発生する場合がありますがその場合は電源を入れ直して下さい。