



SmarTip ニードルレスカニューラ


No needle means no needlestick



安心で安全な調製のために

SmarTip ニードルレスカニューラは薬液の調製時の針刺し・切創から医療従事者や患者を守るために開発された、プラスチックカニューラです。

SmarTip ニードルレスカニューラを金属針の代わりに使用する事で、針刺し・切創のリスクを低減します。

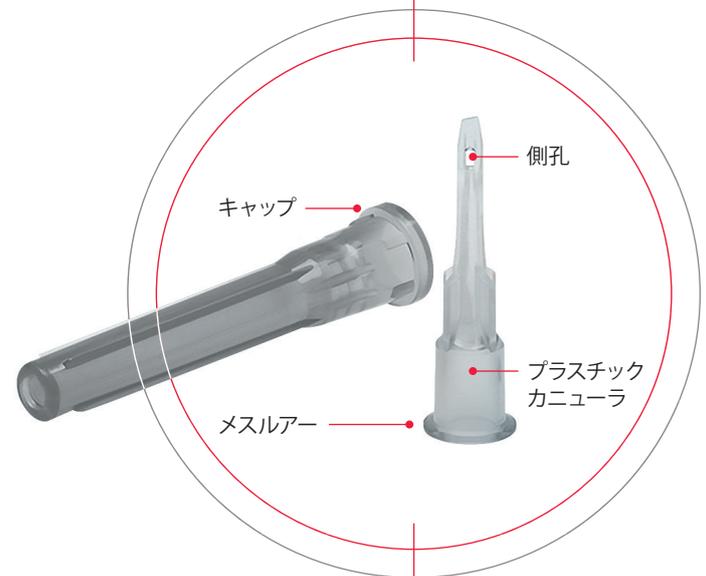

Needleless

for clinician safety

針刺し・切創のリスクを低減するために設計されたプラスチックカニューラ

Anti-coring


for patient safety

バイアルを穿刺するのではなく貫通させることにより、コアリング発生のリスクを低減

Efficient

medication draws

16G相当の流量と2つの側孔により、粘性の高い薬液でも吸引可能

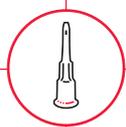

SmarTip ニードルレスカニューーラ


使用方法

- 

清潔操作でSmarTipを包装袋から取り出し、シリンジに接続します。
- 

施設のプロトコルに沿ってバイアルの上面を消毒します。
- 

バイアルを水平な台の上に置いて、SmarTipをバイアルに対して* 垂直に挿入し、貫通させます。(*斜めに挿入するとSmarTipが折れ曲がる事があるため、垂直に挿入すること)
- 

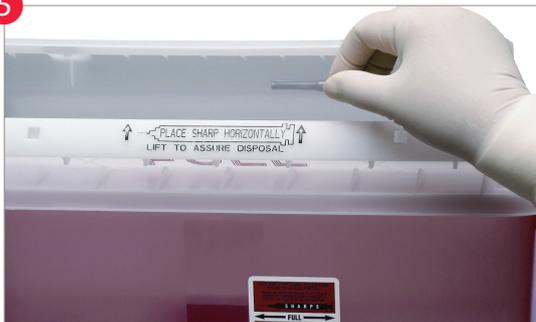バイアルから薬液を吸引します。バイアルを加圧する場合は、バイアルを加圧されすぎて薬液が漏れるのを防ぐため、吸引する薬剤の量と同量の空気を注入してください。
- 

施設のプロトコルに沿ってSmarTipを廃棄してください。

Ordering information

カタログ番号	製品名	包装単位
8881540111	SmarTip ニードルレスカニューーラ	1,000本

包装：1本毎滅菌済 プリスターバック入り 材質：ポリプロピレン 再使用禁止

一般的名称 : 採液針
 販売名 : SmarTip ニードルレスカニューーラ
 届出番号 : 22B1X00007KD014A
 クラス分類 : I 一般医療機器

カーディナルヘルス株式会社
 TEL 0120-917-205

© 2024 Cardinal Health. All Rights Reserved.
 CARDINAL HEALTH、Cardinal Health ロゴは Cardinal Health の商標又は登録商標です。


CardinalHealth™
cardinalhealth.jp

製品情報サイトは
 こちら



ct-dv-smar
 2409.2000.Mark