



使用方法

Instruction For Use


Argyle™ Fukuroi カテーテル フィクスチャ

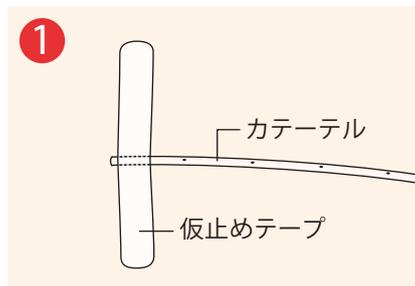


付属の仮止めテープでカテーテルを固定する。

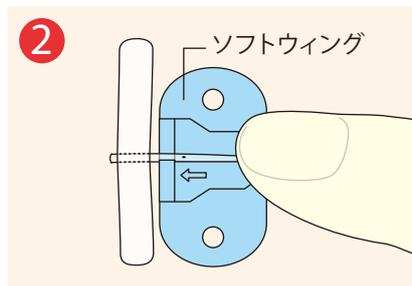


ソフトウイングの矢印を刺入部側に向け、カテーテルを溝にはめ込む。

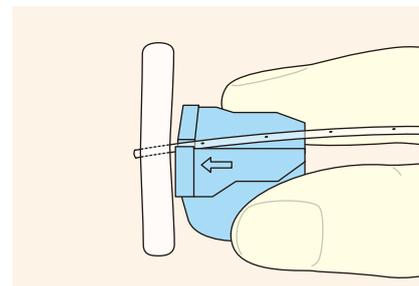


はめ込みにくい場合は、ソフトウイングの両翼を指で曲げ、溝を広げてからカテーテルをはめ込む。

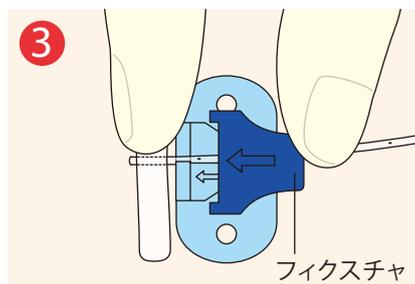


フィクスチャをソフトウイングの上に被せる。

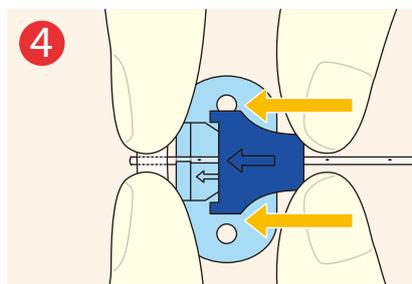


指でフィクスチャをスライドさせ、ソフトウイングに装着する。

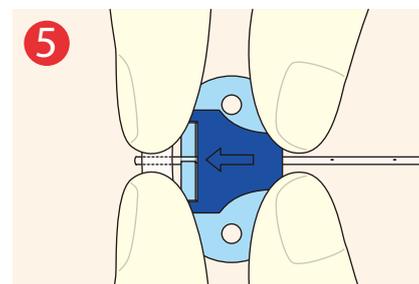

確実に押し込まれたことを確認する。

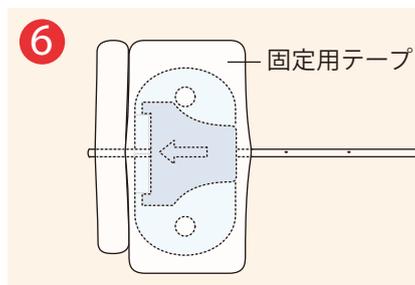

本体の上から付属の固定用テープで固定し、仮止めテープを剥がす。



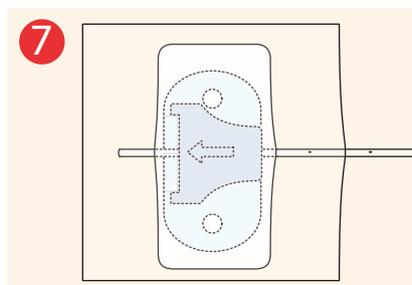


装着後は、院内のプロトコールに従い、透明ドレッシング材等を使用してカテーテルの皮膚刺入部を中心にフィクスチャも含めて保護する。

確認ポイント

Point

1. 青いフィクスチャをスライドする時は、両手の親指で押し込むと、嵌めこみやすくなります。
2. フィクスチャをスライドして固定する際、図のような状態で嵌合していない事をご確認ください。
3. テープ交換の際は、フィクスチャ全体を人差し指で押さえ、そこを支点として周囲からテープを剥がすと、カテーテルがずれることなくきれいに剥がせます。

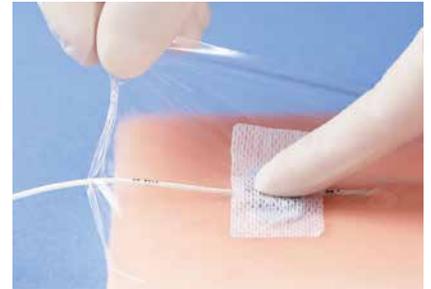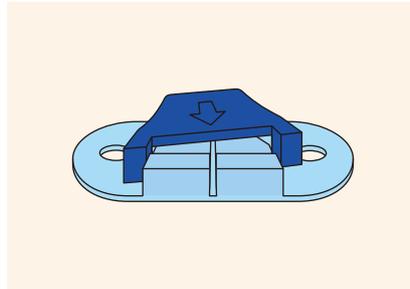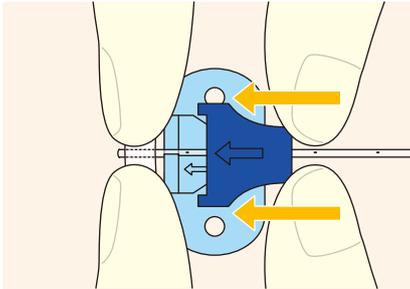

4. カテーテル フィクスチャは、カーディナルヘルス株式会社「Argyle™ Fukuroi PICC キット」専用固定具です。PICC キット以外のカテーテルに使用しないでください。
5. ソフトウイングの二つの穴を使用して、皮膚と縫合固定する必要はありません。
6. ソフトウイングは、カテーテルサイズによってカラーコードされています。使用するカテーテルに適合した固定具をご使用ください。固定用テープは各サイズ共通です。
7. 固定具キットは、固定具「ソフトウイング+フィクスチャ」と固定用テープの開封口は異なります。上下別々の開封口より取り出して下さい。



ご使用の際には添付文書をよくお読みください。

一般的名称 : カテーテル等保持用ホルダ
販売名 : カテーテル フィクスチャ
医療機器届出番号 : 22B1X00007NS020A
クラス分類 : I 一般医療機器



製品情報サイトは
こちら