

特徴

統一されたシステム 造設も交換も同じシステム

Kangaroo™
カンガルー™ セルジンガー PEG キット



ガイドワイヤによる瘻孔保持で
より安全な胃瘻造設・交換手技を提供します

造設

交換

異なる手技と、異なるカテーテルを
1つのコンセプトで結びました

Kangaroo™
カンガルー™ PEG キット
セイフティチューブ付



Kangaroo™
カンガルー ボタン™ II



Kangaroo™
カンガルー™ バンパー G-チューブ



特徴

日本国内で製造 Made in Japan

カンガルーシリーズは、静岡県袋井市にある袋井R&Dセンターで開発され、袋井工場で製造されています。国内の医療従事者の声を反映し、日本の患者さんに適した製品設計で日本の医療の安全を追求します。



一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン 販売名：カンガルー ボタン II
医療機器承認番号：21600BZZ00252000 クラス分類：III 高度管理医療機器

一般的名称：長期的使用胃瘻栄養用チューブ 販売名：カンガルー バンパー G-チューブ
医療機器承認番号：21800BZZ10067000 クラス分類：III 高度管理医療機器

一般的名称：長期的使用胃瘻栄養用チューブ 販売名：カンガルー PEG キット
医療機器承認番号：21100BZZ00746000 クラス分類：III 高度管理医療機器

一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン 販売名：カンガルー セルジンガー PEG キット
医療機器承認番号：21600BZZ00253000 クラス分類：III 高度管理医療機器



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel：0120-917-205
cardinalhealth.jp

カンガルー PEG シリーズ

開発ヒストリー・製品コンセプト



Think Safety

日本の医療の安全を追求します



カンガルー PEG シリーズはどのようにして生まれたのか

胃瘻造設・交換のさらなる安全性向上を目指して生まれたカンガルー PEG シリーズ
素材、形状から徹底的にこだわって生まれたカンガルー ボタン II、その開発背景に迫る



カンガルー PEG シリーズ 製品コンセプト

病院から在宅まで様々な職種の方が取り扱い、また患者自身も触れる機会が多い胃瘻デバイスだからこそ
simple & safetyを目指して開発されてきた

安全な造設・交換のために

- バンパー伸展ロックシステム
- 潤滑コーティング
- ガイドワイヤ交換システム
- 感染防止対策セーフティチューブ

長期留置のための

- ポリウレタン素材
- 事故抜去低減バンパー
- バンパー埋没症候群防止バンパー

より低侵襲を目指した

- 16Frのラインナップ
- 20Frでも24Fr相当の流量確保



特徴

20Frのメリット

低侵襲 & 事故抜去低減と使いやすさの両立

胃瘻は低侵襲な20Frで造設し、
事故抜去低減も両立させる

- 20Frの瘻孔(約6.7mm)に対して、
バンパー径25mmを展開させることで
事故抜去低減
- 24Fr(約8mm)より低侵襲な20Fr
- ポリウレタン製で高流量・高耐久を確保

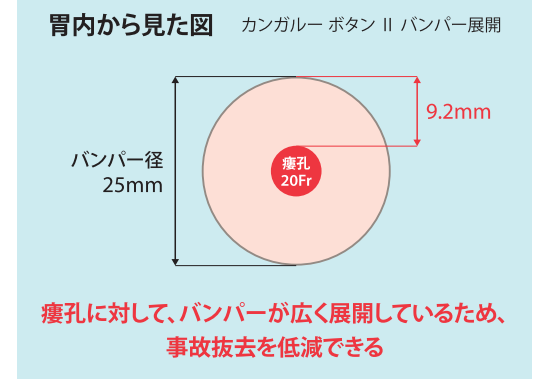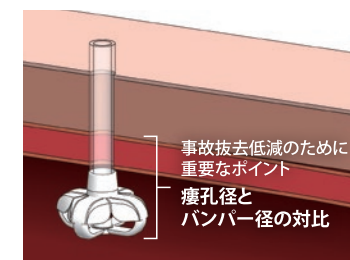



特徴

安全な交換を目指して ガイドワイヤ&メカニカルな交換システム

Replaid(胃瘻安全交換システム)を採用

Replaid=Replacement+aid=交換の補助

- ガイドワイヤはバンパーを胃内に確実に導き、腹腔内への誤挿入事故の危険性を低減
- グリップスター&エクステンダーはバンパー伸展ロック機構により、交換手技への集中を容易化

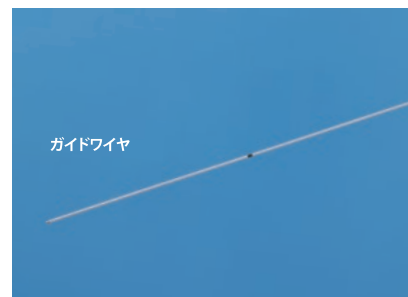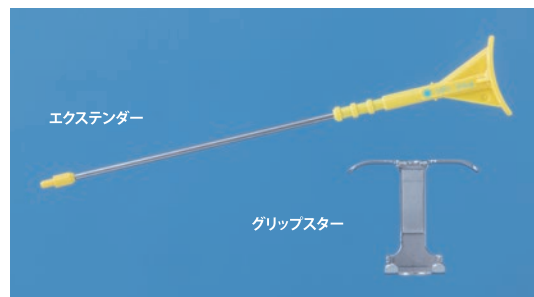

特徴

事故抜去低減を目指して 挿入・抜去しやすく、抜かれにくいバンパー

- 事故抜去しにくい、高い無理抜き強度
- エクステンダー伸展時、カンガルー ボタンの無理抜き強度以下の設計

特徴


バンパー埋没症候群低減を目指して Foldable Dome Type バンパー

バンパー形状にFoldable Dome Typeを採用

- 無理抜き強度向上(カンガルー ボタン対比160%)
- 胃後壁潰瘍防止として、ロープロファイル&ラウンド形状
- 胃前壁潰瘍防止 / バンパー埋没症候群防止



カンガルー ボタン

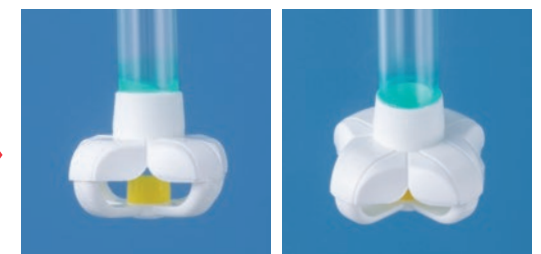

カンガルー ボタン II

特徴

挿入時の抵抗軽減を目指して 潤滑コーティングの採用

バンパー部への潤滑コーティングを採用

- 挿入抵抗の低減: バンパー全体を蒸留水又は生理食塩水に浸すことで潤滑コーティングを活性化
- バンパー全域にわたり塗布

