


穿刺に安心と安全を

Argyle™ Fukuroi アスピレーション セルジンガー キット


Argyle™ Fukuroi トロッカー アスピレーション キット

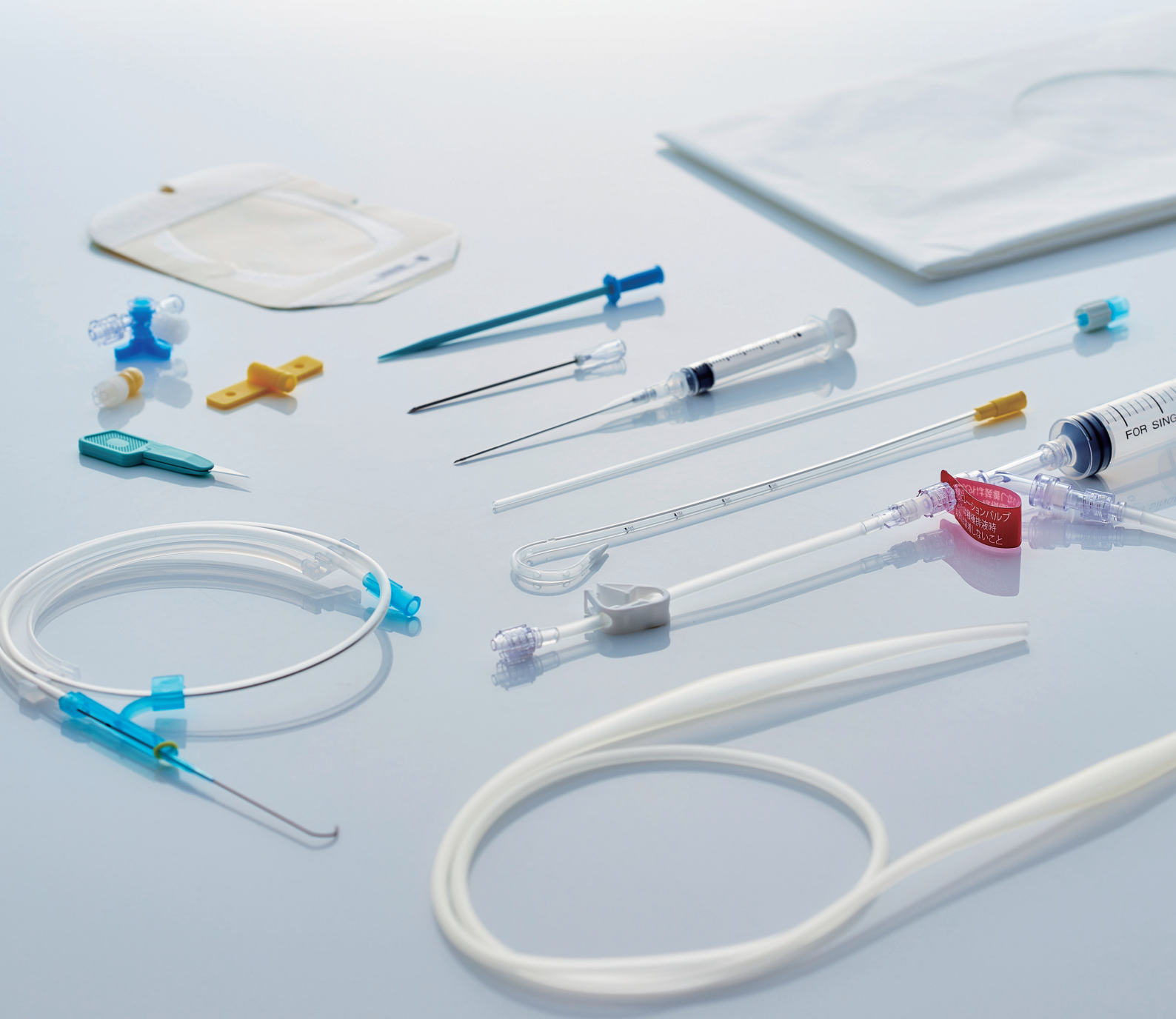

セルジンガー法による手技の“低侵襲化”と、 エコーガイド下穿刺による “見える化”を可能にする穿刺キット

Argyle™ Fukuroi Aspiration Seldinger Kit

12Fr.サイズの追加により、主要サイズと比較して吸引量を25%向上させ、
閉塞リスクの低減に貢献します。
また、フルキット化により、術野の確保から手技の完遂までをサポートします。

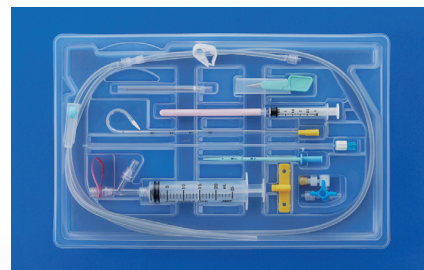

フルキット化

フルキット化により、準備の手間を軽減し、
早期に手技開始、完遂することが可能です。

豊富な付属品

ドレープによる安全な術野確保と、
ドレッシング材と固定翼により適切なカテーテル固定を可能にし、
手技の開始から完了までをサポートします。

ダイレータ

把持部の追加により
操作性が向上しました。
デプスマークの印字により
挿入深度を確認できるよう
になりました。

選べる細径穿刺針


ポリウレタン製の細径カテーテルを
スタイレットと組み合わせることによって
カテーテルの直進性をサポート

接続しやすい排液チューブ

バブル部をカットする事で
様々な接続径に対応可能です。


心膜で、穿刺・ドレナージの安全性を高める工夫

Argyle™ Fukuroi Aspiration Seldinger Kit

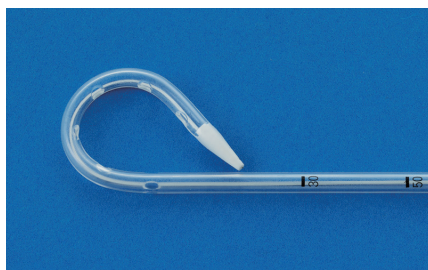


吸着のリスクを低減する ピッグテイルタイプ

ピッグテイルタイプは側孔がループの内側に
あるため、組織吸着のリスクを低減します。

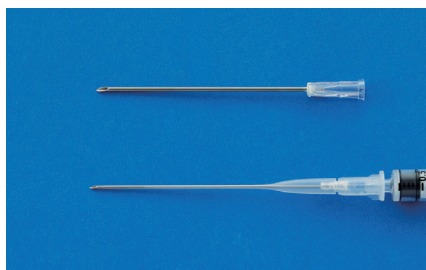

低侵襲な穿刺針

18Gプラスチックカニューラ針により、
低侵襲なアクセスを可能にし、加えて17G
穿刺針の同梱により、手技によって穿刺針を
選択することが可能です。

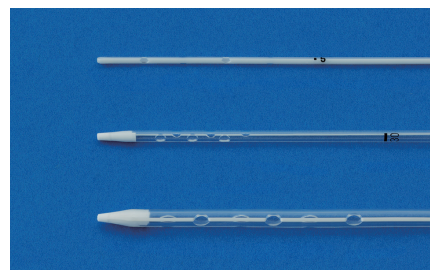

12Fr. サイズを加えたラインアップ

5Fr.、8Fr.に加え12Fr.をラインアップする
ことで、高粘度の貯留液にも対応し、カテー
テル内の閉塞を軽減します。

緊急対応も可能な操作性の高い胸腔/腹腔穿刺・ドレナージ

Argyle™ Fukuroi Trocar Aspiration Kit

鋭利な内套針により、安全性を高め、よりスムーズにカテーテルを留置することができます。


2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、
注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができ、
緊急時にもすばやく適切な対応が可能です。

便利な付属品

皮膚切開用のスカルペルやドレープ、
固定具などがキット化されており、
準備の手間を軽減します。


緊急時に対応できる排液キット

アスピレーションバルブにより注射筒を外すことなく、
早期に積極吸引・排液が可能です。

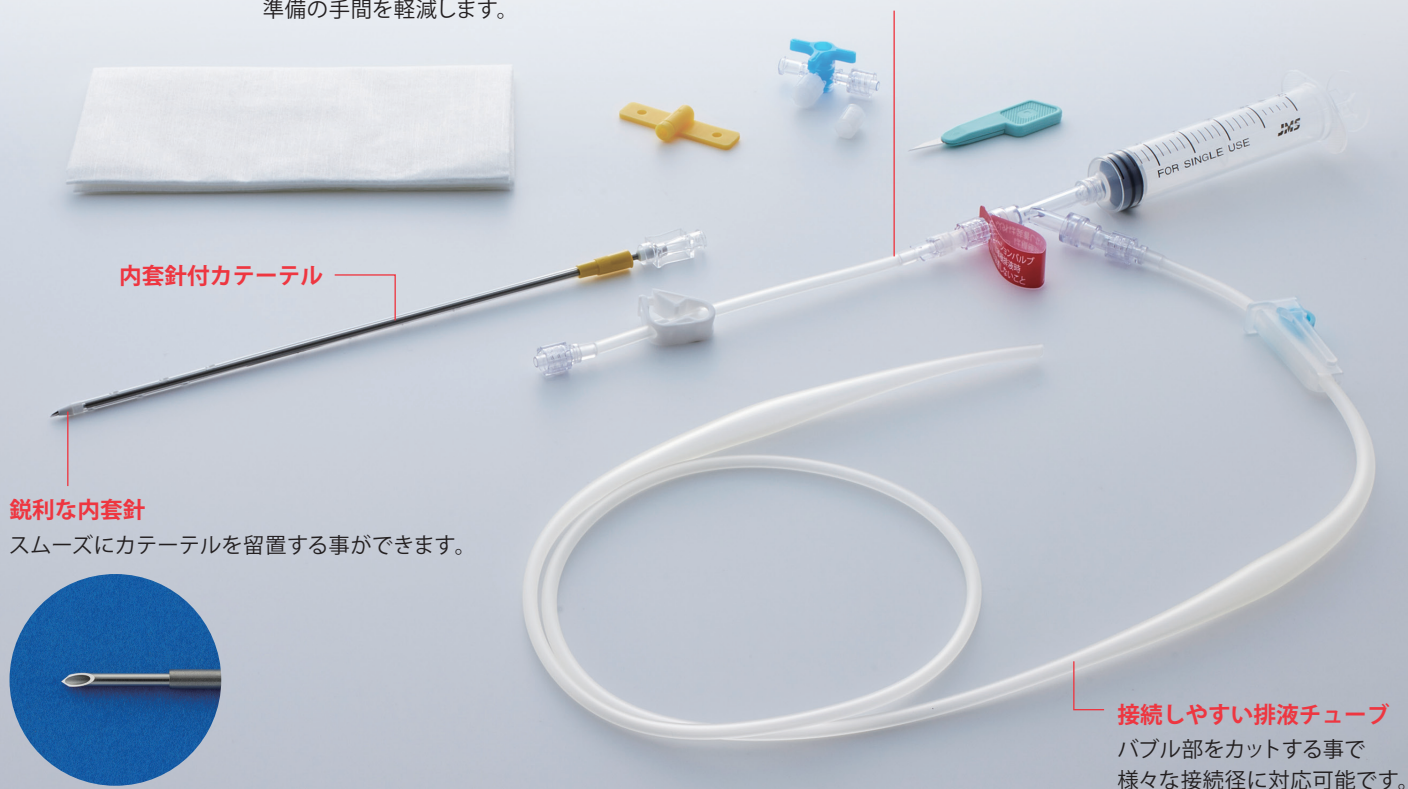

胸腔・腹腔・心膜*で、穿刺・ドレナージの安全性を高める工夫

Argyle™ Fukuroi Trocar Aspiration Kit / Aspiration Seldinger Kit

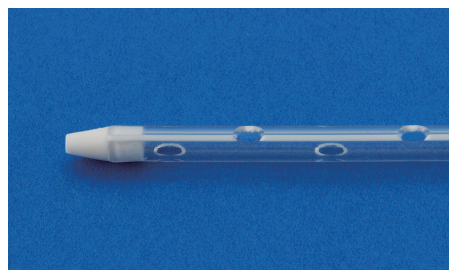

適度なコシのあるポリウレタン製カテーテル

柔軟で耐キンク性を備えると共に、適度な強度があり内腔を広く
確保する事で効率の良い排気・排液を可能にします。




アスピレーションバルブ

2個の逆止弁がついており、注射筒でのポンピング操作で排気・
排液を簡便に効率よく行う事が可能です。


*Trocar Aspiration Kitは心膜穿刺にはご使用いただけません。

Argyle™ Fukuroi アスピレーション セルジンガー キット

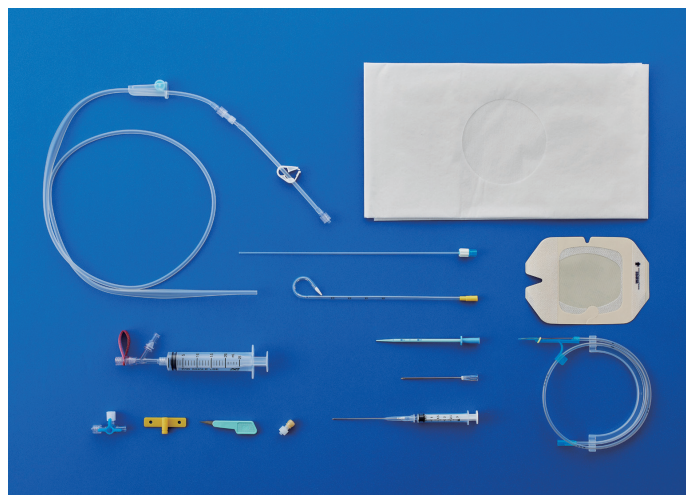

56301220PF

Argyle™ Fukuroi トロッカー アスピレーション キット

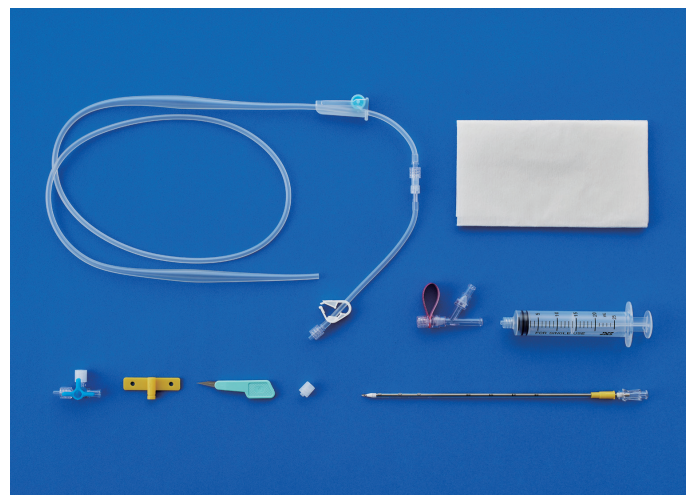

5620-1220

カタログ番号	カテーテル		ガイドワイヤー (mm)	カテーテル 先端形状
	外径 (mm)	有効長 (cm)		
5630-530F	1.5 (5Fr)	20	0.89 (0.035インチ)	ストレート
5630-820F	2.7 (8Fr)			ストレート
5630-820PF				ビッグテイル
56301220F				4 (12Fr)
56301220PF	ビッグテイル			

包装：1キット毎滅菌済 プリスターパック入り 2キット/箱
材質：医療用ポリウレタン

再使用禁止

製品規格

一般の名称：心膜排水用カテーテル
販売名：アスピレーション セルジンガー キット
医療機器認証番号：21200BZZ00302000
クラス分類：II 管理医療機器


カタログ番号	カテーテル		穿刺針外径 (mm)		カラーコード
	外径 (mm)	長さ (cm)	先端	シャフト	
5620-0609	2.3 (6Fr)	9	0.64	1.07	ホワイト
5620-0620		20			
5620-0809	2.9 (8Fr)	9	1.25	1.65	ブラウン
5620-0820		20			
5620-1220	4.2 (12Fr)			1.65	2.41

包装：1キット毎滅菌済 プリスターパック入り 10キット/箱
材質：医療用ポリウレタン


再使用禁止

製品規格

一般の名称：滅菌済み体内留置排水用チューブ及びカテーテル
販売名：トロッカー アスピレーション キット
医療機器承認番号：16200BZZ01117000
クラス分類：II 管理医療機器

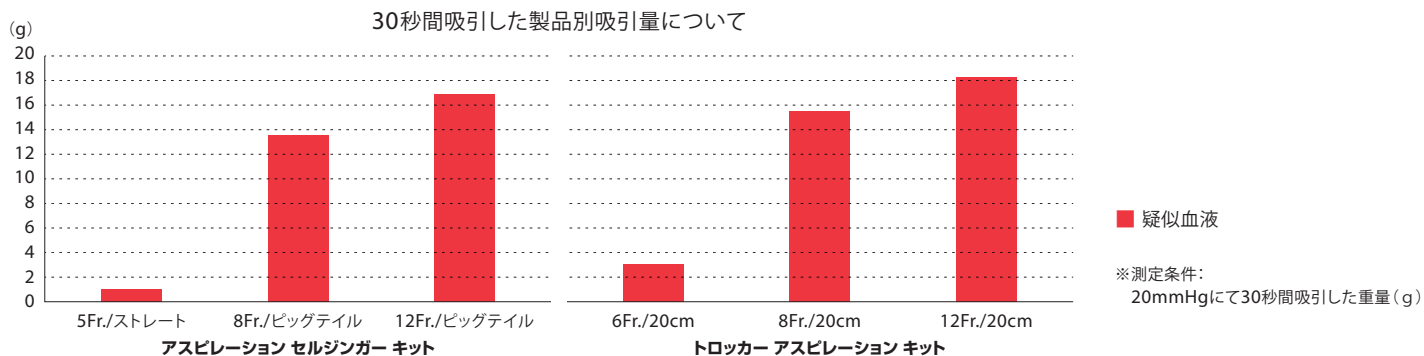


注射筒を使った積極排水時

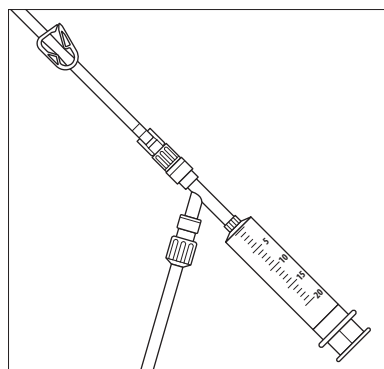

延長チューブにアスピレーションバルブを接続し注射筒を使い排水を行う

低圧持続吸引または自然排水時

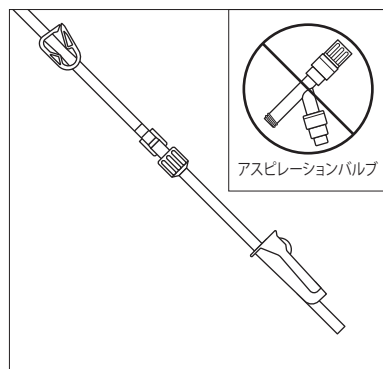

低圧持続吸引または自然排水移行時にはアスピレーションバルブを使用しないこと



本製品に関する
関連動画及び
ケースレポートはこちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120-917-205
cardinalhealth.jp